

GEBRUIKSAANWIJZING

Anti-doorligkussen

**Productcode: BUBBLE EVERYDAY,
BUBBLE EXPERT, BUBBLE EXCLUSIVE**



1. Kenmerken

Het kussen is gemaakt van hoogwaardige materialen. Afzonderlijke luchtcellen die zijn verbonden in één luchtsysteem zorgen voor een goede lichaamsbalans. Druk die op één luchtcel wordt uitgeoefend, zorgt voor een toename van de druk in aangrenzende luchtcellen, waardoor bepaalde lichaamsdelen worden ontlast. Het ontwerp met meerdere luchtcellen en de mogelijkheid om de hardheid aan te passen door lucht op te pompen of te laten ontsnappen, zorgen voor een hoog gebruikscomfort. Bovendien is BUBBLE EXPERT uitgerust met een extra ventiel waarmee de hardheid van het kussen kan worden aangepast aan individuele voorkeuren. De kussens BUBBLE EVERYDAY & BUBBLE EXCLUSIVE zijn voorzien van een efficiënte handpomp.

Het kussen is vervaardigd met behulp van een warmlasmethode om de duurzaamheid en dichtheid te garanderen.

Het kussen heeft een beschermhoes met ritssluiting, gemaakt van mesh-materiaal met een antislipbodem. Een handige draagriem vergemakkelijkt het dragen. De beschermhoes heeft extra klittenbandsluitingen waarmee het kussen indien nodig kan worden vastgezet.

De set bevat: kussen, beschermhoes, handpomp (BUBBLE EVERYDAY en BUBBLE EXCLUSIVE).

2. Toepassing en aanbevelingen

Het pneumatische anti-doorligkussen is een hulpmiddel bedoeld voor patiënten die het risico lopen op doorligwonden. Het wordt gebruikt door personen die gedurende langere tijd in zittende positie verblijven en die lijden aan circulatiestoornissen in het systemische cardiovasculaire systeem. Het wordt ook gebruikt bij de preventieve zorg tegen doorligwonden en bij de behandeling van doorligwonden tot en met de eerste graad (volgens NPUAP/EPUAP).

Vermijd contact met de blote huid. Raadpleeg voor gebruik uw arts, revalidatiespecialist of fysiotherapeut.

3. Opmerkingen en aanbevelingen

Timago International Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

4. Gebruiksaanwijzing

- Vouw het kussen open op een vlakke ondergrond.
- Open het luchtventiel en steek de pomp erin (bij BUBBLE EVERYDAY en BUBBLE EXCLUSIVE) of draai het ventiel linksom – het kussen wordt automatisch opgeblazen (BUBBLE EXPERT).
- Pomp het kussen op tot de gewenste hardheid.
- Plaats de beschermhoes.

Om lucht te laten ontsnappen:

- Bij BUBBLE EVERYDAY en BUBBLE EXCLUSIVE – open het luchtventiel en knijp erin met uw wijsvinger en duim.
- Bij BUBBLE EXPERT – draai het ventiel linksom, ga op het kussen zitten en laat het ventiel open staan.

5. Technische gegevens

Model	BUBBLE EVERYDAY	BUBBLE EXPERT	BUBBLE EXCLUSIVE
Afmetingen	42 x 42 x 4 cm	46 x 38 x 4 cm	41 x 46 x 7 cm
Maximale belasting	120 kg	120 kg	143 kg
Gewicht	0,65 kg	0,65 kg	0,62 kg
Hoes	ademend, ritssluiting	ademend, ritssluiting	ademend, ritssluiting
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart

6. Opmerkingen

- Pomp het kussen uitsluitend op met de meegeleverde pomp (voor BUBBLE EVERYDAY en BUBBLE EXCLUSIVE). Zorg ervoor dat u het luchtventiel niet beschadigt tijdens het oppompen.
- Gebruik geen compressor. Te hoge druk kan het kussen doen scheuren.
- De BUBBLE EXPERT is voorzien van een automatisch ventiel, dus er mogen geen pompen worden gebruikt (het kussen wordt automatisch opgeblazen).
- Overschrijd de maximale belasting van het kussen niet.
- Ga niet op het kussen staan.

- Voer een test uit voordat u het kussen op een lichte meubelstof gebruikt, aangezien er een kans bestaat dat er stempelafdrukken van de antislipbodem van de hoes op de stof achterblijven.
- Bewaar het kussen in een droge ruimte, uit de buurt van vuur en scherpe voorwerpen.
- Stel het kussen niet bloot aan hoge temperaturen en zonlicht, aangezien de temperatuurstijging in het kussen ertoe kan leiden dat het barst.

7. Onderhoud

Reiniging:

- Reinig het kussen met een vochtige doek die is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel. Maak het kussen niet nat. Veeg het na elk onderhoud droog. Sterke reinigingsmiddelen of wasmiddelen kunnen het product beschadigen. Gebruik geen schuurmiddelen.
- **Let op!** Sluit voor het reinigen de pompklep om deze tegen vocht te beschermen.
- **Let op!** Gebruik geen warmtebronnen om het kussen te drogen.
- **Let op!** Gebruik geen bleekmiddelen, wasverzachters en chemische reinigingsmiddelen voor het schoonmaken!

Reiniging van de beschermhoes:

- De beschermhoes kan met de hand of in de wasmachine op 40 °C worden gewassen met milde wasmiddelen. Sluit de rits voor het reinigen. De beschermhoes kan worden gedroogd met een warme luchtstroom of in een droger op lage temperatuur.
- **Let op!** Het kussen mag pas in de beschermhoes worden geplaatst als deze volledig is opgedroogd.
- Strijk de beschermhoes niet!

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)