

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Douche- en toiletrolstoel van aluminium

Productcode: COMPLEX-TIM



### 1. Kenmerken

De douche- en toiletrolstoel is gemaakt van een gepoedercoat aluminium frame. Hij is voorzien van opklapbare armleuningen voor gemakkelijk in- en uitstappen voor mensen met beperkte mobiliteit. Hij is uitgerust met een zitting met wig van PU, voorste zwenkwielen van 5 inch met remmen, achterste vaste wielen van 24 inch en snel te verwijderen, kantelbare en afneembare voetsteunen, veiligheidsriemen, een handgreep voor de begeleider en een sanitaire opvangbak. Door de constructie van de rolstoel kan deze over de toiletbril worden geschoven.

**De set bestaat uit:** rolstoelframe met wielen, zitting met wig, twee bevestigingsknoppen, rechter en linker voetsteun met veiligheidsriemen, toiletbak met deksel.

### Onderdelen van de stoel:



1. Handgreep
2. Rugleuning
3. Vergrendeling voetsteun
4. Zitting met wig
5. Afvalbak
6. Achterwielen 24" met snelsluiting
7. Verstelbare rugleuning
8. Voetensteun met veiligheidsriemen
9. Voorwielen van 5 inch met remmen
10. Handrem


### 2. Toepassing

Douche- en toiletrolstoelen zijn ontworpen voor mensen die moeite hebben met

zelfstandig bewegen en voor patiënten met functiebeperkingen en verminderde mobiliteit. De rolstoel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. De rolstoel fungeert als douche- en toiletstoel dankzij de opvangbak onder de zitting en het vochtbestendige aluminium frame. Dit vergemakkelijkt de dagelijkse hygiëne. De rolstoel wordt met name aanbevolen voor mensen die mobiliteitsproblemen hebben als gevolg van: verlamming, obesitas of abnormaal ondergewicht, degeneraties of misvormingen van ledematen, degeneraties of gewrichtsblessures, ledemaatletsel of amputaties, hart- en vaatziekten en circulatiestoornissen.

### 3. Montage

1. Om te voorkomen dat het frame van de rolstoel tijdens de montage verschuift, zet u de remmen vast door de rode remhendels in te drukken (afbeelding 1).
2. Monteer de achterwielen door ze in de gaten aan de achterkant van het frame te steken.
3. Schuif de parkeerrem op de buis aan de voorkant van het frame en draai deze vervolgens vast met een inbussleutel. Een correct gemonteerde rem moet zich 4 cm van het uiteinde van de buis bevinden (afbeelding 2). Herhaal dit aan de andere kant. Controleer of de rem correct functioneert door aan de parkeerremhendel te trekken.

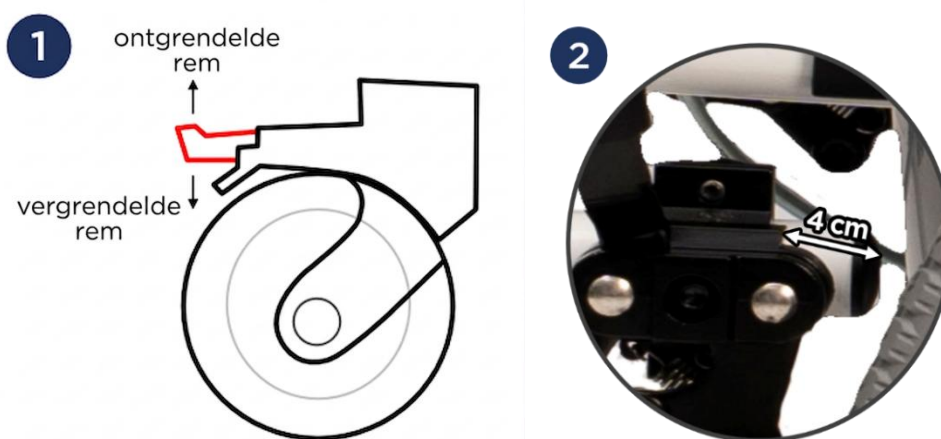

4. Schroef de bevestigingsknoppen van het achterframe los en plaats de rugleuningbuizen in het rolstoelframe. Draai ze vast met de knoppen en laat de armleuningen zakken.
5. Bevestig de zitting op het frame van de stoel door deze in te drukken totdat deze vastklikt (de voorkant van de zitting wordt aangegeven door de wig).
6. Bevestig de toiletcontainer door deze vanaf de achterkant van de zitting erin te schuiven.

7. Plaats de voetsteunen vanaf de zijkant in het hoofdframe en draai ze vervolgens naar voren totdat de vergrendeling van de voetsteun vastklikt. Om de voetsteunen te verwijderen, trekt u de vergrendelingshendel omhoog en draait u de voetsteunen naar buiten.
8. Bevestig de veiligheidsriemen voor de kuiten rond de voetsteunen.

## OMGAAN MET DE ROLSTOEL

- Controleer de staat van de remmen, de constructie en de zwenkwielen. Controleer of de onderdelen correct zijn gemonteerd en afgesteld.
- Zorg er vóór gebruik voor dat de breedte van de rolstoel past bij de gebruiker, aangezien de rolstoel niet is uitgerust met een breedteverstelling.
- De rolstoel is ontworpen voor gebruik over korte afstanden en uitsluitend binnenshuis. De rolstoel heeft geen schokdempers, dus langdurig gebruik wordt afgeraden.

**LET OP!** Gebruik de rolstoel niet als u defecten of gebreken constateert.

## OPKLAPFUNCTIE VAN DE ARMLEUNINGEN

- Til de armleuning met een zachte beweging omhoog.
- Gebruik de armleuning **niet** als steun bij het opstaan. Vraag om hulp als u die nodig heeft.

## REMMEN

- Om de voorwielen te vergrendelen, drukt u met uw voet op de rode pedalen. Om het wiel te ontgrendelen, drukt u met uw voet op de zwarte hendels binnenin de rode pedalen.
- Om het achterwiel te vergrendelen, trekt u de parkeerremhendel naar achteren. Om het wiel te ontgrendelen, trekt u de remhendel in de tegenovergestelde richting.

## VOETSTEUNEN



- De voetsteunen moeten in verticale positie staan bij het in- of uitstappen. **Gebruik de voetsteunen niet als steun bij het in- of uitstappen vanwege het risico op omvallen.**
- De voetsteunen zijn in hoogte verstelbaar. Draai de bevestigingsschroef aan de achterkant van de voetsteunen los (afbeelding 3) om de hoogte aan te passen. Draai deze daarna weer vast.

## IN DE ROLSTOEL STAPPEN

- Het is essentieel om de remmen te vergrendelen tijdens het in- of uitstappen, het veranderen van de zitpositie of het uitstappen.
- Bij het wisselen van plaats moet de stoel zo dicht mogelijk bij de plaats van de transfer staan. De stoel moet het bed of een andere stoel raken. Als de gebruiker niet zelfstandig van stoel kan wisselen, breng de gebruiker dan naar de stoel.
- De gebruiker moet zo diep mogelijk in het midden van de zitting zitten om instabiliteit van de stoel te voorkomen.

## 4. Technische gegevens

Totale breedte	63,5 cm
Binnenbreedte	45 cm
Totale diepte	102 cm
Zithoogte vanaf de grond	53 cm
Totale hoogte	93 cm
Afmetingen zitting	44 x 42 cm
Gewicht	17 kg
Maximale capaciteit	150 kg
Kleur frame	wit

## 5. Opmerkingen

**Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de stoel en het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.**

## 6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de stoel:

- De zitting kan worden gereinigd met een vochtige doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen met een spons worden verwijderd.
- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek en geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof. Volg in dat geval de instructies van de fabrikant en de veiligheidsmaatregelen.
- Leeg en desinfecteer de toiletemmer en de toiletbril na elk gebruik. Gebruik reinigingsmiddelen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

## 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










## 8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

## 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

## 10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

---

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.  
Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft  
gekozen!





**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



05/2026(I)