

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Opvouwbare kruk voor de onderarm

Productcode: CompactTim



1. Kenmerken

De opvouwbare onderarmkruk bestaat uit een comfortabele, duurzame handgreep en een aluminium schacht met een hoogwaardige rubberen dop. Dankzij de lengteverstelling en de opvouwfunctie is hij zeer geschikt voor dagelijks gebruik. De kruk heeft een ergonomische vorm van de manchet en een goed aangepaste ellebooghoek, wat zorgt voor een optimale verdeling van de druk op de handgreep.

Onderdelen van de kruk:

- A. manchet
- B. handgreep
- C. inklapplaats
- D. lengteverstelling
(vergrendelingspen)
- E. vergrendeling
- F. rubberen uiteinde



2. Toepassing

De onderarmkruk is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het steunvlak te vergroten bij patiënten met verminderde mobiliteit. Het wordt ook aanbevolen aan patiënten die hulp en ondersteuning nodig hebben tijdens het lopen en het kan ook worden gebruikt voor looprevalidatie als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren na letsel aan de onderste ledematen of de romp.

Contra-indicaties: coördinatie- en evenwichtsstoornissen, vergevorderde reumatische veranderingen, letsels en functiestoornissen van de bovenste ledematen die de gebruiker kunnen beletten zich op de kruk te steunen.

3. Montage en afstelling

- Om het transport te vergemakkelijken, is de kruk opvouwbaar. Voordat de lengte wordt aangepast, moet de kruk worden uitgeklappt door de twee delen van de schacht over elkaar te schuiven.
- Om de lengte van de kruk aan te passen, draait u de verstelvergrendeling los.
- Stel de kruk af, druk op de vergrendelingspen en kies de juiste positie van de binnenste buis. Vergrendel de positie van de buizen ten opzichte van elkaar met behulp van de vergrendelingspen. De kruk is in stappen van 2,5 cm verstelbaar.
- Zodra de lengte is aangepast, draait u de vergrendeling van de kruk vast.
- Om de juiste lengte van de kruk in te stellen, gaat u rechtop staan en buigt u de bovenarm in het ellebooggewricht in een hoek van 20°.
- De kruk moet individueel aan de gebruiker worden aangepast, zodat de handgreep zich ter hoogte van het heupgewricht bevindt en de manchet ter hoogte van het bovenste deel van de onderarm.
- Controleer voor gebruik of de kruk stabiel staat en of de borgpen volledig door het verstelgat van de kruk steekt.
- Het wordt aanbevolen om twee krukken tegelijk te gebruiken.

LET OP! Raadpleeg bij twijfel over de techniek van het lopen met krukken iemand met de juiste kennis en kwalificaties.

4. Technische gegevens

Type	Opvouwbaar
Hoogteverstelling	94-116 cm
Hoogte handgreep vanaf de grond	70-92 cm
Max. draagvermogen	136 kg
Gewicht kruk	0,6 kg
Kleur	zwart

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Reiniging en onderhoud

- Reinig de kruk uitsluitend met water en milde reinigingsmiddelen, en veeg hem na elk gebruik droog.
- **Gebruik geen:** sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Het wordt aanbevolen om de rubberen dop regelmatig te controleren. Vervang een versleten dop onmiddellijk.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)