

GEBRUIKSAANWIJZING

Looprek met 4 wielen, remmen en zitje


Productcode: DEFENDER



1. Kenmerken

De 4-wielige rollator is gemaakt van een kruislings versterkt aluminium frame. De rollator is uitgerust met een zitje, rugleuning, remmen met parkeerfunctie, 8" zwenkwielen aan de voorkant met vergrendelingssysteem en 8" wielen aan de achterkant. Stevige handgrepen zorgen voor goede stabiliteit en gebruikscomfort. De hoogte van de rollator kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. In opgevouwen toestand neemt de rollator weinig ruimte in, waardoor hij gemakkelijk kan worden opgeborgen en vervoerd.

Onderdelen van de rollator:

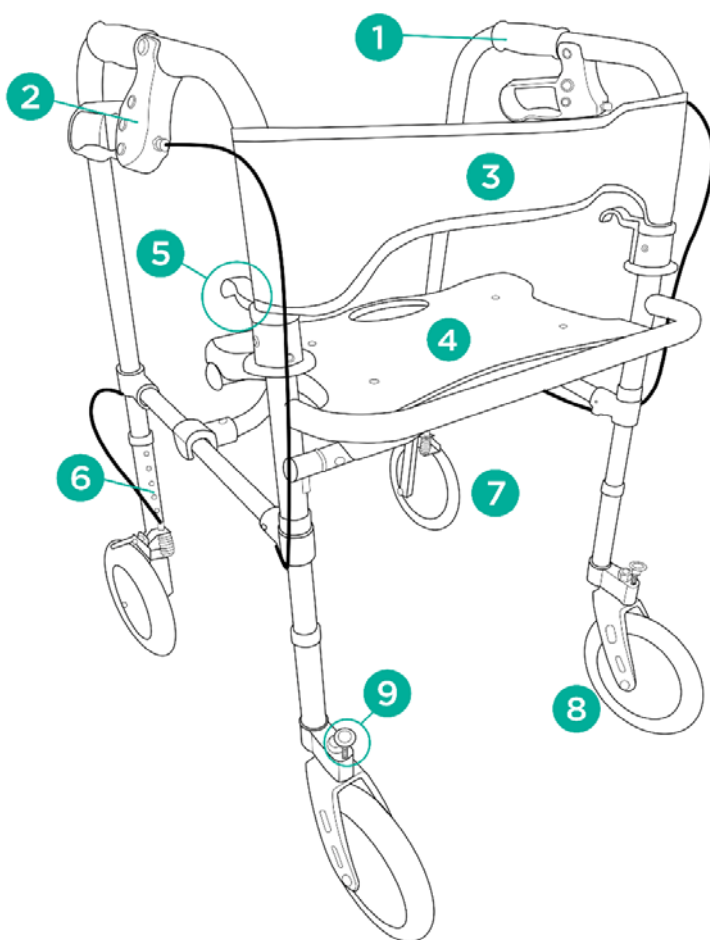

1. Handgreep
2. Rem met parkeerfunctie
3. Rugleuning
4. Zitting
5. Inklapmechanisme
6. Hoogteverstelling
7. Achterwiel 8"
8. Zwenkwiel voor 8"
9. Vergrendelingshendel zwenkwiel

2. Toepassing

De vierwielige rollator is een hulpmiddel dat is ontworpen voor mensen met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben tijdens het lopen. Het wordt ook aanbevolen voor ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te verbeteren en de veiligheid te waarborgen tegen

vallen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit bij mensen met aandoeningen aan de onderste ledematen en met problemen bij het lopen of rechtop staan.

3. Montage

UITKLAPPEN EN INKLAPPEN

- Om de rollator uit te klappen, trekt u de zijkanten uit elkaar tot de maximale positie totdat de handgrepen vergrendeld zijn (kenmerkend "klik"-geluid).
- Om de rollator in te klappen, trekt u de hendels van het opklapsysteem aan de zijkanten omhoog en klapt u deze naar binnen.

HOOGTEVERSTELLING

- De hoogte moet zo worden ingesteld dat de gebruiker, die tegen de handgrepen leunt, rechtop staat met de schouders in rustpositie en de ellebogen licht gebogen. Het is af te raden om met het volledige lichaamsgewicht aan de rollator te hangen.
- Om de hoogte van de poten aan te passen, drukt u op de metalen pin, selecteert u de gewenste hoogte en vergrendelt u de positie van alle vier de poten. De poten zijn in stappen van 2,5 cm verstelbaar.

LET OP! De pinnen moeten in elke poot op hetzelfde niveau worden ingesteld.

REMMING

- Om de rollator tot stilstand te brengen, trekt u de remhendel omhoog en houdt u deze vast.
- Wanneer u niet in beweging bent of de zitting gebruikt, vergrendelt u de parkeerrem door de remhendel naar beneden te trekken.
- Om de parkeerrem los te maken, trekt u de hendel omhoog.

ZITFUNCTIE


- De rollator is uitgerust met een 48 cm breed zitje waarop de gebruiker kan uitrusten.
- Om de zitting omhoog te zetten, pakt u de handgreep van de zitting vast en trekt u deze omhoog.

VERGRENDING VAN DE ZWENKWIELEN

- De voorste zwenkwieken kunnen in een rechte, voorwaartse positie worden vergrendeld.

- Om het wiel te vergrendelen, trekt u de vergrendelingshendels omhoog en draait u ze zijwaarts (zie afbeelding hieronder) en laat u de hendels daarna los. Zorg ervoor dat beide wielen in een rechte positie staan. U hoort een "klik"-geluid. Herhaal dit bij het tweede wiel.
- Om de zwenkwielen te ontgrendelen, trekt u de hendels omhoog en draait u ze terug naar de vorige positie.

LET OP! Controleer voordat u de rollator gebruikt of beide wielen ontgrendeld of vergrendeld zijn.

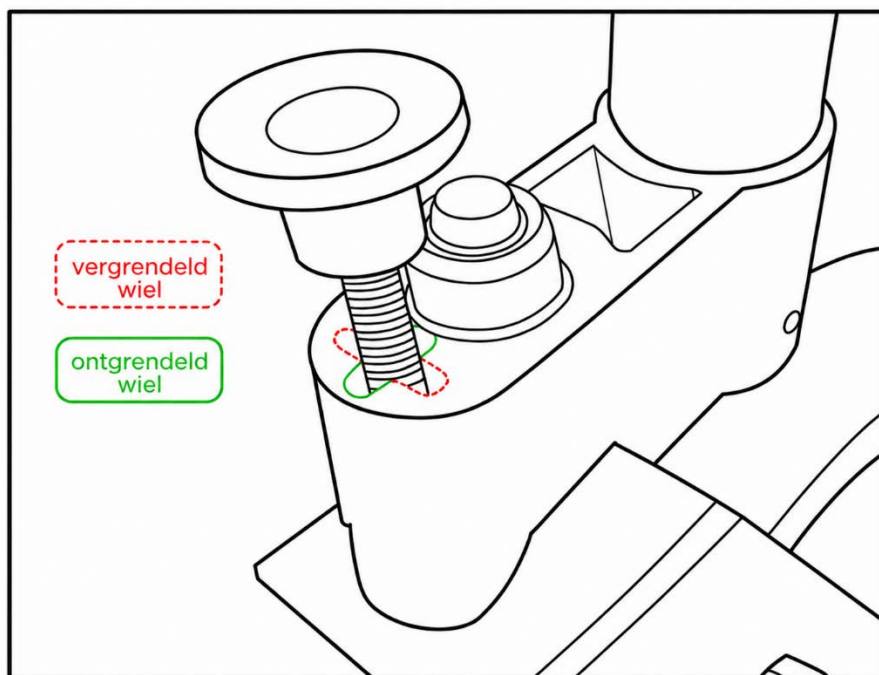

4. Technische gegevens

Totale breedte	67 cm
Binnenbreedte	49 cm
Totale diepte	64 cm
Afmetingen zitting	48 x 29 cm
Hoogteverstelling	90-101 cm
Gewicht	7,80 kg
Max. draagvermogen	136 kg

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de rollator, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig het frame van de rollator uitsluitend met een vochtige doek met water en een mild reinigingsmiddel. Droog het grondig af.
- Gebruik voor het reinigen geen: sterke polijst- en schuurmiddelen, sterke reinigingsmiddelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Verwijder regelmatig vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klemschroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)