

1. Inleiding

Controleer voordat u het product in gebruik neemt of het apparaat geen transportschade vertoont. Neem bij eventuele schade contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Het is vervolgens belangrijk dat u de inhoud van deze handleiding doorneemt, die relevante informatie voor de gebruiker bevat. Neem bij vragen over het gebruik van het apparaat contact met ons op. Onze medewerkers zullen u voortdurend voorzien van de benodigde informatie. Wij willen er tegelijkertijd op wijzen dat als u vragen heeft die geen verband houden met het gebruik van het product, u contact moet opnemen met uw arts, verpleegkundige of fysiotherapeut.

2. Ontwerp

Een draagbaar, opblaasbaar wasbakje van PVC voor het wassen van het haar, voorzien van een afvoeropening, is zacht en comfortabel in gebruik. Dubbele luchtkamers bieden bescherming tegen het morsen van water en zeep.


De set bevat: -bak, waterreservoir, douche, afvoerslang, pomp, reservoirbeugel

3. Toepassing van de ' '


Met de haarwasset kan het hoofd van de patiënt in buikligging worden gewassen. Het wordt met name aanbevolen voor gebruik binnenshuis bij de verzorging van bedlegerige en oudere mensen die moeite hebben met het kantelen van hun hoofd en het vooroverbuigen.

4. Gebruiksaanwijzing


1. Blaas eerst de wasbak op met de pomp en sluit de afvoerkraan aan de onderkant van de wasbak. De wasbak kan worden gevuld met warm water met een temperatuur van minder dan 50 °C.

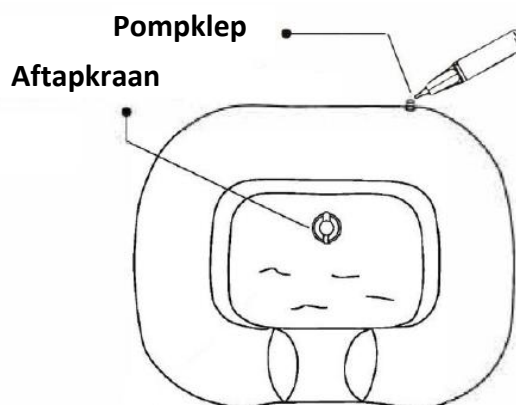


2. Sluit het waterreservoir aan op de douche.

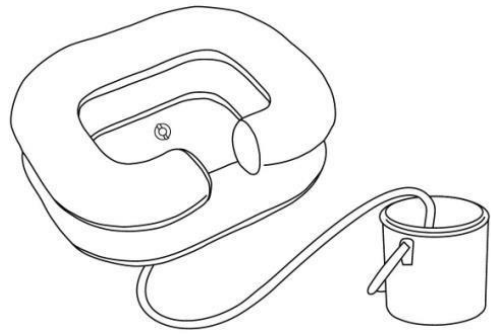

3. Vul het reservoir met warm water met een temperatuur van maximaal 50 °C. Het reservoir kan met behulp van de reservoirbeugel aan een standaard of aan de muur worden opgehangen.

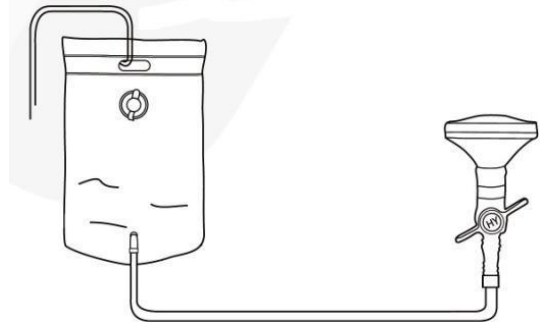


4. Zet een emmer klaar en plaats de afvoerslang erin. Controleer of de slang niet geknikt is, zodat het water goed kan wegstromen.

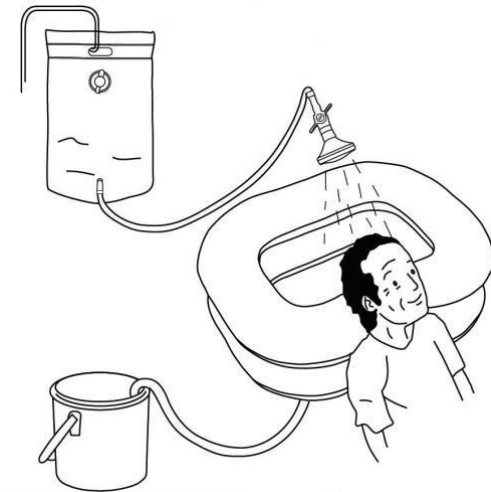

5. Plaats het hoofd van de patiënt in de nekuitsparing en draai de douchekraan open om de waterstroom te regelen.

6. Open na het wassen van het hoofd van de patiënt de afvoerkraan, zodat het water via de afvoerslang naar de emmer kan stromen.

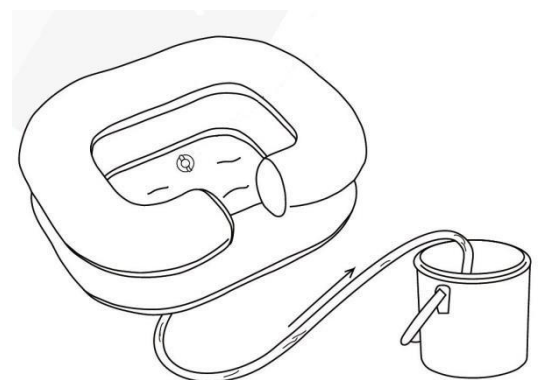

5. Technische gegevens

Afmetingen wastafel	65 x 50 x 25 cm
---------------------	-----------------

Gewicht	0,8 kg
Inhoud	10 liter
Inhoud waterreservoir	8 liter

6. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de wasbak, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

7. Onderhoud en waarschuwingen

- Reinig alle onderdelen van de set na gebruik en laat ze drogen.
- Bewaar de set niet bij hoge temperaturen of in een vochtige omgeving.
- Stel de set niet bloot aan direct contact met scherpe voorwerpen.
- Stel de watertemperatuur zo in dat brandwonden worden voorkomen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of etherische oliën.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

REF	Referentienummer		Fabrikant
LOT	LOT-nummer	UDI	UDI code

	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com

