

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Verstelbare aluminium wandelstok


Productcode: ELEGANT



1. Kenmerken

De aluminium wandelstok heeft een geprofileerde handgreep en kan dankzij de getrapte lengteverstelling in een groot bereik worden aangepast. De schacht is afgewerkt met een zachte rubberen dop.

- A. handgreep
- B. polsband
- C. hoogteverstelling – vergrendelingspen
- D. rubberen dop

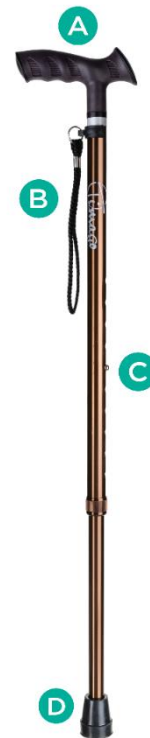

2. Toepassing

De verstelbare wandelstok is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het steunvlak te vergroten bij patiënten met verminderde mobiliteit. De wandelstok wordt aanbevolen aan patiënten die hulp en ondersteuning nodig hebben tijdens het lopen en kan ook worden gebruikt als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren na letsel aan de onderste ledematen of de romp.

Contra-indicaties: coördinatie- en evenwichtsstoornissen, vergevorderde reumatische veranderingen, letsels en functiestoornissen van de bovenste ledematen die de gebruiker kunnen belemmeren om zich op de wandelstok te steunen.

3. Instelling

Om de wandelstok in te stellen, drukt u op de metalen pin en kiest u de juiste positie van de binnenste buis. Vergrendel de positie van de buizen ten opzichte van elkaar met behulp van de metalen pin. De wandelstok is verstelbaar in stappen van 2,5 cm binnen het bereik van 70-93 cm.

- Om de juiste lengte van de wandelstok in te stellen, gaat u rechtop staan en buigt u de bovenarm in het ellebooggewricht in een hoek van 20°.
- De wandelstok moet individueel aan de gebruiker worden aangepast, zodat de handgreep zich ter hoogte van het heupgewricht bevindt.
- Controleer voor gebruik of de wandelstok stabiel staat en of de vergrendelingspen volledig door het verstelgat van de wandelstok steekt.

LET OP! Raadpleeg bij twijfel over de techniek van het lopen met de wandelstok iemand met de juiste kennis of kwalificaties.

4. Technische gegevens

Type	verstelbaar
Hoogteverstelling	70-93 cm
Max. draagvermogen	136 kg
Gewicht	0,38 kg
Kleuren	zilver/blauw, bruin

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de wandelstok, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud en reiniging

- Reinig de wandelstok uitsluitend met water en milde reinigingsmiddelen.

- **Gebruik geen:** sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantieaanspraken veroorzaken).
- Het wordt aanbevolen om de rubberen dop regelmatig te controleren. Vervang een versleten dop onmiddellijk.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

REF	Referentienummer		Fabrikant
LOT	LOT-nummer	UDI	UDI code
SN	Serienummer	MD	Medisch hulpmiddel

	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)