

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aluminium rolstoel

Productcode: ELITE-TIM



1. Kenmerken

De rolstoel is gemaakt van een lichtgewicht aluminium frame. Hij is voorzien van opklapbare, verstelbare armleuningen en afneembare bekleding van ademend gaasmateriaal. De rolstoel is uitgerust met een snelontgrendelingsfunctie, zwaartepuntverstelling (voor en achter), begeleidersremmen en een opklapbare rugleuning. Hij heeft beschermriemen voor de kuiten, kantelbeveiligingswielen, stevige 24-inch achterwielen en 8-inch zwenkwielen aan de voorkant.

De set bestaat uit: rolstoelframe met wielen, bekleding met tas, voetsteunen met beschermriemen, set sleutels voor montage/demontage, kantelbeveiligde wielen.

Onderdelen van de rolstoel:

1. Handgreep
2. Begeleidersremmen
3. Inklapmechanisme rugleuning
4. Hoogteverstelbare armleuning
5. Knop voor het omhoogklappen van de armleuning
6. Handgreep
7. Dubbele dwarsbalk
8. Voorwiel van 20 cm met verstelbaar zwaartepunt
9. Achterwiel van 24 inch met instelbaar zwaartepunt, snelontgrendelingsmechanisme en handring
10. Veiligheidsriem
11. Voetensteun
12. Vergrendeling voor wegklapbare voetsteun
13. Zitting*
14. Rugleuning met tas
15. Anti-kantelwiel



2. Toepassing

De rolstoel is ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig verplaatsen en voor patiënten met functiebeperkingen en verminderde

mobiliteit. Deze zelf e rolstoel kan ook door een begeleider worden voortgeduwd. De rolstoel is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

3. Montage

Stap 1. De rolstoel uitklappen

Zet de rolstoel op de grond. Klap de rolstoel uit met behulp van de armleuningen. Druk vervolgens op de zijkanten van de zitting zodat alle onderdelen in elkaar klikken.

Stap 2. Rugleuning en zitting

Til de rugleuning omhoog en vergrendel deze met de rugleuningvergrendelingen die zich onder de handgrepen bevinden (3). Bevestig de bekleding met de tas op de rolstoel.

Stap 3. Voetensteunen

Bevestig de voetsteun aan de buitenkant van het frame. Draai de voetsteun vervolgens naar binnen totdat deze vergrendeld is.

Stap 4. Armleuningen

De armleuningen zijn kantelbaar. Om de armleuning omhoog te zetten, drukt u op de knop op het frame (5) van de rolstoel.

Stap 5. Hoogteverstelling van de voetsteunen en armleuningen

- Stel de voetsteunen af met behulp van de montagesleutels. Om ze af te stellen, draait u de schroef op het frame van de voetsteun los. Er moet voldoende ruimte overblijven tussen de voetplaten en de grond, aangezien te laag geplaatste voetplaten problemen kunnen veroorzaken bij het beklimmen van hellingen en stoepranden. Stel de voetplaten zo af dat de hoek tussen de romp en de dijen^{90°} is (optimale zitpositie voor de gebruiker).
- Om de armleuningen te verstellen, trekt u aan de verstelklem en kiest u de gewenste hoogte. Beide armleuningen moeten op dezelfde hoogte staan.

Stap 6. Montage van de veiligheidsriemen

Bevestig de veiligheidsriemen aan de voetsteunen om te voorkomen dat de benen van de gebruiker van de voetplaten afglijden.

OPVOUWEN

De rolstoel kan worden ingeklapt om het transport en de opslag te vergemakkelijken.

- Zwaai de voetsteunen weg en zet ze in verticale positie of verwijder ze. Maak de bekleding van de zitting en rugleuning los met de tas. Til de zitting omhoog door deze aan de achter- en voorkant vast te pakken totdat het frame van de rolstoel is ingeklapt.

INKLAPFUNCTIE RUGLEUNING

- Om de rugleuning neer te klappen, drukt u tegelijkertijd op de vergrendelingsknoppen die zich onder de handgrepen aan de achterkant van de rugleuning bevinden en trekt u de rugleuning naar beneden.

PARKEERREM

Om de wielen te vergrendelen, duwt u de hendel naar voren totdat het wiel volledig is geblokkeerd (afzonderlijk voor het linker- en rechterwiel). Houd er rekening mee dat de parkeerrem alleen dient om de wielen te vergrendelen wanneer de rolstoel volledig tot stilstand is gekomen.

BEGELEIDERSREMMEN

De hendels van de remmen bevinden zich achter de rugleuning, onder beide handgrepen.

- Om de rolstoel tot stilstand te brengen, knijpt u in de hendel van de remgreep. Om de rem los te laten, laat u de hendels los. Voer deze handeling soepel en met de juiste kracht uit.
- De remmen zijn voorzien van parkeerremmen. Om deze te gebruiken, drukt u de bovenste hendel van de remhendel in tot u een 'klik'-geluid hoort. Om de parkeerremmen los te maken, drukt u de onderste hendel van de remhendel in.

AFSTELLING VAN DE PARKEERREM

De juiste vergrendeling van de parkeerrem hangt af van de afstelling en de positie ervan. De hendel van de wielvergrendeling moet zo worden geplaatst dat de remschoen het wiel stevig blokkeert en de hendel geen overmatige weerstand ondervindt.

- In geval van overmatige weerstand trekt u de hendel iets naar voren door de borgschroeven op de parkeerrem los te draaien. Stel de remschoen zo af dat deze het wiel gemakkelijk blokkeert zonder overmatige weerstand.
- Wanneer de parkeerremschoen het wiel niet voldoende raakt of blokkeert, volg dan de bovenstaande instructie door de hendel in de tegenovergestelde richting te bewegen.

4. VOOR GEBRUIK

Stap 1. De toestand van de rolstoel controleren

Controleer de staat van de remmen, de constructie en de banden. Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en afgesteld.

Let op! Gebruik de rolstoel niet als u defecten constateert.

Stap 2. Parkeerremmen gebruiken

Zet de wielen vast wanneer u in of uit de rolstoel stapt.

Stap 3. Voetplaten

De voetsteunen moeten in verticale positie staan wanneer u in of uit de rolstoel stapt. Gebruik de voetsteunen niet als steun bij het in- of uitstappen, vanwege het risico op vallen. Klap de voetsteunen uit nadat u in de rolstoel bent gestapt.

Let op! Ga niet op de voetsteunen staan, omdat deze hierdoor beschadigd kunnen raken.

Stap 4. In de rolstoel gaan zitten

De rolstoel moet zo dicht mogelijk bij de patiënt staan. De rolstoel moet het bed of de andere stoel raken. Als de gebruiker niet zelfstandig van stoel kan wisselen, breng de gebruiker dan naar de rolstoel.

Stap 5. Positie van de gebruiker

De gebruiker moet rechtop zitten en de knieën moeten in een hoek van 90° gebogen zijn.

De rolstoel is klaar voor gebruik.

5. Technische gegevens

Afmetingen zitting	44 / 46 / 49 x 43 cm
Totale breedte	61 / 63 / 66 cm
Totale diepte	110 cm
Zithoogte vanaf de grond	49 cm
Hoogte armleuning vanaf de zitting	23-29 cm
Totale hoogte	95 cm
Gewicht	11,60 kg
Maximale capaciteit	120 kg
Breedte ingeklapt	83 x 26 x 77 cm

6. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de rolstoel, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

7. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De bekleding en het kussen kunnen worden gereinigd met een vochtige (niet natte) doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een spons. Maak de bekleding niet te nat. Laat drogen uit de buurt van warmtebronnen.
- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek, eventueel met behulp van geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof onderdelen. Volg in dat geval de veiligheidsmaatregelen en instructies van de fabrikant.










8. Opslag- en transportvoorwaarden

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

9. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder een garantie, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht. Houd er rekening mee dat u voor garantiedoeleinden het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet bewaren.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	Partijnummer		Productiedatum
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	De fabrikant heeft gecontroleerd of aan de essentiële eisen voor medische hulpmiddelen is voldaan.		

Ons volledige productassortiment is verkrijgbaar bij onze distributeurs. Meer informatie vindt u op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago hebt gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)