



FRODO

ALUMINIUM KØRESTOL

BRUGSANVISNING

KØRESTOLENS ELEMENTER



1. Håndgreb
2. Ledsagerbremse
3. Justeringsknap til håndtag
4. Klemme til sammenklapning af ryglæn
5. Justerbart ryglæn
6. Sæde* med sikkerhedssele
7. Parkeringsbremse
8. Fodstøttehåndtag
9. Beskyttelsesstrop til lægge
10. Fodplade

11. 8" drejeligt, massivt forhjul med justering af tyngdepunkt
12. Fodstøtte længdejustering
13. Ryglænslomme til genstande
14. Justerbart armlæn
15. 24" massivt baghjul med drivring
16. Knap til quick release-funktion
17. Justering af tyngdepunkt (alle retninger)
18. Anti-tip-hjul med længdejustering

* fås i størrelse 44, 46 og 49 cm

1. Egenskaber

Kørestolen er fremstillet af en let aluminiumsramme, der har flere justeringsmuligheder for at matche brugerens specifikke behov:

- a) kompleks justering af tyngdepunktet på baghjulene, der muliggør justering i enhver retning (op/ned/frem/tilbage).
- b) standard justering af tyngdepunkt/justering af hjulvinkel på forhjulene og quick release-funktion på baghjulene.
- c) Højdejustering af håndtag/armlæn/ryglæn og længdejustering af anti-tip-hjul/fodstøtter.

Den er udstyret med parkeringsbremses, ledsagerbremses, sikkerhedssele, funktion til sammenklapning af ryglæn og hjul: baghjul 24" (massive), forhjul 8" (massive, drejelige). Derudover leveres kørestolen i et sæt med åndbar meshpolstring (med lomme på ryglænet), aftagelige armlæn med højdejustering, anti-tip-hjul og fodstøtte med beskyttelsesstropper til lægge.

Sættet indeholder: kørestolsramme med hjul, polstring med lomme til genstande, fodstøtter med beskyttelsesstropper, anti-tip-hjul, armlæn, sæt nøgler til montering/afmontering.

2. Anvendelse

Kørestolen er beregnet til personer, der har problemer med at bevæge sig uden hjælp, og til patienter med dysfunktioner og nedsat mobilitet. Denne selvkørende kørestol kan også skubbes af en ledsagende person. Takket være muligheden for at justere indstillingerne efter brugerens individuelle behov giver kørestolen bedre kontrol, større stabilitet og en mere dynamisk, aktiv kørsel på daglig basis. Kørestolen er egnet til indendørs og udendørs brug.

3. Montering

Trin 1. Udklapning af kørestolen

Placer kørestolen på jorden. Klap kørestolen ud ved armlænene. Tryk derefter på sædets sider, så alle elementer passer sammen.

Trin 2. Ryglæn og sæde

Løft ryglænet opad og lås det med ryglænsklemmer [4], som er placeret under håndtagene. Fastgør polstringen med lomme på kørestolens sæde og ryglæn.

Trin 3. Fodstøtter

Fastgør fodstøtten på rammens yderside. Drej derefter fodstøtten indad (tryk samtidig på fodstøttehåndtaget), indtil den er låst.

Trin 4. Armlæn

Armlænene kan fjernes eller højdejusteres. For at hæve/sænke armlænet skal du trykke på knappen placeret på rammen under armlænet.

Trin 5. Højdejustering af fodstøtter og håndtag.

- Juster fodstøtterne ved hjælp af sættet med monteringsnøgler. For at justere skal skruen [12], der er placeret på fodstøtterammen, skrues løs. Der skal være tilstrækkelig plads mellem fodpladerne og jorden, da fodplader, der er indstillet for lavt, kan medføre vanskeligheder ved kørsel op ad bakker og kantsten. Juster fodpladerne, så vinklen mellem overkrop og lår er 90° (optimal siddestilling for brugeren).
- Håndtagets højde kan justeres efter den ledsagende persons behov. For at justere højden skal monteringsknappen [3], der er placeret under ledsagerbremsene [2], skrues løs. Vælg den ønskede højde og spænd knappen. Sørg for, at begge håndtag er i samme højde.

SAMMENKLAPNING OG FUNKTION TIL SAMMENKLAPNING AF RYGLÆN

- Sving fodpladerne væk og sæt dem i lodret position eller fjern dem. Løft sædet opad ved at gribe fat i stofhåndtaget på sædet. Tryk kørestolen indad fra begge sider for at sikre korrekt sammenklapning. Afmonter sæde- og ryglænsbolstringen med taske om nødvendigt.
- For at klappe ryglænet sammen skal du samtidig trykke på låseelementerne, der er placeret under håndgrebene på bagsiden af ryglænet, og trække ryglænet nedad.

HØJDEJUSTERING AF RYGLÆN OG HÅNDTAG

Bemærk! Ryglænet kan kun justeres efter hævnings/sænkning af håndtagets højde.

Ryglænet kan justeres efter brugerens behov. For at justere ryglænet skal bolstringen først fjernes. Løsn derefter den øverste velcro på bagsiden af kørestolen og flyt ryglænet højere op. Fastgør derefter velcroen og monter bolstringen igen.

PARKERINGSBREMSE

For at låse hjulene skal håndtaget skubbes fremad, indtil hjulet er fuldt blokeret (separat for venstre og højre hjul). Bemærk venligst, at parkeringsbremsen kun tjener til at låse hjulene, når kørestolen står helt stille.

LEDSAGERBREMSE

Bremsehåndtagene er placeret bag ryglænet, under begge greb.

- For at stoppe kørestolen skal du klemme bremsehåndtagets håndtag. For at frigøre bremsen skal du slippe håndtagene. Udfør denne handling jævnt og med passende kraft.
- Bremsene er udstyret med parkeringslåse. For at bruge dem skal du klemme det øverste håndtag på bremsehåndtaget, indtil du hører en „click“-lyd. For at frigøre parkeringsbremsene skal du klemme det nederste håndtag på bremsehåndtaget.

JUSTERING AF PARKERINGSBREMSE

Den korrekte låsning af parkeringsbremsen afhænger af dens justering og position. Håndtaget til hjullåsen skal placeres, så bremseskoen blokerer hjulet fast, og håndtaget ikke møder for stor modstand.

- I tilfælde af for stor modstand skal du trække håndtaget lidt fremad ved at skrue låseskruerne, der er placeret på parkeringsbremsen, løs. Indstil bremseskoen i en sådan position, at den let blokerer hjulet uden for stor modstand.
- Når parkeringsbremsens bremsesko ikke berører eller låser hjulet tilstrækkeligt, skal du følge ovenstående instruktion ved at flytte håndtaget i den modsatte retning.

JUSTERING AF TYNGDEPUNKT PÅ FOR-/BAGHJUL

(JUSTERING TIL PATIENT EFTER AMPUTATION I OMRÅDET VED UNDEREKSTREMITETERNE)

Bemærk! For professionel justering skal du spørge din forhandler eller en anden person, der har passende viden og kvalifikationer. Juster ikke sædets hældningsvinkel selv.


- For at justere tyngdepunktet på forhjulene skal boltene i højre og venstre hjul skrues løs med monteringsnøglerne, der følger med kørestolssættet (billede 3). Indstil derefter sædets hældning ved at flytte hjulets fastgørelsesakse nedad eller opad (det samme på begge hjul).
- For at justere tyngdepunktet på baghjulene skal boltene i højre og venstre hjul skrues løs med monteringsnøglerne, der følger med kørestolssættet (billede 1 og 2). Indstil derefter sædets hældning ved at flytte hjulets fastgørelsesakse frem, tilbage, nedad eller opad (afhængigt af patientens behov, det samme i begge hjul).



VINKELJUSTERING PÅ FORHJULENE

Bemærk! For professionel justering skal du spørge din forhandler eller en anden person, der har passende viden og kvalifikationer. Juster ikke kørestolens forhjulsvinkel selv.

- For at justere forhjulenes vinkel skal boltene, der er placeret på indersiden af kørestolen (billede 4), skrues løs ved hjælp af monteringsnøgler. Tag hættten og skiven ud. Tag let fat i forhjulet og skub bolten fra indersiden fremad. Tag fat i bolthætten på ydersiden af kørestolen og drej til venstre/højre, så den nye vinkel indstilles efter brugerens behov (billede 5). Sæt skiven og hættten på igen, og spænd den med en monteringsnøgle.

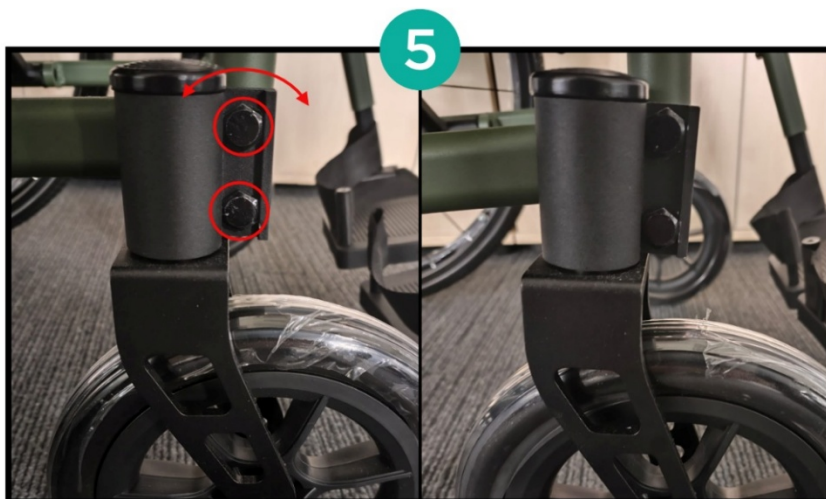

4. Før brug

Trin 1. Kontrol af kørestolens tilstand

Kontroller bremsernes, konstruktionens og dækkenes tilstand. Kontroller, om alle komponenter er samlet og justeret korrekt.

Bemærk! Brug ikke kørestolen, hvis der opdages nogen defekter.

Trin 2. Brug af parkeringsbremsen

Lås hjulene, når du sætter dig i eller stiger ud af kørestolen.

Trin 3. Fodplader

Fodpladerne skal være indstillet i lodret position, når du sætter dig i eller stiger ud af kørestolen. Brug ikke fodpladerne som støtte, når du sætter dig i eller stiger ud af kørestolen, på grund af risikoen for at falde. Efter overflytning til kørestolen skal fodpladerne klappes ud.

Bemærk! Stå ikke på fodpladerne på grund af risikoen for beskadigelse.

Trin 4. At sætte sig i kørestolen

Kørestolen skal placeres så tæt på patienten som muligt. Kørestolen skal røre sengen eller et andet sæde, der anvendes. Hvis brugeren ikke selv kan skifte sæde, skal brugeren overflyttes til kørestolen.

Trin 5. Brugerens position

Brugeren skal sidde i oprejst position, og knæene skal være bøjet i en vinkel på 90°.

Kørestolen er klar til brug.

5. Tekniske data

Sædebredde: 44/46/49 cm	Sædedybde: 43-48 cm
Samlet dybde: 105 cm	Ryglænsenhøjde fra sædet: 43-53 cm
Samlet bredde: 62/64/67 cm	Armlænsenhøjde: 18,6-27 cm
Sædehøjde fra jorden: foran: 48-50 cm bagpå: 41,5-49 cm	Sammenklappede mål: 44/46 cm – 75 x 29 x 73,5 cm 49 cm – 75 x 29 x 76 cm
Samlet højde: 93,5-103,5 cm	Vægt: 11,30-11,50 kg
Maksimal belastning: 125 kg	

6. Bemærkninger

Timago International Group påtager sig intet ansvar for forkert brug af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsregler og misbrug.

7. Rengøring og vedligeholdelse

Udfør vedligeholdelse af kørestolens komponenter regelmæssigt:

- Polstringen og puden kan rengøres med en fugtig (ikke våd) klud og koldt eller varmt vand, uden brug af rengøringsmidler. Vanskelige pletter kan rengøres med en svamp. Gennemblød ikke polstringen for meget. Tør væk fra varmekilder.
- Plastdele skal rengøres med en fugtig klud, eventuelt med brug af passende rengøringsmidler til plastdele. I sådanne tilfælde skal sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne fra producenten følges.

8. Opbevarings- og transportforhold

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

9. Garantioplysninger

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er omfattet af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantikortet, der er tilgængeligt på vores hjemmeside. Kontakt venligst den forhandler, hvor du købte produktet. Husk venligst, at dokumentation for køb (kvittering eller faktura) skal opbevares til garantiformål.

10. Hændelser med medicinsk udstyr

Enhver alvorlig hændelse, der involverer medicinsk udstyr, skal rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor brugeren eller patienten er bosat.

11. Mærkninger

	Referencenummer		Producent
	LOT-nummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Produktet opfylder Den Europæiske Unions lovkrav for medicinsk udstyr (MDR 2017/745)		

Hele vores produktlinje er tilgængelig hos vores distributører. Læs mere på:
www.timago.com. Tak, fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



06/2026 (I)