

GEBRUIKSAANWIJZING

Rollator met 4 wielen

Productcode: FUTURO



1. Kenmerken

De vierwielige rollator is gemaakt van koolstofvezel met een metallic laklaag. Hij heeft grote wielen met een diameter van 20 cm, in hoogte verstelbare handgrepen met anatomische handvatten, remmen met parkeerrem, een zitje met rugleuning en een handige tas. De constructie is gebaseerd op een kruisframe en buizen met een ovale doorsnede, waardoor de weerstand tegen axiale druk aanzienlijk is verhoogd.

De set bestaat uit: frame met zitje, voor- en achterwielen, rugleuning, boodschappentas.

Onderdelen van de rollator:



1. Handgrip
2. Parkeerrem
3. Zitting
4. Rugleuning
5. Tas
6. Vouwvergrendeling met elastische band
7. Verstelbare handgrepen
8. Remkabel
9. Voor- en achterwielen van 20 cm


2. Toepassing

De rollator is ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben tijdens het lopen. Hij wordt ook aanbevolen voor ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te verbeteren en de veiligheid te waarborgen tegen vallen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit van mensen met

problemen bij het lopen en het rechtop staan. Hij garandeert betere stabilisatie, ondersteuning en veiligheid tijdens het lopen.

3. Montage

Uitklappen

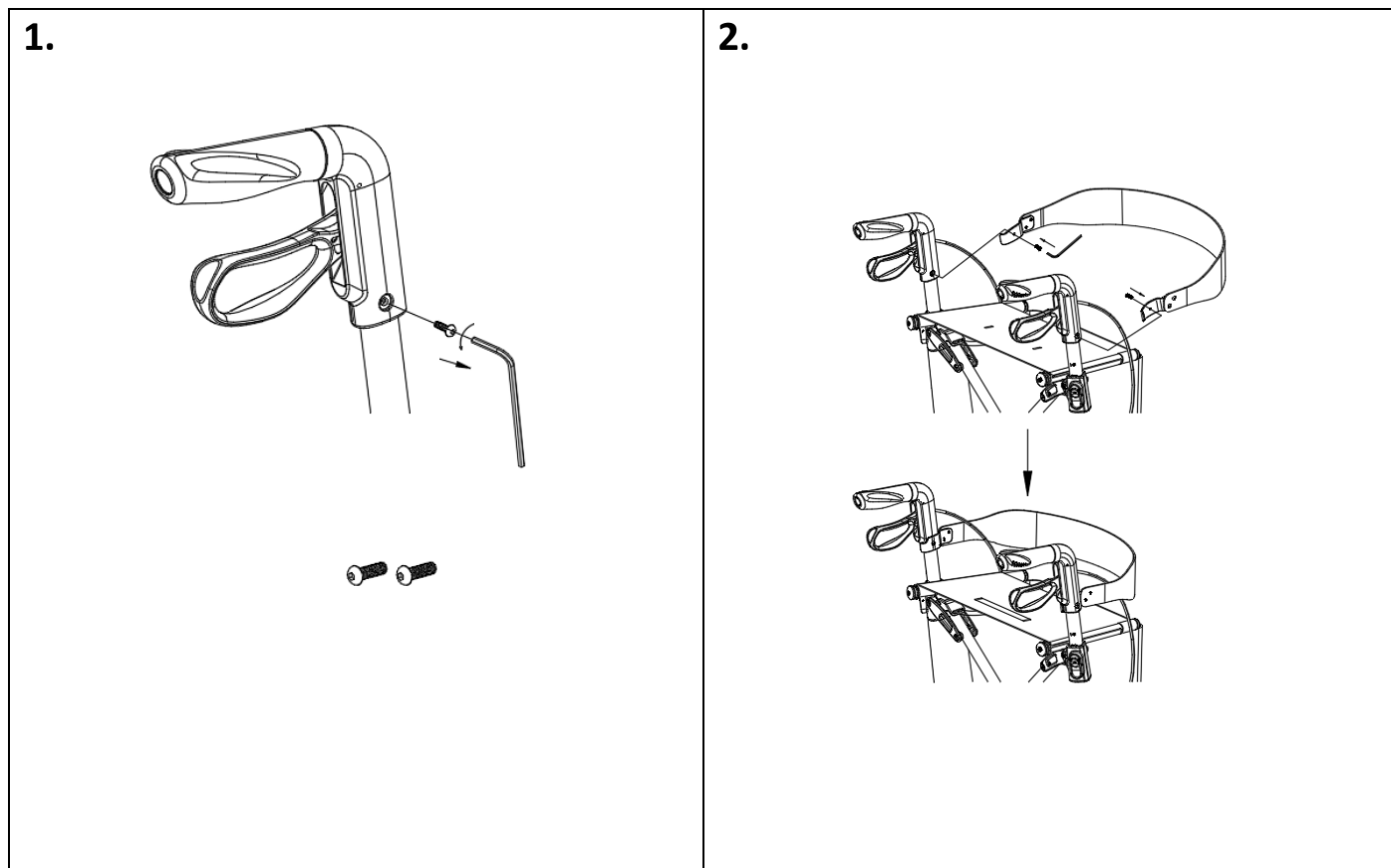

- Haal de elastische band van de vouwvergrendeling.
- Om de rollator uit te klappen, pakt u beide handgrepen vast en trekt u ze naar buiten.
- Druk de zitting naar beneden totdat deze volledig is uitgeklapt (karakteristiek 'klik'-geluid).
- Draai de bevestigingsschroeven van de handgrepen los (afbeelding 1).
- Bevestig de rugleuning met schroeven aan de handgrepen (afbeelding 2).

Opvouwen

- Om de rollator in te klappen, trekt u de zitting omhoog
- Zorg ervoor dat de rollator correct is ingeklapt.
- Zet de vouwvergrendeling vast met een elastische band.

Hoogteverstelling handgrepen

Om de hoogte van de handgrepen aan te passen:

- Druk de rem in om de parkeerrem te activeren en de rollator vast te zetten.
- Houd de verstelklem ingedrukt.
- Stel de hoogte van de handgrepen af.
- Laat de klem los om de ingestelde hoogte van de handgrepen te vergrendelen. Trek de handgreep een paar keer op en neer om te controleren of deze goed is vergrendeld.
- Stel de hoogte van de tweede handgreep op dezelfde manier af.

LET OP! Beide handgrepen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

Remfunctie

- Om de rollator tot stilstand te brengen, trekt u de remhendel omhoog en houdt u deze vast.
- Wanneer u niet in beweging bent of de zitting gebruikt, vergrendelt u de parkeerrem met de parkeerrem door de remhendel naar beneden te trekken.
- Om de parkeerrem te ontgrendelen, trekt u de hendel omhoog.

4. Technische gegevens

Totale breedte na uitklappen	62 cm
Totale breedte na het opvouwen	22 cm
Totale lengte	65 cm
Zitbreedte	46 cm
Zithoogte vanaf de grond	62 cm
Hoogteverstelling handgrepen	78-92 cm
Gewicht rollator	5,3 kg
Gewicht boodschappentas	0,6 kg
Maximaal draagvermogen	150 kg
Maximale draagkracht van de boodschappentas	5 kg
Kleur frame	rood, matzwart

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de rollator, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig het frame met een vochtige doek en droog het grondig af.
- Gebruik geen agressieve poetsmiddelen, omdat deze de beschermende coatings kunnen beschadigen.
- Verwijder regelmatig vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klemschroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)