

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedhek


Productcode: GripTim



1. Kenmerken

De bedheugel is gemaakt van duurzaam, gepoedercoat staal. Hij heeft in hoogte verstelbare poten, een schuimrubberen handgreep, een riem om aan het bed vast te maken en een klein zakje.

De set bevat: middendelen (2 stuks), onderframe met riem, poten met dopjes (2 stuks), tas, verbindingsstuk voor het middenframe, vergrendelingsclip (2 stuks), bovenframe met handgreep.

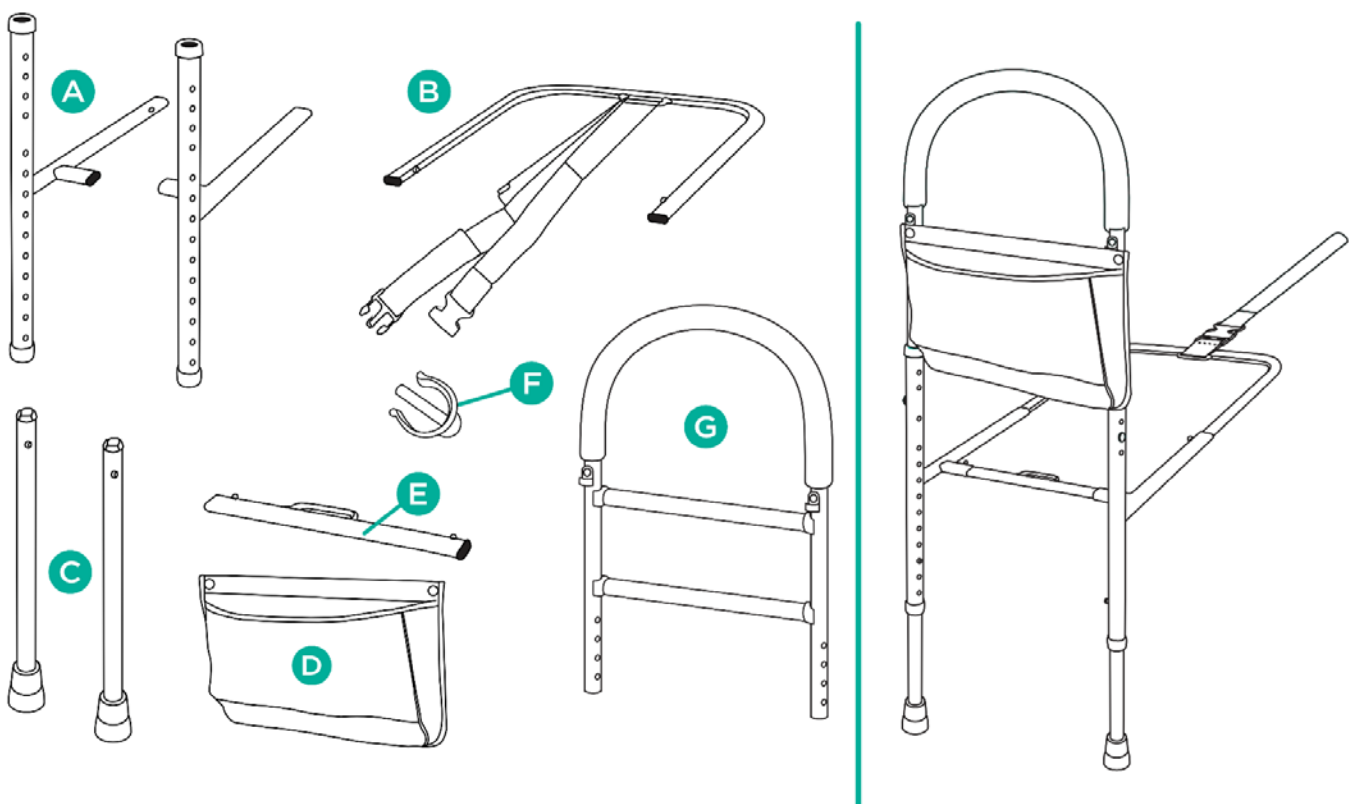

Onderdelen van de leuning:

- A. Onderdelen middenframe met hoogteverstelling
- B. Onderstel met bevestigingsriem
- C. Poten met rubberen dopjes
- D. Tas
- E. Verbindingsstuk middenframe
- F. Vergrendelingspen voor hoogteverstelling handgreep
- G. Bovenframe met schuimhandgreep

2. Toepassing

De bedhek is ontworpen om ondersteuning te bieden bij het opstaan of het

wisselen van liggende naar zittende houding in bed. Het bedhek wordt aanbevolen voor mensen met beperkte mobiliteit, waardoor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zonder hulp bemoeilijkt wordt. Het bedhek wordt aanbevolen voor gebruik zowel tijdens zorg in medische instellingen als thuis.

3. Montage


Stap 1. Verbind de onderdelen van het middenframe (A) met de middenframeverbinding (E) met behulp van borgpennen.

Stap 2. Verbind het onderframe (B) met het middenframe (A) met behulp van borgpennen.

Stap 3. Bevestig de poten (C) in de onderste openingen van de middenframe-onderdelen (A) met behulp van borgpennen. Beide poten moeten op dezelfde hoogte worden geplaatst.

Stap 4. Plaats het bovenste frame (G) in de bovenste openingen van het middelste frame (A) en zet ze aan beide kanten vast met de vergrendelingsclips (F). Zorg ervoor dat ze op dezelfde hoogte zitten.

Stap 5. Bevestig de bedheksen aan het bedframe en trek de riem strak (afbeelding 1).

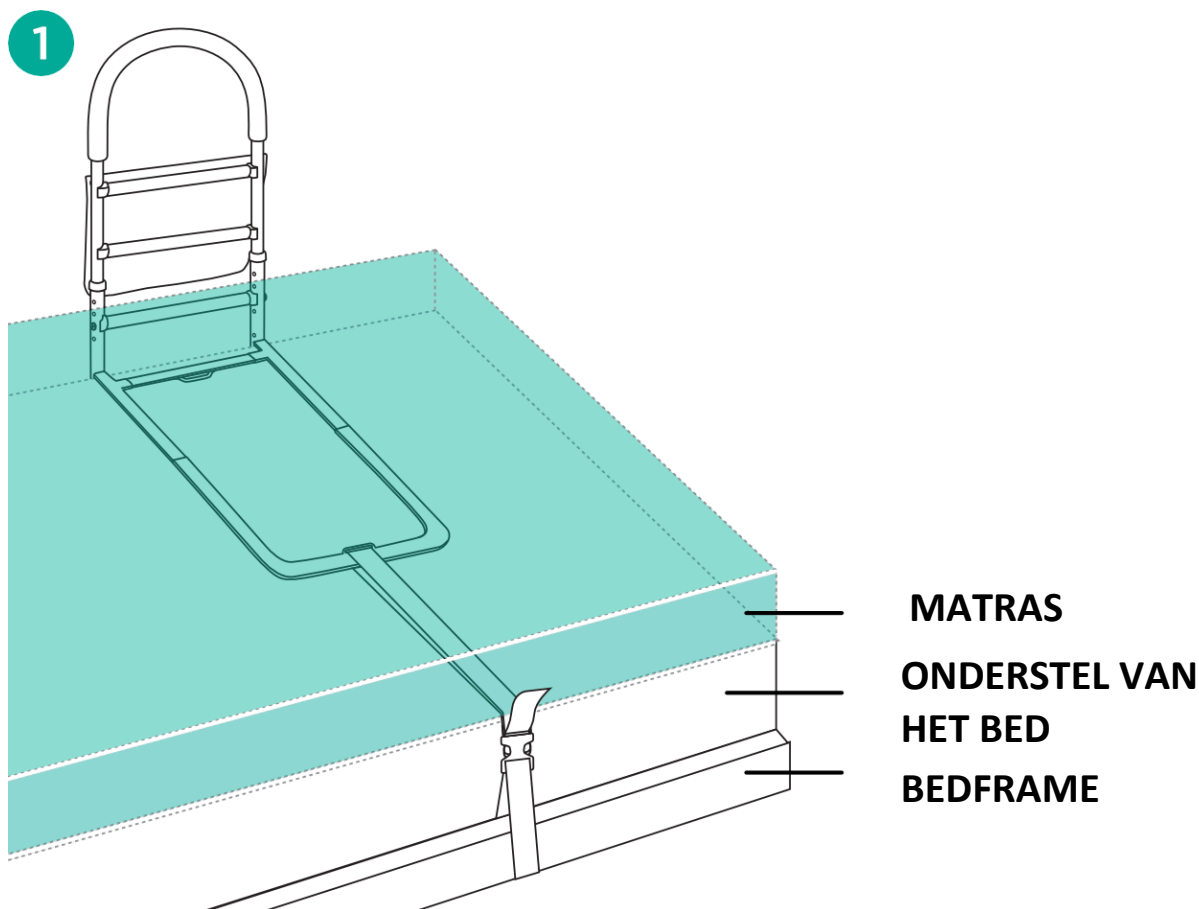

Stap 6. Zorg ervoor dat beide poten de grond raken. Als dat niet het geval is, stel dan de hoogte van de poten af met behulp van de borgpennen.

Stap 7. Bevestig de tas onder de handgreep op het bovenste frame (G) met behulp van de aan de tas bevestigde clips.

Het bedhek is klaar voor gebruik.

HOOGTEVERSTELLING VAN HANDGREPEN EN POTEN

- Om de handgreep te verstellen, verwijdert u de vergrendelingsclips aan beide zijden en stelt u de hoogte naar behoefte in. Zet deze daarna vast met de clips. De handgreep moet aan beide zijden op dezelfde hoogte staan.
- Om de poten te verstellen, drukt u op de vergrendelingspennen op de poten en kiest u de gewenste hoogte. Beide poten moeten op dezelfde hoogte staan.

4. Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Totale hoogteverstelling | 89,5–112 cm |
| Totale breedte | 37 cm |
| Totale diepte | 74 cm |
| Hoogteverstelling handgreep* | 52-60 cm |
| Lengte riem | 192 cm |
| Hoogte onderframe vanaf de grond | 30-55 cm |
| Max. draagvermogen | 136 kg |

** gemeten vanaf het onderframe tot aan de handgreep*

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

Reinig het frame en de tas regelmatig met een vochtige doek, zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen. Droog grondig af. Hardnekkige vlekken op de tas kunnen met een spons worden verwijderd.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

| | | | |
|---|---|---|----------------------------|
|  | Referentienummer |  | Fabrikant |
|  | LOT-nummer |  | UDI code |
|  | Serienummer |  | Medisch hulpmiddel |
|  | Opmerking |  | Lees de gebruiksaanwijzing |
|  | Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745). | | |

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

E.: info@timago.com



05/2026(I)