

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Stalen rolstoel

Productcode: H011



1. Kenmerken

De rolstoel is gemaakt van een gepoedercoat stalen frame. Hij heeft een duurzame zitting van nylon en katoen, opklapbare armleuningen, voetsteunen in standaard wegklapbare of verstelbare uitvoering en een veiligheidsriem. De rolstoel is uitgerust met lucht- of massieve snelvergrendelbare achterwielen van 24 inch met duurzame, kunststof handranden en voorwielen van 8 inch van extra sterk, slijtvast rubber.

Extra opties: verstelbare beensteun, begeleidersremmen, tafeltje.

De set bestaat uit: frame met zitting, voetsteunen, veiligheidsriem, montagesleutels.

Onderdelen van de rolstoel:

- A. Handgreep
- B. Armleuning
- C. Vergrendelingspen voor armleuning
- D. Parkeerrem
- E. Handring
- F. Snelontgrendeling
- G. Voetsteun
- H. Voetsteunbevestiging
- I. Veiligheidsriem



2. Toepassing

De rolstoel is ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig verplaatsen en voor patiënten met functiebeperkingen en verminderde mobiliteit. Deze zelfrijdende rolstoel kan ook door een

begeleider worden voortgeduwd. De rolstoel is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

3. Montage

UITKLAPPEN EN MONTAGE

Stap 1. De rolstoel uitklappen

Plaats de rolstoel op de grond. Klap de rolstoel uit met behulp van de handgrepen aan de achterkant van de rugleuning. Druk vervolgens op de voor- en achterrand van de zitting zodat alle onderdelen in elkaar vallen.

Stap 2. Montage van de voetsteunen

Monteer de rechter en de linkervoetsteun aan de voorkant van het frame door ze op twee pennen te plaatsen en ze naar binnen te draaien totdat ze vastzitten.

Stap 3. Afstelling van de voetsteunen

Stel de rechter en de linkervoetplaat af met behulp van de pennen en vergrendelingsclips die op de voetsteun zijn geplaatst. In het geval van een verstelbare beensteun stelt u de hellingshoek ten opzichte van de grond af met behulp van de hendel. Er moet voldoende ruimte worden gelaten tussen de voetplaten en de grond, aangezien te laag geplaatste voetplaten moeilijkheden kunnen veroorzaken bij het overwinnen van obstakels zoals stoepranden. Stel de voetsteunen zo af dat de hoek tussen de romp en de dijen 90° is (de gebruiker zit dan in de optimale zithouding).

Stap 4. Montage van de veiligheidsriem

Plaats de veiligheidsriem op de voetsteunen, aangezien deze voorkomt dat de benen van de gebruiker vanaf de voetsteunen onder de rolstoel wegglijden. Gebruik de rolstoel niet zonder veiligheidsriem.

Na voltooiing van de bovenstaande handelingen is de rolstoel klaar voor gebruik.

OPVOUWEN

De rolstoel kan worden ingeklapt om het transport en de opslag te vergemakkelijken.

- Zwaai de voetsteunen weg en zet ze in verticale positie of verwijder ze. Maak de bekleding van de zitting en rugleuning los met de tas. Til de zitting omhoog door deze aan de achter- en voorkant vast te pakken totdat het frame van de rolstoel is ingeklapt.

KLAPFUNCTIE VAN DE ARMLEUNINGEN

- Druk op de vergrendelknop aan de voorkant van de armleuning en duw de armleuning naar achteren.
- Om de armleuning te sluiten, duwt u deze naar beneden totdat de vergrendelingsknop vastklikt.

DE BANDEN OP POMPEN

- De rolstoel kan worden uitgerust met luchtbanden van 24 inch op de achterwielen. Controleer regelmatig de bandenspanning en de staat van de banden op slijtage, sneden of beschadigingen aan het loopvlak.
- Om de bandenspanning in de wielen te regelen, draait u de dop van het ventiel los, steekt u de pomp in het ventiel en pompt u de band op.

PARKEERREMMEN

- Om de wielen te vergrendelen, duwt u de remhendel naar voren totdat het wiel volledig is geblokkeerd (afzonderlijk voor het linker- en rechterwiel).

AFSTELLING VAN DE PARKEERREM

De juiste vergrendeling van de wielrem hangt af van de afstelling en de positie ervan. De hendel van de wielrem moet zo worden geplaatst dat de remschoen het wiel stevig blokkeert en de hendel geen overmatige weerstand ondervindt.

- In geval van overmatige weerstand trekt u de hendel iets naar voren door de borgschroef los te draaien die zich aan de andere kant van de wielvergrendeling bevindt (vanaf de binnenkant van de rolstoel). Stel de wielvergrendelingschoen zo in dat de

wielvergrendeling het wiel gemakkelijk en zonder weerstand blokkeert.

- Wanneer de wielblokkeerschoen het wiel niet voldoende raakt of blokkeert, volg dan de bovenstaande instructie door de hendel in de tegenovergestelde richting te bewegen.

4. Technische gegevens

Totale breedte	57-67 cm
Binnenbreedte	43, 46, 48, 51 cm
Totale diepte	101 cm
Zithoogte vanaf de grond	50 cm
Totale hoogte	91 cm
Afmetingen zitting	42, 45, 47, 50 x 40 cm
Gewicht	18,6 - 21,00 kg
Maximaal draagvermogen	115 kg tot een breedte van 48 cm 135 kg bij een breedte van 51 cm
Breedte ingeklapt	30 cm
Kleur frame	zilver

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de rolstoel, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De bekleding en het kussen kunnen worden gereinigd met een vochtige (niet natte) doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen met een spons worden verwijderd. Maak de bekleding niet te nat. Laat de rolstoel uit de buurt van warmtebronnen drogen.

- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek, eventueel met behulp van geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof. Volg in dat geval de instructies van de fabrikant en de veiligheidsmaatregelen.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.









8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing



Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)