

GEBRUIKERSHANDLEIDING

3-in-1 opvouwbare rollator

Productcode: JMC-C 3222




1. Kenmerken

De 3-functie opvouwbare rollator is gemaakt van een dwarsversterkt aluminium frame. De rollator is uitgerust met voorpoten met rubberen dopjes en met poten met stevige wielen met een diameter van 5 inch. Hij vervult 2 functies: de starre en de heen-en-weer-functie. Dankzij de laatste functie is het mogelijk om de zijanten afwisselend te verplaatsen zonder de rollator op te tillen. De rollator is voorzien van vergrendelingsclips waarmee de functies van de rollator kunnen worden omgeschakeld, een breed steunvlak en een stabiel en groot loopbereik. Zachte, geschuimde handgrepen zorgen voor de juiste stabiliteit en comfortabel gebruik. Dankzij de verstelbare poten kan de hoogte van de rollator worden aangepast aan de lengte van de gebruiker. De opgevouwen rollator neemt weinig ruimte in beslag en kan daardoor gemakkelijk worden opgeborgen en vervoerd.

Onderdelen van de rollator:

- A. Handgreep
- B. Klem voor het inklappen van het frame
- C. Functieschakelaar (heen-en-weerfunctie)
- D. Hoogteverstelling
- E. Antislip rubberen dop
- F. Wielen met een diameter van 5 inch

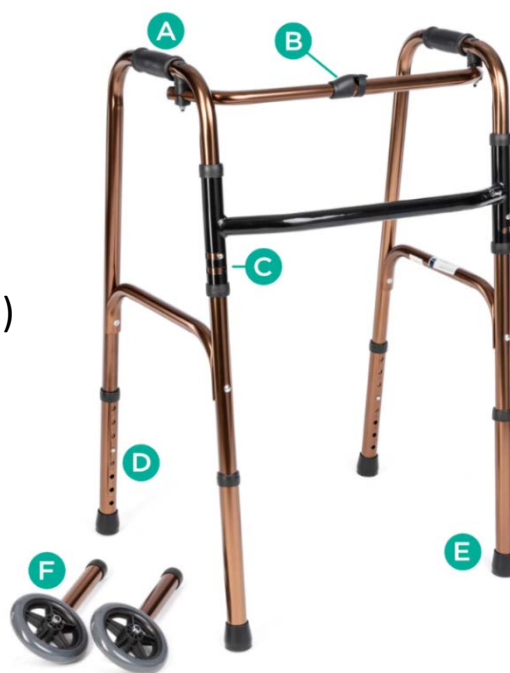

2. Toepassing

De 3-functie rollator is een hulpmiddel dat is ontworpen voor mensen met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben bij het lopen. Het wordt ook aanbevolen voor ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te verbeteren en de veiligheid te waarborgen tegen vallen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit bij mensen met aandoeningen aan de onderste ledematen en met problemen bij het lopen of het rechtop komen.

3. Montage

Uit- en inklappen

- Bevestig de poten met dopjes of wieltjes voordat u de rollator inklapt.
- Om de rollator uit te klappen, trekt u de zijkanten uit elkaar tot de maximale positie totdat de handgrepen vergrendeld zijn.
- Om de rollator in te klappen, drukt u op het plastic element in het midden van het dwarsframe en klapt u de zijkanten in.

Hoogteverstelling

- De hoogte moet zo worden ingesteld dat de gebruiker, die tegen de handgrepen leunt, zo rechtop staat als hij of zij kan, met de schouders in rustpositie en de ellebogen licht gebogen. Het is af te raden om met het volledige lichaamsgewicht aan de rollator te hangen.
- Om de hoogte van de poten aan te passen, drukt u op de metalen pin, selecteert u de gewenste hoogte van de poot en vergrendelt u de positie van de poten ten opzichte van elkaar. De poten zijn verstelbaar in stappen van 2,5 cm.

Let op! De pinnen moeten in elke poot op hetzelfde niveau worden ingesteld.

Selectie van functies

- Stijve functie – verwijder de vergrendelingsclips van het bovenste horizontale element dat het frame verstevigt en plaats ze in de openingen die zich op hetzelfde hoogteniveau bevinden, maar op het verticale element van het frame.
- Hef- en daalfunctie – plaats de vergrendelingsclips weer in de bevestigingsopeningen op het horizontale element.
- Poten met dopjes of wieltjes kunnen ongeacht de gekozen functie worden gemonteerd.

4. Technische gegevens

Totale breedte met dopjes	55 cm
Totale breedte met wieltjes	60 cm
Binnenbreedte	46 cm
Totale diepte met steunpoten	46 cm
Totale diepte met wielen	51 cm
Hoogteverstelling	72-91 cm
Gewicht	2,4 kg

Max. draagvermogen	136 kg
--------------------	--------

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de rollator, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

Beoordelingen

Voer systematisch een visuele inspectie uit van alle verbindingsonderdelen (vergrendeling, scharnier) van het product, waaronder:

- de staat van de stelspindels
- de stabiliteit en het uiterlijk van het frame
- de staat van de buizen (op scheuren)

Reiniging

- Reinig het frame van de rollator met een vochtige doek en gebruik uitsluitend water en milde reinigingsmiddelen. Droog het frame grondig af.
- **Gebruik** voor het reinigen **geen**: sterke polijst- en schuurmiddelen, sterke reinigingsmiddelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Verwijder vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klenschroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

REF	Referentienummer		Fabrikant
LOT	LOT-nummer	UDI	UDI code
SN	Serienummer	MD	Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
CE	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)