

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Looprek met 4 wielen en remmen

Productcode: JMC-C 3223



1. Kenmerken

De 4-wielige rollator met remmen is gemaakt van een dwarsversterkt aluminium frame. De rollator is uitgerust met 5-inch massieve wielen aan de voorkant, handremmen, inclusief extra parkeerremmen, en verwisselbare achterpoten. Rubberen handgrepen zorgen voor de juiste stabiliteit en gebruikscomfort. De hoogte van de rollator kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker. In opgevouwen toestand neemt de rollator weinig ruimte in, waardoor hij gemakkelijk kan worden opgeborgen en vervoerd.

Onderdelen van de rollator:

- A. Handgreep
- B. Knop voor het inklappen van het frame
- C. Hoogteverstelling
- D. Antislip rubberen dop
- E. Wielen met een diameter van 5 inch



2. Toepassing

De vierwielige rollator met remmen is een hulpmiddel dat is ontworpen voor mensen met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben tijdens het lopen. Het wordt ook aanbevolen voor ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te verbeteren en de veiligheid te waarborgen tegen vallen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit bij mensen met aandoeningen aan de onderste ledematen en met problemen bij het lopen of rechtop staan.

3. Montage

Uit- en inklappen

- Om de rollator uit te klappen, trekt u de zijanten uit elkaar tot de maximale positie totdat de handgrepen vergrendeld zijn.

- Om de rollator in te klappen, drukt u op de rubberen elementen aan de bovenkant van het dwarsframe en klapt u de zijkanten naar binnen.

Hoogteverstelling

- De hoogte moet zo worden ingesteld dat de gebruiker, die tegen de handgrepen leunt, zo rechtop staat als hij of zij kan, met de schouders in rustpositie en de ellebogen licht gebogen. Het is af te raden om met het volledige lichaamsgewicht aan de rollator te hangen.
- Om de hoogte van de poten aan te passen, drukt u op de metalen pin, selecteert u de gewenste hoogte en vergrendelt u de positie van alle vier de poten. De poten zijn verstelbaar in stappen van 2,5 cm.

Let op! De pinnen moeten in elke poot op hetzelfde niveau worden ingesteld.

Keuze van functies

- Poten met dopjes of met wieltjes kunnen aan de achterzijde van de rollator worden gemonteerd.
- De remmen zijn voorzien van een parkeerremfunctie, die wordt geactiveerd door de handremmen in de uiterste stand te trekken. Om de vergrendeling te ontgrendelen, pakt u de remhendel vast, knijpt u erin en trekt u het vergrendelingselement (dat zich onder de remhendel bevindt) naar achteren.

4. Technische gegevens

Totale breedte	59,5 cm
Binnenbreedte	46 cm
Totale diepte	54 cm
Hoogteverstelling	79-91 cm
Gewicht	3,8 kg
Max. capaciteit	136 kg

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de rollator, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig het frame van de rollator uitsluitend met een vochtige doek met water en een mild reinigingsmiddel. Droog het grondig af.

- **Gebruik** voor het reinigen **geen**: sterke polijst- en schuurmiddelen, sterke reinigingsmiddelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Verwijder regelmatig vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klemschroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)