

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Toiletbeugel

Productcode: JMC-C 5300KD



### 1. Kenmerken


De toiletbeugel is gemaakt van ultralicht geanodiseerd aluminium. De beugel is in hoogte en breedte verstelbaar om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.

#### De set bestaat uit:

- Zijrails (2 stuks)
- Verbindingsstang (2 stuks)
- In hoogte verstelbare poten met antislipdoppen (2 stuks)
- Bevestigingselement - connector

#### Onderdelen van de veiligheidsrail:

1. In hoogte verstelbare poot (2 stuks)
2. Zijrail (2 stuks)
3. Verbindingsstang (2 stuks)
4. Verbindingsstuk
5. Antislipdop

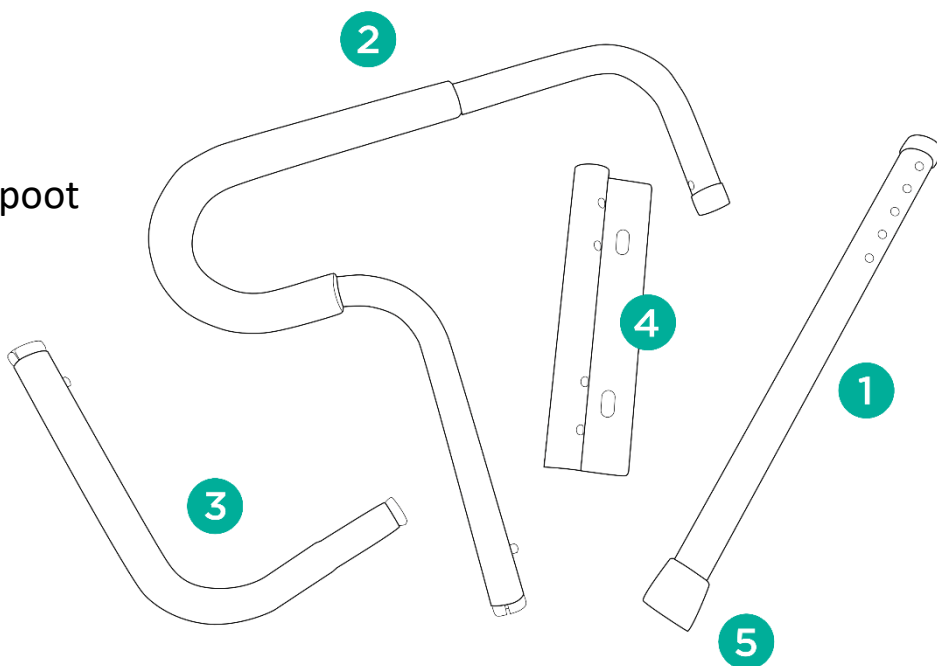


### 2. Toepassing

De toiletbeugel is een hulpmiddel dat de gebruiker helpt bij het verrichten van fysiologische activiteiten. De beugel wordt aanbevolen voor mensen met een beperking en voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen gaan zitten en opstaan. Dankzij de hoogte- en breedteverstelling kan het frame worden aangepast aan de afmetingen van het toilet.

### 3. Montage

**Stap 1.** Verwijder de toiletbril; draai de bevestigingsschroeven op de toiletpot los.

**Stap 2.** Monteer het frame door de onderdelen met borgpennen aan elkaar te bevestigen (afbeelding 1).

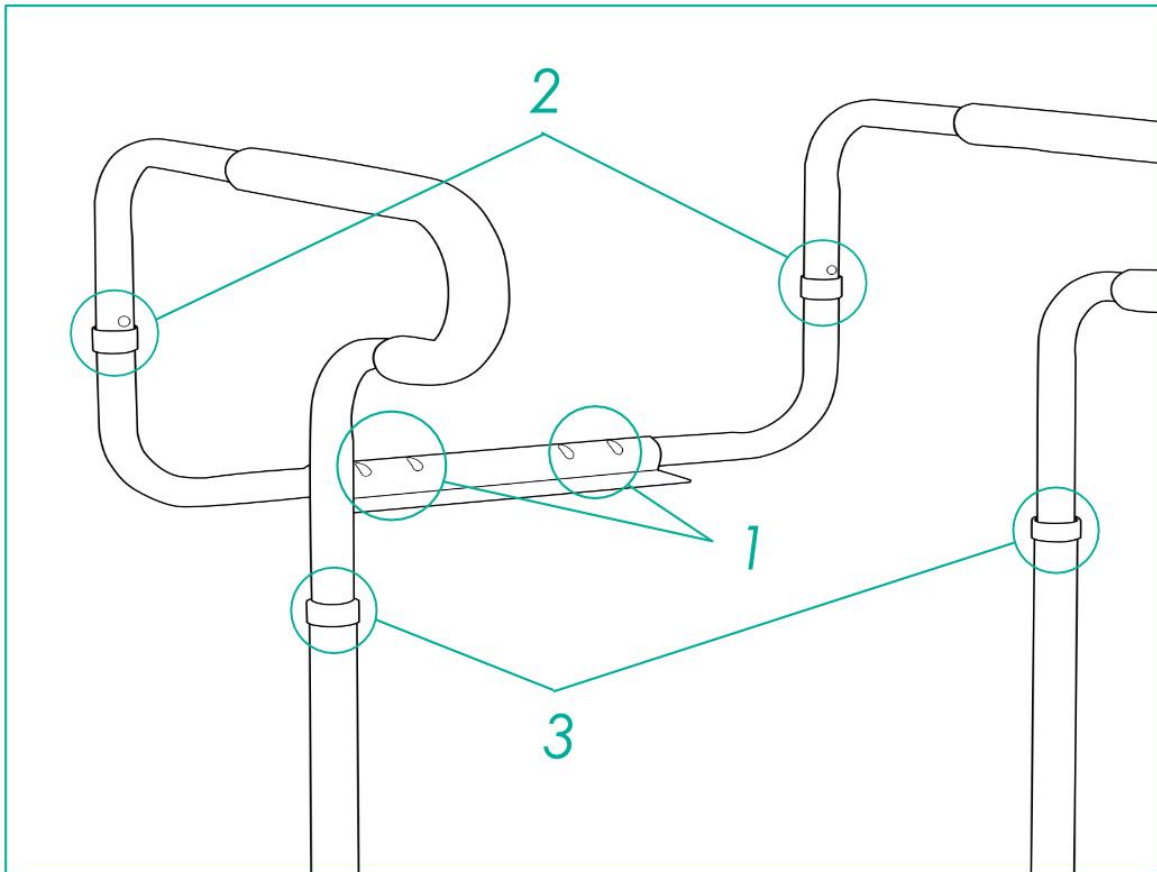

Afbeelding 1

**Stap 3.** Plaats de koppeling in de bevestigingsopeningen van de toiletspot.

**Stap 4.** Stel de hoogte af door op de vergrendelingspen aan de poten te drukken, kies de juiste hoogte en vergrendel de positie van de buizen ten opzichte van elkaar. Gebruik de pennen op de connector om de breedte van de zijframes aan te passen.

**Let op!** De pinnen moeten in elke poot op hetzelfde niveau worden ingesteld. De poten moeten stabiel op de grond staan.

**Stap 5.** Plaats de toiletbril terug.

#### 4. Technische gegevens

Totale breedte	57-65 cm
Totale diepte	47 cm
Hoogte	73-83 cm
Gewicht	1,40 kg
Maximale capaciteit	136 kg
Kleur frame	zilver

## 5. Opmerkingen

**Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de toiletbeugel, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.**

## 6. Onderhoud

### Beoordelingen

Voer systematisch een visuele inspectie uit van alle verbindingselementen (klemmen, scharnieren), inclusief:

- de staat van de borgpennen
- de stabiliteit en het uiterlijk van het frame

### Reiniging

Controleer regelmatig de technische staat van de toiletbeugel:

- Reinig de leuning regelmatig met alleen water en milde reinigingsmiddelen. Droog de leuning grondig af.
- Gebruik voor het reinigen geen: sterke polijstmiddelen en reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).

## 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

## 8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

## 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.








## 10. Etiketten

**REF**

Referentienummer



Fabrikant

	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



05/2026(I)