

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Stalen rolstoel

Productcode: K7



1. Kenmerken

De rolstoel is gemaakt van een gepoedercoat stalen frame. Hij heeft een duurzame kunststof zitting die bestand is tegen vuil en water. Het frame is speciaal versterkt om een hoog draagvermogen van maximaal 225 kg te bieden. Dankzij de afneembare armleuningen is het mogelijk om de rolstoel zo dicht mogelijk bij de tafel te plaatsen. De rolstoel is uitgerust met massieve achterwielen van 24 inch en een massief rubberen voorwiel van 8 inch.

De set bestaat uit: frame met zitting, voetsteunen, montagesleutel.

Onderdelen van de rolstoel:

- A. Handgreep
- B. Armleuning
- C. Vergrendelingspen
- D. Parkeerrem
- E. Achterwiel van 24 inch met handring
- F. Voetsteun
- G. Vergrendelingspen voetsteun
- H. Verstelling zwaartepunt op voorste 8" wielen



2. Toepassing

De rolstoel is ontworpen voor personen die moeite hebben met zelfstandig bewegen en voor patiënten met mobiliteitsbeperkingen of verminderde fysieke functies. Deze zelfrijdende rolstoel kan ook door een begeleider worden voortgeduwd. Hij is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

3. Montage

Stap 1. De rolstoel uitklappen

Zet de rolstoel op de grond. Klap de rolstoel uit met behulp van de armleuningen. Druk vervolgens op de zijkanten van de zitting zodat alle onderdelen goed in elkaar zitten.

Stap 2. Montage van de voetsteunen

Bevestig de voetsteun op de pennen (I) aan de buitenkant van het frame. Draai vervolgens de voetsteun naar binnen totdat deze vergrendeld is.

Stap 3. Hoogteverstelling van de voetsteunen

Stel de voetsteunen af met behulp van de montagesleutels. Om de hoogte aan te passen, draait u de schroef op het frame van de voetsteun los. Er moet voldoende ruimte blijven tussen de voetplaten en de grond, aangezien te laag geplaatste voetplaten problemen kunnen veroorzaken bij het beklimmen van hellingen en stoepranden. Stel de voetplaten zo af dat de hoek tussen de romp en de dijen^{90°} is (optimale zitpositie voor de gebruiker).

OPVOUWEN

De rolstoel kan worden ingeklapt om het vervoer en de opslag te vergemakkelijken.

- Zwaai de voetsteunen weg en zet ze in verticale positie of verwijder ze. Maak de bekleding van de zitting en de rugleuning los. Til de zitting omhoog door deze aan de achter- en voorkant vast te pakken totdat het frame van de rolstoel is ingeklapt.

DE ARMLEUNINGEN VERWIJDEREN EN BEVESTIGEN

- Om de armleuningen te verwijderen, drukt u op de vergrendelingspen aan de voorkant van de armleuning en trekt u de gehele armleuning uit de bevestigingsopeningen.
- Om de armleuning te bevestigen, steekt u het frame van de armleuning in de bevestigingsopening en duwt u deze naar binnen totdat deze vastklikt.

PARKEERREM

Om de wielen te vergrendelen, duwt u de hendel naar voren totdat het wiel volledig is geblokkeerd (afzonderlijk voor het linker- en rechterwiel). Houd er rekening mee dat de parkeerrem alleen dient om de wielen te vergrendelen wanneer de rolstoel volledig tot stilstand is gekomen.

AFSTELLING VAN DE PARKEERREM

De juiste vergrendeling van de parkeerrem hangt af van de afstelling en de positie ervan. De hendel van de wielvergrendeling moet zo worden geplaatst dat de remschoen het wiel stevig blokkeert en de hendel geen overmatige weerstand ondervindt.

- In geval van overmatige weerstand trekt u de hendel iets naar voren door de borgschroeven op de parkeerrem los te draaien. Stel de remschoen zo af dat deze het wiel gemakkelijk blokkeert zonder overmatige weerstand.
- Wanneer de parkeerremschoen het wiel niet voldoende raakt of blokkeert, volg dan de bovenstaande instructie door de hendel in de tegenovergestelde richting te bewegen.

AFSTELLING VOOR PATIËNTEN NA AMPUTATIE VAN DE ONDERSTE LEDEMATEN

Opmerking: Neem voor een juiste afstelling contact op met uw dealer of een gekwalificeerde professional. Probeer de hellingshoek van de zitting niet zelf aan te passen.

- Om het zwaartepunt aan te passen, draait u de bevestigingsschroeven op zowel het rechter als het linker achterwiel los. Pas vervolgens de zithoek aan door de montageas van het wiel omhoog of omlaag te verplaatsen — zorg ervoor dat beide wielen gelijk worden afgesteld.
- De zithoek moet zo worden ingesteld dat de gebruiker niet naar voren uit de rolstoel glijdt en de handringen comfortabel kan bereiken en gebruiken.

4. VOOR GEBRUIK

Stap 1. De staat van de rolstoel controleren

Controleer de staat van de remmen, de constructie en de banden. Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en afgesteld.

Let op! Gebruik de rolstoel niet als u gebreken constateert.

Stap 2. Parkeerremmen gebruiken

Zet de wielen vast wanneer u in of uit de rolstoel stapt.

Stap 3. Voetplaten

De voetsteunen moeten in verticale positie staan wanneer u in of uit de rolstoel stapt. Gebruik de voetsteunen niet als steun bij het in- of uitstappen, vanwege het risico op vallen. Klap de voetsteunen uit nadat u in de rolstoel bent gestapt.

Let op! Ga niet op de voetsteunen staan, omdat deze hierdoor beschadigd kunnen raken.

Stap 4. In de rolstoel gaan zitten

De rolstoel moet zo dicht mogelijk bij de patiënt staan. De rolstoel moet het bed of de andere stoel raken. Als de gebruiker niet zelfstandig van stoel kan wisselen, breng de gebruiker dan naar de rolstoel.

Stap 5. Positie van de gebruiker

De gebruiker moet rechtop zitten en de knieën moeten in een hoek van 90° gebogen zijn.

De rolstoel is klaar voor gebruik.

4. Technische gegevens

Totale breedte	80 - 85 cm
Binnenbreedte	57 / 62 cm
Totale diepte	123 cm
Zithoogte vanaf de grond	52 cm
Totale hoogte	93 cm
Afmetingen zitting	56/61 x 47 cm
Gewicht	23,5 kg / 24,5 kg
Max. draagvermogen	225 kg
Breedte in opgevouwen toestand	45 cm

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De bekleding en het kussen kunnen worden gereinigd met een vochtige (niet natte) doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een spons. Maak de bekleding niet te nat. Laat drogen uit de buurt van warmtebronnen.
- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek, eventueel met behulp van geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof. Volg in dat geval de instructies van de fabrikant en de veiligheidsmaatregelen.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft

gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)