

GEBRUIKSAANWIJZING

4-wielige aluminium rollator met elleboogsteun


Productcode: LEXI



1. Kenmerken

De 4-wielige rollator is gemaakt van een gepoedercoat aluminium frame. Hij is uitgerust met remmen met vergrendelingsmechanisme, een zitje, een wandelstokhouder en een tas. De rollator heeft in hoogte verstelbare duwhandgrepen, elleboogsteunen en stevige 8-inch wielen.

De set bestaat uit: rollatorframe met zitje, twee handgrepen met remmen, stelschroeven, tas.

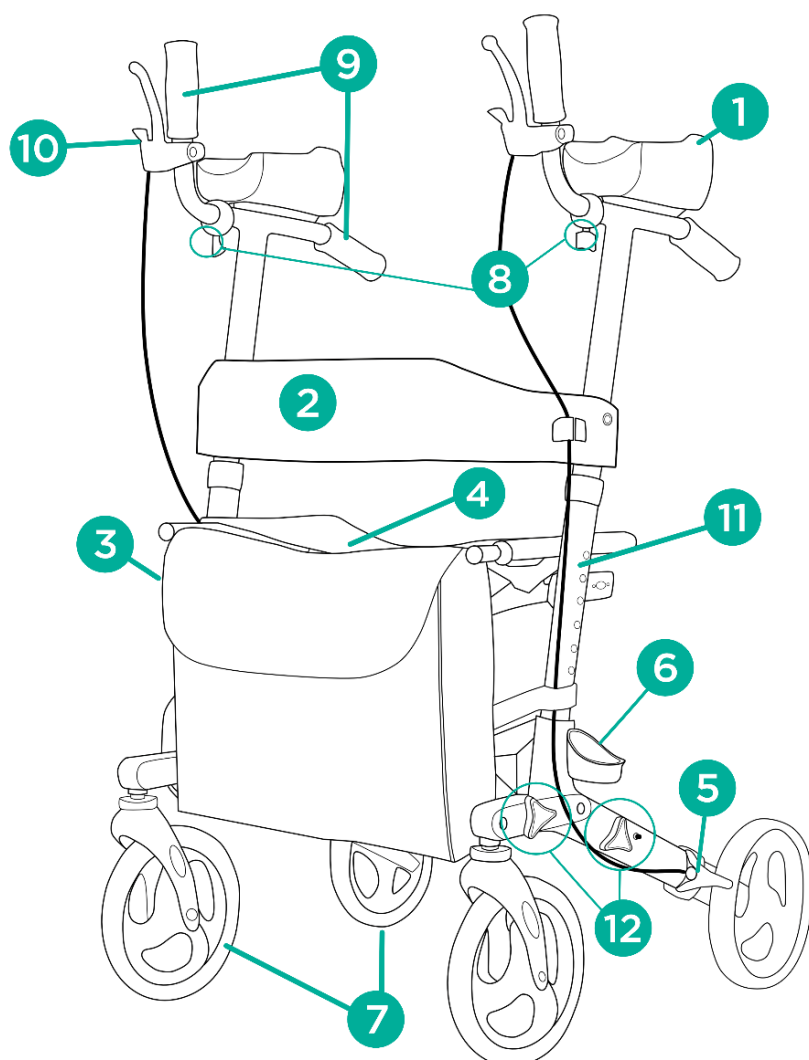

Onderdelen van de rollator:

1. Elleboogsteun
2. Rugleuning
3. Tas
4. Zitting
5. Rem
6. Stoel
7. Achterste en voorste 8-inch wielen
8. Verstelknop duwstang
9. Duwstangen
10. Remhendel met vergrendelingsmechanisme
11. Hoogteverstelling
12. Bevestigingsknoppen

2. Toepassing

De rollator is een hulpmiddel en is ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben tijdens het lopen. Hij is speciaal ontworpen voor patiënten die lijden aan reumatische aandoeningen,

beperkte mobiliteit in de pols- en ellebooggewrichten, en voor patiënten met verminderde grijpkracht. De rollator wordt ook aanbevolen aan ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loop comfort te verbeteren en de veiligheid tegen vallen te waarborgen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit van mensen met problemen bij het lopen en het rechtop komen staan.

3. Montage

In- en uitklappen

- 1) Begin met het uitklappen van het onderframe van de rollator.
- 2) Draai de bevestigingsknop naast het voorwiel los en beweeg het wiel langzaam naar beneden. Draai de bevestigingsknop vast. Herhaal dit aan de andere kant.
- 3) Draai de andere bevestigingsknop los en breng beide delen van het frame horizontaal op één lijn. Draai de knop daarna vast.
- 4) Klap de rollator uit door de zitting naar beneden te drukken tot u een klikgeluid hoort.
- 5) Bevestig het bovenste frame in het onderste frame. Stel de hoogte af met de vergrendelingspennen. Zorg ervoor dat de hoogte-instelling van beide handgrepen op hetzelfde niveau staat.
- 6) Bevestig de tas aan de voorkant van de rollator. Bevestig de remkabels voor extra veiligheid aan de klittenbanden op het frame en de rugleuning.

Werking van de remmen

- Om de rollator tot stilstand te brengen, trekt u de remhendel in de richting van de duwhendel.
- De remmen zijn voorzien van een parkeerremfunctie, die wordt geactiveerd door de handremmen in de uiterste stand te trekken. Om de vergrendeling te ontgrendelen, pakt u de remhendel vast, knijpt u erin en trekt u aan het vergrendelingselement (dat zich onder de remhendel bevindt).

LET OP! Zet de parkeerrem vast wanneer u de zitting gebruikt.

Afstelling van duwgrepen en elleboogsteun

- Om de afstand van de duwgreep aan te passen, draait u de verstelknop onder de greep los, stelt u de gewenste afstand in en draait u de knop weer vast. Herhaal deze handeling aan de andere kant. Stel beide grepen op dezelfde lengte in.
- Om de hoogte van de elleboogsteun aan te passen, drukt u op de vergrendelingspen aan de buitenkant van het frame, kiest u de gewenste

hoogte en vergrendelt u de pen. Stel beide handgrepen op dezelfde hoogte in.

4. Technische gegevens

Totale breedte	62 cm
Totale diepte	66,5 cm
Afmetingen zitting	46 x 24 cm
Totale hoogte	112-124 cm
Afmetingen ingeklapt	74 x 30 x 60 cm
Hoogteverstelling onderarmsteun	98-110 cm
Zithoogte vanaf de grond	53,5 cm
Gewicht	8,70 kg
Maximaal draagvermogen	136 kg
Kleur frame	zwart

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de rollator, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig het frame met een vochtige doek en droog het grondig af.
- Gebruik geen agressieve poetsmiddelen, omdat deze de beschermende coatings kunnen beschadigen.
- Verwijder vuil en controleer regelmatig de staat van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klemschroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)