

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Douche- en toiletstoel 3-in-1

Productcode: MASTER-TIM



1. Kenmerken

De douche- en toiletverplaatsingsstoel is gemaakt van een gepoedercoat aluminium frame. Hij is voorzien van opklapbare armleuningen voor gemakkelijk in- en uitstappen voor mensen met beperkte mobiliteit. Hij is uitgerust met een zitting met wig van PU, vier zwenkwielen van 12,7 cm met remmen, kantelbare voetsteunen en een toiletemmer. Door de constructie van de stoel kan deze over de toiletbril worden geschoven.

De set bestaat uit: frame, zitting, vier zwenkwielen van 5 inch met remmen, vier C-vormige bevestigingsgespen, rugleuning met armleuningen, twee vergrendelingspennen voor de rugleuning, rechter en linker voetsteun met voetplaat, toiletemmer met deksel.

Onderdelen van de stoel:

- A. Rugleuning
- B. Armleuning
- C. Zitting
- D. Vergrendeling voetsteun
- E. Afvalbak
- F. Voetensteun
- G. Wielen met rem
- H. Voetensteun




2. Toepassing

Douche- en toiletstoelen zijn ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig bewegen en voor patiënten met beperkingen en verminderde mobiliteit. De stoel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. De stoel mag alleen worden gebruikt met hulp van een begeleider. De stoel fungeert als douche- en toiletstoel dankzij de opvangbak onder de zitting en de vier zwenkwielen. Dit vergemakkelijkt de dagelijkse hygiëne. De stoel wordt met name aanbevolen voor

mensen die problemen hebben met mobiliteit als gevolg van: verlamming, obesitas of abnormaal ondergewicht, degeneraties of misvormingen van ledematen, degeneraties of gewrichtsblessures, ledemaatletsel of amputaties, hart- en vaatziekten en circulatiestoornissen.

3. Montage

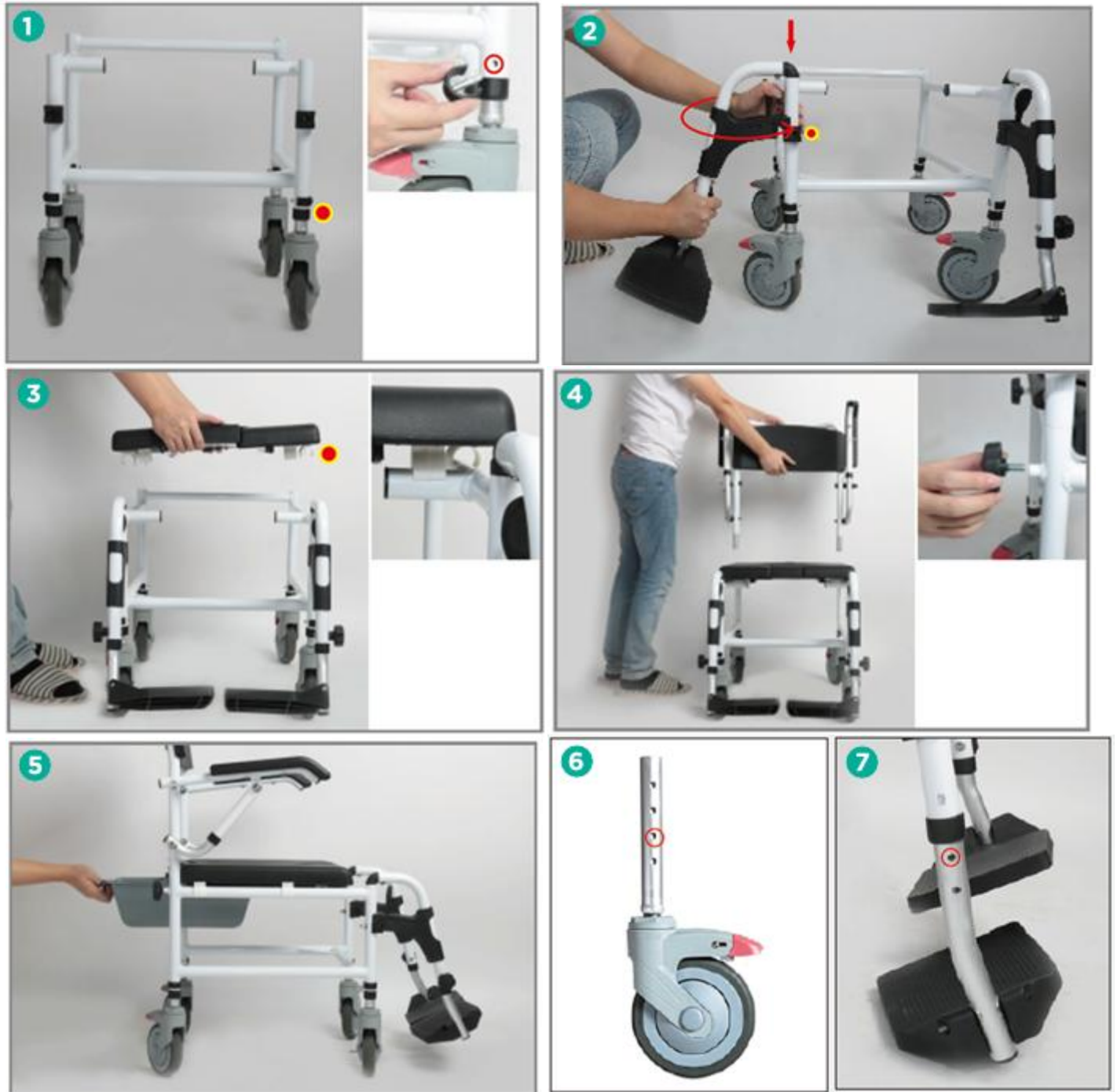

Afbeelding 1. Monteer de vier wielen in het hoofdframe. Lijn de gaten uit op de gewenste hoogte en zet elk wiel vast met een C-vormige gesp.

Let op! Alle wielen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

Afbeelding 2. Plaats de voetsteunen vanaf de zijkant in het hoofdframe en draai ze vervolgens naar voren totdat de vergrendeling van de voetsteun vastklikt.

Afbeelding 3. Bevestig de zitting op het frame van de stoel door deze in te drukken totdat deze vastklikt (de voorkant van de zitting wordt aangegeven door de wig).

Afbeelding 4. Bevestig de rugleuning met armleuningen in de gaten aan de achterkant van het frame. Lijn de gaten uit en vergrendel ze met twee vergrendelingspennen voor de rugleuning.

Afbeelding 5. Plaats de hygiënische opvangbak vanaf de achterkant van de zitting in de geleiders.

Afbeelding 6. De stoel heeft een 4-traps hoogteverstelling. Let op! Alle wielen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

Afbeelding 7. De voetsteunen zijn in 3 standen in hoogte verstelbaar – instelbaar met de vergrendelknoppen.

Het product is klaar voor gebruik.

OMGAAN MET DE STOEL

- Controleer de staat van de remmen, de constructie en de wielen. Controleer of de onderdelen correct zijn gemonteerd en afgesteld.
- Zorg er vóór gebruik voor dat de breedte van de stoel past bij de gebruiker, aangezien de stoel niet is uitgerust met een breedteverstelling.
- De stoel is ontworpen voor gebruik over korte afstanden en uitsluitend binnenshuis. De stoel heeft geen schokdempers, dus langdurig gebruik wordt afgeraden.

Let op! Gebruik de stoel niet als u gebreken of tekortkomingen constateert.

KLAPFUNCTIE VAN DE ARMLEUNINGEN

- Til de armleuning voorzichtig omhoog.
- Gebruik de armleuning niet als steun bij het opstaan. Vraag om hulp als u die nodig heeft.

REMMEN

- Om de wielen te vergrendelen, drukt u met uw voet op de rode pedalen. Om de wielen te ontgrendelen, drukt u met uw voet op de zwarte hendels in de rode pedalen.

VOETSTEUNEN

- De voetsteunen moeten in verticale positie staan wanneer u in of uit de stoel stapt. Gebruik de voetsteunen niet als steun bij het in- of uitstappen vanwege het risico op omvallen.

IN DE ROLSTOEL STAPPEN

- Het is essentieel om de remmen te vergrendelen tijdens het in- of uitstappen, het veranderen van de zitpositie of het uitstappen.
- Tijdens het wisselen van plaats moet de rolstoel zo dicht mogelijk bij de plaats van de transfer staan. De rolstoel moet het bed of de andere stoel die wordt gebruikt raken. Als de gebruiker niet zelfstandig van zitplaats kan wisselen, breng de gebruiker dan naar de rolstoel.
- De gebruiker moet zo diep mogelijk in het midden van de zitting zitten om instabiliteit van de stoel te voorkomen.

4. Technische gegevens

Totale breedte	57 cm
Binnenbreedte	45 cm
Totale diepte	86 cm
Zithoogte vanaf de grond	49-56,5 cm
Totale hoogte	94-101,5 cm
Afmetingen zitting	44 x 43 cm
Gewicht	13,00 kg
Max. draagvermogen	150 kg
Kleur frame	wit

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de stoel en het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.

6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de stoel:

- De zitting kan worden gereinigd met een vochtige doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen met een spons worden verwijderd.
- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek en geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof. Volg in dat geval de instructies van de fabrikant en de veiligheidsmaatregelen.

- Leeg en desinfecteer de toiletemmer en de toiletbril na elk gebruik. Gebruik reinigingsmiddelen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com

