

GEBRUIKERS SHANDLEIDING

3-in-1 kantelbare douche- en toiletstoel

Productcode: MASTER-TIM PLUS



1. Kenmerken

De douche- en toiletstoel is gemaakt van een gepoedercoat aluminium frame. Hij is voorzien van opklapbare armleuningen voor gemakkelijk in- en uitstappen voor mensen met beperkte mobiliteit en verstelbare zitting- en rugleuninghoek. Hij is uitgerust met een zitting met wig van PU, hoofdsteun, vier zwenkwielen van 12,7 cm met remmen, kantelbare voetsteunen en een opvangbak. Door de constructie van de stoel kan deze over de toiletbril worden geschoven.

De set bestaat uit: frame, zitting, hoofdsteun, hoofdsteunbuis, twee vergrendelknoppen voor de hoofdsteun, vier zwenkwielen van 5 inch met remmen, vier C-vormige wielbevestigingsgespen, rugleuning met armleuningen, twee armleuningverlengstukken, twee vergrendelknoppen voor de rugleuning,

Onderdelen van de stoel

- A. Hoofdsteun
- B. Vergrendelknop hoofdsteun
- C. Handgreep
- D. Hoofdsteunbuis
- E. Armleuning
- F. Rugleuning
- G. Verlengstuk voor armleuning
- H. Verstelknop rugleuning
- I. Voetsteun
- J. Vergrendeling voetsteun
- K. Voetensteunverstelling



voetsteunen met voetplaat, toiletemmer met deksel.

2. Toepassing

Douche- en toiletstoelen zijn ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig bewegen en voor patiënten met beperkingen en verminderde

mobiliteit. De stoel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. De stoel mag alleen worden gebruikt met hulp van een begeleider. De stoel fungeert als douche- en toiletstoel dankzij de sanitaire container onder de zitting en vier zwenkwielen. Hij vergemakkelijkt dagelijkse hygiënische activiteiten. De stoel wordt met name aanbevolen voor mensen die problemen hebben met mobiliteit als gevolg van: verlamming, obesitas of abnormaal ondergewicht, degeneraties of misvormingen van ledematen, degeneraties of gewrichtsblessures, ledemaatblessures of amputaties, hart- en vaatziekten en circulatiestoornissen.

3. Montage en gebruik



Afbeelding 1. Bevestig de zitting op het frame van de stoel door deze aan te drukken totdat deze vastklikt (de voorkant van de zitting wordt aangegeven door de wig). Monteer de rugleuning met armleuningen in de gaten aan de achterkant van het frame. Lijn de gaten uit en vergrendel ze met twee vergrendelknoppen voor de rugleuning. Plaats de sanitaire opvangbak in de geleiders vanaf de achterkant van de zitting.

Afbeelding 2. Bevestig de vier wielen aan het hoofdframe. Lijn de gaten op de gewenste hoogte uit en zet elk wiel vast met een C-vormige gesp. De stoel is in 4 standen in hoogte verstelbaar. **Let op!** Alle wielen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

Afbeelding 3. Plaats de voetsteunen vanaf de zijkant in het hoofdframe en draai ze vervolgens naar voren totdat de vergrendeling van de voetsteun vastklikt. De voetsteunen zijn in 3 standen in hoogte verstelbaar – instelbaar met de M6-vergrendelingsknoppen.



Afbeelding 4. Bevestig beide arMLEuningverlengstukken aan de bevestigingsgaten van de arMLEuningen en vergrendel ze vervolgens door de borgpennen vast te klikken.

Afbeelding 5. Bevestig de hoofdstleunbuis in het bevestigingsgat aan de bovenkant van de rugleuning, stel deze in de gewenste positie in en vergrendel deze vervolgens met de vergrendelknop.

Afbeelding 6. Bevestig de hoofdstleun in het bevestigingsgat van de hoofdstleunbuis, stel deze in de gewenste positie af en vergrendel hem vervolgens met de vergrendelknop.

Het product is klaar voor gebruik.

OMGAAN MET DE STOEL

- Controleer de staat van de remmen, de constructie en de wieltjes. Controleer of de onderdelen correct zijn gemonteerd en afgesteld.
- Zorg er vóór gebruik voor dat de breedte van de stoel past bij de gebruiker, aangezien de stoel niet is uitgerust met een breedteverstelling.
- De stoel is ontworpen voor gebruik over korte afstanden en uitsluitend binnenshuis. De stoel heeft geen schokdempers, dus langdurig gebruik wordt afgeraden.

Let op! Gebruik de stoel **niet** als u defecten of gebreken constateert.

OPKLAPFUNCTIE VAN DE ARMLEUNINGEN

- Til de arMLEuning met een zachte beweging omhoog.
- Gebruik de arMLEuning **niet** als steun bij het opstaan. Vraag om hulp als u die nodig heeft.
- De arMLEuningverlengstukken kunnen op elk moment worden bevestigd of verwijderd om de rolstoel gebruiksvriendelijker te maken.

REMMEN

Om de zwenkwielen te vergrendelen, drukt u met uw voet op de rode pedalen. Om het wiel te ontgrendelen, drukt u met uw voet op de zwarte hendels aan de binnenkant van de rode pedalen.

VOETSTEUNEN


- De voetsteunen moeten in verticale positie staan wanneer u in of uit de rolstoel stapt. **Gebruik de voetsteunen niet als steun bij het in- of uitstappen vanwege het risico op vallen.**

IN DE ROLSTOEL STAPPEN

- Het is essentieel om de remmen te vergrendelen tijdens het in- of uitstappen, het veranderen van de zitpositie of het uitstappen.
- Tijdens het wisselen van plaats moet de stoel zo dicht mogelijk bij de plaats van de transfer staan. De stoel moet het bed of een andere stoel raken. Als de gebruiker niet zelfstandig van stoel kan wisselen, breng de gebruiker dan naar de stoel.
- De gebruiker moet zo diep mogelijk in het midden van de zitting zitten om instabiliteit van de stoel te voorkomen.
- De armlenigingverlengstukken kunnen op elk moment worden bevestigd of verwijderd om het in- en uitstappen te vergemakkelijken.

HOEKVERSTELLING VAN ZITVLAK EN RUGLEUNING

- Voordat u de hoek verstelt, is het essentieel om de remmen te vergrendelen.
- Houd de verstelhendel ingedrukt en stel vervolgens de gewenste hoek van de zitting en rugleuning in. Laat de verstelhendel los nadat u de gewenste hoek hebt ingesteld.

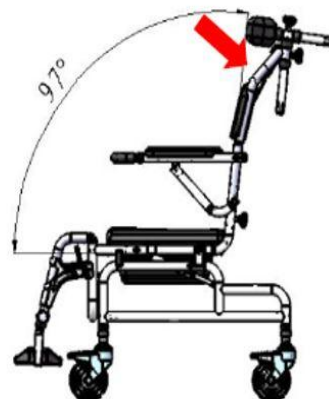

4. Technische gegevens

Totale breedte	54 cm
Binnenbreedte	46 cm
Totale diepte	106 cm
Zithoogte vanaf de grond	55-61 cm
Totale hoogte	115-136 cm
Afmetingen zitting	44 x 44 cm
Gewicht	13 kg
Max. draagvermogen	150 kg
Hoekverstelling van zitting en rugleuning	max. 30°

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de stoel en het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.

6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de stoel:

- De zitting kan worden gereinigd met een vochtige doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een spons.
- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek en geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof. Volg in dat geval de instructies van de fabrikant en de veiligheidsmaatregelen.
- Leeg en desinfecteer de toiletemmer en de toiletbril na elk gebruik. Gebruik reinigingsmiddelen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

7. Opslag- en transportvoorwaarden










Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder een garantie, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met of de verkoper bij wie u

het product hebt gekocht. Houd er rekening mee dat u voor garantiedoeleinden het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet bewaren.

9. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		Productiedatum
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de instructie
	De fabrikant heeft gecontroleerd of aan de essentiële eisen voor medische hulpmiddelen is voldaan.		

Ons volledige productassortiment is verkrijgbaar bij onze distributeurs. Meer informatie vindt u op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago hebt gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)