

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Rolstoel met transportfunctie

### Productcode: MOBIL-TIM



## 1. Kenmerken

De rolstoel is gemaakt van een stalen frame. Hij is voorzien van opklapbare armleuningen voor gemakkelijk in- en uitstappen voor mensen met beperkte mobiliteit. Hij is uitgerust met 8" achterwielen en 6" voorwielen, handbediende remmen (achterwielen), een zitje met rugleuning, een veiligheidsgordel en voetsteunen.

### Onderdelen van de rolstoel:



1. Armleuning
2. Handremmen
3. Veiligheidsgordel
4. Rugleuning
5. Zitting
6. Voetsteun
7. Achterwiel 8"
8. Voorwiel 6"
9. Veiligheidsgesp

### Rolstoel na het opvouwen:



## 2. Toepassing

Rolstoelen zijn ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig bewegen en voor patiënten met functiebeperkingen en verminderde mobiliteit.

De rolstoel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. De rolstoel mag alleen worden gebruikt met hulp van een begeleider.

De rolstoel fungeert als transportstoel. Hij vergemakkelijkt de dagelijkse verplaatsingen. De rolstoel wordt met name aanbevolen aan mensen die mobiliteitsproblemen hebben als gevolg van: verlamming, zwaarlijvigheid of abnormaal ondergewicht, degeneraties of misvormingen van ledematen, degeneraties of gewrichtsblessures, ledemaatletsels of amputaties, hart- en vaatziekten en circulatiestoornissen.

### 3. Montage


#### ROLLSTOEL UITKLAPPEN/INKLAPPEN:

- Houd het zitframe met één hand vast en het rugleuningframe met de andere, en spreid ze uit elkaar totdat de rolstoel volledig is uitgeklappt. Vergrendel de veiligheidsgesp achter de rugleuning. Klap de armleuningen en de voetsteun naar beneden.
- Om de rolstoel in te klappen, herhaalt u de handelingen, te beginnen met het inklappen van de armleuningen en de voetsteun, ontgrendelt vervolgens de veiligheidssluiting en houdt de rugleuning en het zitframe vast, waarbij u ze uit elkaar trekt totdat de rolstoel volledig is ingeklapt.


#### OPKLAPFUNCTIE VAN DE ARMLEUNINGEN:

- Trek de armleuning voorzichtig omhoog.
- Gebruik de armleuning niet als steun bij het opstaan. Vraag om hulp als u die nodig heeft.

#### REM

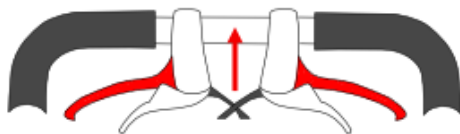

Afbeelding 1

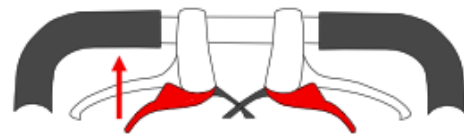

Afbeelding 2

- Om de wielen te vergrendelen, trekt u de bovenste handremmen aan (afbeelding 1).
- Om de wielen te ontgrendelen, drukt u op de onderste handremmen (afbeelding 2).
- Om te stoppen, drukt u zachtjes op de bovenste handremmen.

#### VOETSTEUNEN

- Gebruik de voetsteunen niet als steun bij het in- of uitstappen van de rolstoel vanwege het risico op vallen.

## IN DE ROLSTOEL STAPPEN

- Het is essentieel om de remmen te vergrendelen tijdens het in- of uitstappen, het veranderen van de houding van de gebruiker of het uitstappen.
- Tijdens het wisselen van plaats moet de rolstoel zo dicht mogelijk bij de plaats van de transfer staan. De rolstoel moet het bed of de andere stoel die wordt gebruikt raken. Als de gebruiker niet zelfstandig van stoel kan wisselen, breng de gebruiker dan naar de rolstoel.
- De gebruiker moet zo diep mogelijk in het midden van de zitting zitten om instabiliteit van de rolstoel te voorkomen.

## 4. Technische gegevens

Totale breedte	51 cm
Binnenbreedte	41 cm
Totale diepte	80 cm
Zithoogte vanaf de grond	48 cm
Totale hoogte	91 cm
Afmetingen zitting	41 x 41 cm
Gewicht	9,5 kg
Max. draagvermogen	136 kg
Kleur frame	wit

## 5. Opmerkingen

**Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de rolstoel en het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.**

## 6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De zitting kan worden gereinigd met een vochtige doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen met een spons worden verwijderd.
- Kunststof onderdelen moeten met een vochtige doek worden schoongemaakt.

## 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










## 8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

## 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

## 10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



05/2026(I)