

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Rolstoel met transportfunctie en handgreep

Productcode: MOBIL-TIM PLUS



### 1. Kenmerken

De rolstoel is gemaakt van een stalen frame. Hij is voorzien van opklapbare armleuningen voor gemakkelijk in- en uitstappen voor mensen met beperkte mobiliteit. Hij is uitgerust met 8" achterwielen en 6" voorwielen, handbediende remmen (achterwielen), een zitje met rugleuning, een veiligheidsgordel, een transportgreep en voetsteunen.

### Onderdelen van de rolstoel:



1. armleuning
2. remhendels
3. rugleuning
4. veiligheidsgordel
5. veiligheidsgesp
6. transporthandgreep
7. zitting
8. voetsteun
9. voorwielen 6", achterwielen 8"
10. remmen

### Rolstoel na het opvouwen:



### 2. Toepassing

Rolstoelen zijn ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig bewegen en voor patiënten met functiebeperkingen en verminderde mobiliteit. De rolstoel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. De rolstoel mag alleen worden gebruikt met de hulp van een begeleidende persoon. De rolstoel fungeert als transportstoel. Hij vergemakkelijkt de dagelijkse verplaatsingen. De rolstoel wordt met name aanbevolen voor mensen die problemen hebben met

de mobiliteit als gevolg van: verlamming, obesitas of abnormaal ondergewicht, degeneraties of misvormingen van ledematen, degeneraties of gewrichtsblessures, ledemaatblessures of amputaties, hart- en vaatziekten en circulatiestoornissen.

### 3. Montage


#### ROLLSTOEL UITKLAPPEN/INKLAPPEN:

- Houd het zitframe met één hand vast en het rugleuningframe met de andere, en spreid ze uit elkaar totdat ze volledig zijn uitgeklapt. Vergrendel de veiligheidsgesp aan de achterkant. Klap de armleuningen en de voetsteun naar beneden.
- Om de rolstoel in te klappen, herhaalt u de handelingen, te beginnen met het inklappen van de armleuningen en de voetsteun, en ontgrendelt u vervolgens de veiligheidssluiting. Houd het rugleuning- en zitframe vast en trek ze naar binnen totdat de rolstoel volledig is ingeklapt.


#### OPKLAPFUNCTIE VAN DE ARMLEUNINGEN:

- Trek de armleuning met een zachte beweging omhoog.
- Gebruik de armleuning niet als steun bij het opstaan. Vraag om hulp als u die nodig heeft.

#### REMMEN

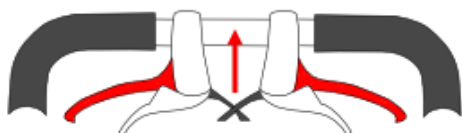

Afbeelding 1

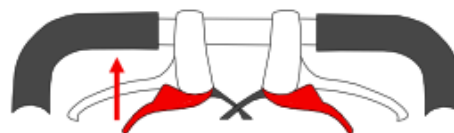

Afbeelding 2

- Om de wielen te vergrendelen, trekt u de bovenste handremmen aan (afbeelding 1).
- Om de wielen te ontgrendelen, drukt u op de onderste handremmen (afbeelding 2).
- Om te stoppen, drukt u zachtjes op de bovenste handremmen.

#### VOETSTEUNEN

- Gebruik de voetsteunen niet als steun bij het in- of uitstappen van de rolstoel vanwege het risico op vallen.

#### IN DE ROLSTOEL STAPPEN

- Het is essentieel om de remmen te vergrendelen tijdens het in- of uitstappen, het veranderen van de houding van de gebruiker of het uitstappen.
- Tijdens het wisselen van plaats moet de rolstoel zo dicht mogelijk bij de plaats van de transfer staan. De rolstoel moet het bed of de andere stoel die wordt gebruikt raken. Als de gebruiker niet zelfstandig van stoel kan wisselen, breng de gebruiker dan naar de rolstoel.
- De gebruiker moet zo diep mogelijk in het midden van de zitting zitten om instabiliteit van de rolstoel te voorkomen.

## **DRAAGHANDVAT**

- De rolstoel is voorzien van een handgreep voor eenvoudig transport.
- Klap de rolstoel in en trek de handgreep uit voordat u de rolstoel verplaatst.  
**LET OP!** Trek de handgreep niet uit wanneer de rolstoel is uitgeklapd.

## **4. Technische details**

Totale breedte	60 cm
Binnenbreedte	43 cm
Totale diepte	80 cm
Zithoogte vanaf de grond	48 cm
Totale hoogte	103 cm
Afmetingen zitting	48 x 43 cm
Gewicht	11,00 kg
Max. draagvermogen	136 kg
Kleur frame	zwart

## **5. Opmerkingen**

**Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de rolstoel en het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.**

- Controleer voor elk gebruik van de rolstoel de werking van de remmen, de constructie en de staat van de wielen. Gebruik de rolstoel niet als er defecten of gebreken worden geconstateerd.
- De rolstoel is niet in de breedte verstelbaar; zorg ervoor dat de breedte van de rolstoel geschikt is voor de gebruiker.
- De rolstoel is uitsluitend ontworpen voor korte afstanden binnenshuis.

## 6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De zitting kan worden gereinigd met een vochtige doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen met een spons worden verwijderd.
- Kunststof onderdelen moeten met een vochtige doek worden schoongemaakt.

## 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










## 8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

## 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

## 10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

---

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.  
Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft  
gekozen!



**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



05/2026(I)