



Maya

ELEKTRISCHE ROLSTOEL

GEBRUIKSAANWIJZING

1. PRODUCTBESCHRIJVING EN TOEPASSING

Elektrische rolstoelen zijn ontworpen voor personen met mobiliteitsproblemen en ondersteunen gebruikers met een beperking bij hun dagelijkse activiteiten. Een elektrische rolstoel kan een standaardrolstoel vervangen.

De elektrische rolstoel is geschikt voor patiënten met:

- een beperking waardoor zelfstandig bewegen moeilijk is.
- functiestoornissen en een verminderd bewegingsvermogen.
- hart- en vaatziekten.
- lichamelijke verzwakking als gevolg van hoge leeftijd.

2. VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de rolstoel gebruikt.
- Gebruik de rolstoel niet voordat deze is uitgekapt en gemonteerd.
- Het gebruik van de rolstoel wordt afgeraden voor personen met een beperking waardoor zij de rolstoel niet zelfstandig kunnen bedienen.
- De maximale belasting mag niet meer dan 115 kg bedragen.
- De rolstoel mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Houd tijdens het rijden uw voeten op de voetsteunen en uw onderarmen op de armleuningen.
- Controleer vóór het rijden het batterijniveau op het bedieningspaneel.
- Gebruik de elektrische rolstoel uitsluitend op vlakke ondergronden of geringe hellingen. Rijd niet op een ondergrond met een hellingshoek van meer dan 6 graden.
- Rijd niet met maximale snelheid bergop of bergaf.
- Rijd niet op zachte en gladde ondergronden, zoals modder, zand enz.
- Rijd niet zijwaarts over sterk hellende ondergronden.
- Bevestig geen extra lasten, zoals een aanhanger, aan de rolstoel.
- Repareer of wijzig de constructie van de rolstoel niet zelf. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant.
- Ga niet op de rolstoel staan of zitten wanneer de bedieningsmodule is ingeschakeld.
- Gebruik de rolstoel niet zonder antikantelwielen.
- Stap niet zonder hulp van een derde persoon in of uit de rolstoel wanneer de handmatige stand is ingeschakeld.

- Leun niet voorover om voorwerpen vóór, naast of achter de rolstoel te pakken. Hierdoor kan de rolstoel kantelen.
- Ga niet op de voetsteun staan. Hierdoor kan de rolstoel kantelen.
- Vermijd plotselinge richtingsveranderingen op hellingen.
- Verminder de snelheid wanneer u bergaf rijdt of bochten maakt.
- Controleer of de wielen correct zijn gemonteerd.
- Maak geen plotselinge bewegingen met de joystick. Beweeg de joystick rustig.
- Bewaar de rolstoel bij regen in een overdekte ruimte.
- Controleer voordat u de rolstoel inschakelt of de hendels op de linker- en rechtermotor in de elektrische stand staan.
- Rijd onder geen enkele omstandigheid over dwarse spleten of openingen.
- Verwijder de batterij als u de rolstoel gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik de rolstoel niet op de rijbaan. Dit kan tot een verkeersongeval leiden.
- Bewaar de rolstoel niet op plaatsen met een hoge temperatuur en luchtvochtigheid.

INCIDENTEN MET EEN MEDISCH HULPMIDDEL

Elk ernstig incident met een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

3. ALGEMENE INFORMATIE



Gebruik de rolstoel niet voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen. De gebruiksaanwijzing bevat noodzakelijke informatie over veiligheidsvoorschriften, onderhoud en bediening van het voertuig.



Wijzig, voeg toe, verwijder of demonteer GEEN onderdelen van de rolstoel en schakel zelf geen functies uit. Neem voor reparaties contact op met een erkende servicedienst van de importeur.

VEILIGHEIDSCONTROLE VÓÓR HET RIJDEN

Controleer vóór elk gebruik de slijtagegevoelige onderdelen, zoals remmen, wielen enz.

GEWICHTSBEPERKINGEN



Overschrijd de maximale belasting van de rolstoel (115 kg) **NIET**. Hierdoor kan schade ontstaan die niet onder de garantie valt.

Vervoer GEEN andere passagiers in de rolstoel. Dit kan instabiliteit en/of een ongeval veroorzaken.

RIJDEN OP HELLINGEN



Rijd NIET dwars over een helling en rijd niet schuin omhoog of omlaag.

Rijd NIET op of af van een mogelijk gevaarlijke helling, bijvoorbeeld een ondergrond met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.

RIJDEN OP VERSCHILLENDE ONDERGRONDEN

Dankzij de constructie kan de rolstoel op verschillende soorten ondergrond binnen en buiten rijden, zoals beton, asfalt en vloeren. Houd rekening met de volgende regels om onnodig risico op schade aan de rolstoel te voorkomen.

- Verminder uw snelheid op oneffen ondergronden,
- Vermijd gras, modder en los grind of zand,
- Rijd **NIET** op gladde ondergronden zoals ijs; dit kan een ongeval veroorzaken,
- Rijd **NIET** op instabiele ondergronden,
- Vermijd gaten en greppels,
- Rijd niet op de openbare rijbaan; dit kan een verkeersongeval veroorzaken. Rijd uitsluitend op trottoirs of speciale fietspaden.

TRAPPEN EN ROLTRAPPEN

De rolstoel is niet ontworpen om trappen of roltrappen op of af te rijden. De rolstoel kan met een lift worden vervoerd.

VOORZORGSMATREGELEN BIJ WEERSOMSTANDIGHEDEN

Stel de rolstoel niet bloot aan ongunstige weersomstandigheden, zoals extreme hitte of kou, regen of sneeuw. Als u tijdens het rijden in dergelijke omstandigheden terechtkomt, zoek dan beschutting en laat de rolstoel volledig drogen voordat u verder rijdt of deze opslaat of oplaadt.



De oppervlaktetemperatuur kan stijgen bij blootstelling aan een externe warmtebron, zoals zonlicht.

BESCHERMING VAN DE BATTERIJ



Bescherm de batterij altijd tegen bevriezing. Laad een bevroren batterij NIET op. Neem bij een beschadigde of gebarsten batterij onmiddellijk contact op met de servicedienst van de importeur en gebruik de batterij niet.



Wijzig GEEN elektrische aansluitingen. Zelf uitgevoerde **reparaties zijn verboden en kunnen schade veroorzaken die niet onder de garantie valt.**

SYMBOOL	BETEKENIS
	Veiligheidsclassificatie type B
	Waarschuwing! Duidt op een mogelijk gevaarlijke toestand of situatie.
	Verboden! Het uitvoeren van een verboden handeling kan lichamelijk letsel en/of schade aan de apparatuur veroorzaken. Schade als gevolg van verboden handelingen valt niet onder de garantie.
	Verplicht! Deze handelingen moeten vóór gebruik worden uitgevoerd. Als de gebruiker de verplichte handelingen niet uitvoert, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of schade aan de apparatuur.
IP24	Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm en tegen spatwater uit elke richting.
	Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik
	Let goed op voetgangers
	Verwijder GEEN onderdelen of waarschuwingsetiketten van de rolstoel
	Steek GEEN vingers of ledematen onder afdekkingen of tussen bewegende onderdelen. Dit kan letsel veroorzaken

	Overbelast de rolstoel niet. De maximale belasting bedraagt 115 kg
	Gebruik de rolstoel NIET op trappen
	Gebruik de rolstoel niet bij extreme weersomstandigheden, zoals zware regen, extreme luchtvochtigheid, ijsvorming enz.
	Waarschuwing! De oppervlakken van de rolstoel kunnen heet zijn
	Laat reparaties na een ongeval en/of schade aan onderdelen uitsluitend uitvoeren door een erkende servicedienst van de importeur
	De batterij bevat bijtende stoffen. Voer deze af volgens de plaatselijke milieuvoorschriften
	Controleer vóór het rijden of de rugleuning rechtop staat
	Gebruik uitsluitend onderhoudsvrije, verzegelde lithiumbatterijen van de fabrikant
	Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen uit de buurt van de batterijpolen. Contact met metalen voorwerpen kan een elektrische schok veroorzaken
	Afvoer en recycling. Voer het product af volgens de plaatselijke voorschriften.
	
	De batterijlader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis

	Ontvlambare materialen. Niet blootstellen aan open vuur
	MR-onveilig
	Raadpleeg bij mentale of lichamelijke beperkingen een deskundige voordat u de rolstoel gebruikt
	Neem tijdens het rijden een correcte houding aan
	Blijf geconcentreerd tijdens het rijden en vermijd afleiding
	Breekbaar
	Beschermen tegen vocht

4. PRODUCTINFORMATIE

A. ONDERDELEN VAN DE ROLSTOEL



- 1. Rugleuning
- 2. Opklapbare armleuning
- 3. Knop voor opklappen armleuning
- 4. Zitting met veiligheidsgordel
- 5. Reflecterende stickers
- 6. Lithiumbatterij

- 7. Schokdemper
- 8. Voetsteun
- 9. Zwenkbaar voorwiel van 7 inch
- 10. Massief achterwiel van 11 inch
- 11. Verstelling antikantelwiel



- 12.** Bedieningsmodule met joystick
- 13.** Opbergtas
- 14.** Inklapklem
- 15.** Motoren en hendels voor de bedrijfsstand
- 16.** Antikantelwiel

Rolstoel na het



B. PRODUCTKENMERKEN

- Inklapbaar aluminium frame
- Massieve achterwielen van 11 inch en zwenkbare voorwielen van 7 inch
- Veilige en betrouwbare elektromagnetische remmen
- Volledig gesloten, onderhoudsvrije batterij
- Veiligheidsgordel
- In lengte verstelbare antikantelwielen
- Opklapbare armleuningen en voetsteun
- Schokdempers aan de voor- en achterzijde
- Schokdempers aan de voorzijde, achterzijde en het inklapmechanisme
- Opbergtas aan de achterzijde
- Inclusief reflecterende stickers
- Twee bedrijfsstanden: elektrisch en handmatig

C. TECHNISCHE PARAMETERS



De rolstoel mag niet worden gebruikt in ruimten met ontvlambaar gas gemengd met lucht, zuurstof of lachgas.

Let op! Sommige parameters kunnen variëren afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, de wegomstandigheden en het gebruik van de batterij.

Productcode	Maya
Type	voor gebruik binnen en buiten
Totale hoogte	100 cm
Totale breedte	56 cm
Totale lengte	103 cm
Zithoogte vanaf de grond	55 cm
Hoogte rugleuning	52 cm
Afmetingen zitkussen	42 x 45 x 5 cm
Maximale belasting	115 kg
Gewicht batterij	1,60 kg
Batterij	lithium, 24 [V] x 12 [Ah]

Oplaadtijd batterij	6-8 uur
Gewicht (zonder batterij)	20,00 kg
Wielen	voor: zwenkbaar, massief, 7 inch achter: massief, 11 inch
Maximale snelheid	≤ 6 [km/u]
Remweg op een horizontale ondergrond	≤ 1 [m]
Maximaal bereik	18 [km]
Maximale hellingshoek	$\leq 6^\circ$
Minimale draaicirkel	1,2 [m]
Veiligheidsclassificatie	type B
Beschermingsgraad van de motor	IP24
Motorvermogen	2x250 [W]

D. MONTAGE EN AFSTELLING

- **Uitklappen:** Neem de elektrische rolstoel uit de doos. Houd de rolstoel vast aan de handgreep boven de rugleuning en klap hem uit totdat hij hoorbaar vastklikt. Plaats de batterij onder de zitting en sluit deze aan op de voedingskabel van de motor (de rode kabel). Plaats de bedieningsmodule en sluit deze aan op de voedingskabel van de module.
- **Inklappen:** Trek de inklapklep naar achteren en klap de rolstoel naar voren door de handgreep van de rugleuning in de richting van de joystick te duwen. Zet de rolstoel rechtop en pak hem voor transport vast aan het frame.
Waarschuwing! Koppel de batterij los en verwijder deze voordat u de rolstoel voor transport inklapt.
- **Positie van de bedieningsmodule afstellen:** Voer de afstelling uit terwijl u in de rolstoel zit. Draai eerst de bevestigingsschroef los en schuif de beugel van de bedieningsmodule naar voren of achteren totdat deze correct is geplaatst. Draai daarna de schroef weer vast.
- **Armleuningen opklappen:** De rolstoel is voorzien van opklapbare armleuningen. Druk op de rode knop aan de zijkant van het rolstoelframe

en til de armleuning langzaam op. Laat het frame zakken totdat de pen hoorbaar vastklikt om de armleuning weer te vergrendelen.


- **Antikantelwielen:** Steek de antikantelwielen in de montageopeningen van het onderste frame, onder de motoren. Trek vervolgens de montagepen naar buiten en schuif de wielen in de opening totdat de borgpen hoorbaar vastklikt.
- **Batterij verwijderen:** Koppel de rode voedingskabel los en trek de batterij voorzichtig aan de handgreep naar buiten.

5. BEDIENING

A. BEDIENINGSMODULE VOOR DE GEBRUIKER EN DE BEGELEIDER




1. Batterijniveau
2. Voeding AAN/UIT
3. Claxon
4. Snelheidsindicator
5. Snelheid verlagen/verhogen
6. Geluid uit/aan
7. S.O.S.-waarschuwingknop
8. Joystick

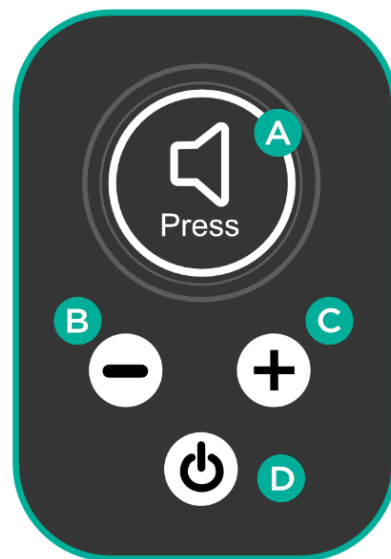


- A. Joystick/claxon (indrukken)
- B. Snelheid verlagen
- C. Snelheid verhogen
- D. Voeding AAN/UIT

Functies van de hoofdbedieningsmodule	
Joystick	Wordt gebruikt om snelheid en richting te regelen: vooruit, achteruit en draaien. De rijrichting wordt bepaald door de richting waarin de joystick wordt bewogen. Hoe verder de joystick uit het midden van het bedieningspaneel wordt bewogen, hoe sneller de rolstoel rijdt. Wanneer de joystick wordt losgelaten, vermindert de rolstoel automatisch snelheid. Beweeg de joystick niet plotseling wanneer de rolstoel stilstaat.
Snelheidsindicator	Heeft 5 niveaus: 1 is het langzaamst en 5 het snelst.
Knop geluid uit	Schakelt de stem van de begeleidersmodule uit (alleen beschikbaar in het Engels).
S.O.S.-waarschuwing	Druk op de knop om het S.O.S.-waarschuwingssignaal in te schakelen (licht/stem). Druk op een willekeurige knop om het signaal uit te schakelen.

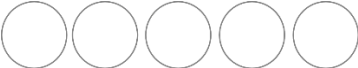Leddisplay	Status	Betekenis/beschrijving
	Alle leds zijn uit	De rolstoel is uitgeschakeld of staat in de slaapstand.
1.  2.    3. 	1. Alle lampjes branden 2. Enkele lampjes branden 3. Alleen het rode lampje brandt	Wanneer de rolstoel is ingeschakeld, geeft het aantal brandende lampjes het laadniveau van de batterij aan: 5 lampjes = 81-100% 4 lampjes = 61-80% 3 lampjes = 41-60% 2 lampjes = 21-40% 1 lampje = ≤20% Als alleen het rode lampje brandt, is de batterij bijna leeg. Laad de batterij zo snel mogelijk op.

B. OMSCHAKELEN TUSSEN HANDMATIGE EN ELEKTRISCHE STAND

Duw de hendels op de linker- en rechtermotor aan de achterzijde van de rolstoel omhoog om de elektrische stand te gebruiken. Duw de hendels omlaag voor de handmatige stand.

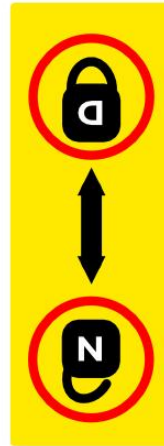

ELEKTRISCHE STAND

HANDMATIGE STAND

C. LADER

- De set bevat een lader die speciaal voor de batterij is bedoeld.
- De oplaadtijd van de batterij bedraagt ongeveer 6-8 uur.
- De batterij kan rechtstreeks of via de bedieningsmodule worden opgeladen.
- **Belangrijk:** schakel de module uit voordat u de batterij via de aansluiting onder de bedieningsmodule oplaadt.

• Ledindicator batterij:

A. **Groene led:** de batterij is niet op de lader aangesloten of is volledig opgeladen.

B. **Rode led:** de batterij wordt opgeladen of is nog niet volledig opgeladen.

Let op! Na het opladen schakelt de lader uit om overladen te voorkomen.

- Controleer of de elektrische aansluitingen correct zijn aangesloten en niet beschadigd zijn.
- **Wijzig** de aansluitingen van het laadcircuit niet.
- Koppel het laadcircuit niet los terwijl de batterij wordt opgeladen, om brand of doorbranden te voorkomen.
- Koppel eerst de lader los om het actuele batterijniveau op de bedieningsmodule te controleren.

D. GEBRUIKSAANWIJZING

- Selecteer de gewenste rijstand.

Let op! Schakel niet van stand terwijl u op een helling rijdt.

- Klap de voetsteun omhoog en ga comfortabel op de zitting zitten. Klap de voetsteun vervolgens terug naar de horizontale stand.

Let op! Gebruik de voetsteun niet als steun bij het gaan zitten of opstaan uit de rolstoel. Hierdoor kan de rolstoel kantelen en omvallen.

- Ga in de rolstoel zitten en schakel het bedieningspaneel in. Het LCD-scherm licht op. De joystick moet in de neutrale stand staan.
- Wees voorzichtig bij het eerste gebruik. Regel snelheid en richting zorgvuldig. De elektromagnetische rem wordt pas vrijgegeven nadat de joystick wordt bewogen (elektrische stand). Beweeg de joystick verder uit de neutrale stand om te versnellen. Doe het tegenovergestelde om te vertragen.
- Laat de joystick los om de rolstoel tot stilstand te brengen. Door op de aan-uitknop te drukken, stopt de rolstoel eveneens.
- Stel met de daarvoor bestemde knoppen op het bedieningspaneel de snelheid van de rolstoel af op de lichamelijke conditie van de gebruiker en de wegomstandigheden.
- Gebruik de rolstoel uitsluitend op vlakke ondergronden. Rijden op modderige of oneffen ondergronden kan het besturingssysteem beschadigen.

6. ONDERHOUDSINFORMATIE

1. Reiniging en onderhoud van de rolstoel

- Het wordt aanbevolen om de constructie en de onderdelen, zoals wielen, frames, kabels, bedieningsmodule en remmen, regelmatig te controleren.
- Versleten of beschadigde onderdelen van de rolstoel moeten worden vervangen. Neem hiervoor contact op met de verkoper.

2. Onderhoud van de batterij:

- 1) Controleer regelmatig het weergegeven batterijniveau. Laad de batterij onmiddellijk op als het niveau zeer laag is om spanningsverlies te voorkomen, aangezien dit de levensduur kan verkorten.
- 2) Als de rolstoel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad de batterij dan ten minste eenmaal per maand op.
- 3) De batterij heeft een beperkte levensduur. Vervang de batterij wanneer deze versleten is.
- 4) Houd de batterij schoon en buiten het bereik van kinderen. Voorkom schokken of beschadiging van de batterij.

- 5) Laad de batterij regelmatig op om de levensduur te verlengen.
- 6) Voer gebruikte batterijen af volgens de plaatselijke milieuvoorschriften.

3. Opslag- en transportomstandigheden

A. TRANSPORT

- Ga voorzichtig te werk tijdens het transport. Gooi het product en de verpakking niet, keer ze niet om en oefen er geen druk op uit.
- Zie voor het inklappen van de *rolstoel „Montage en afstelling”*.

B. OPSLAG

Bewaar de rolstoel in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd hoge temperaturen en snelle temperatuurwisselingen, zuren, basen en bijtende chemicaliën.

C. OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur: -40 [°C] ~ +55 [°C]

Luchtvochtigheid: ≤80%

Luchtdruk: 86 ~ 106 kPa

4. Problemen oplossen

Bij een storing activeert de bedieningsmodule een akoestisch alarm, tenzij het geluid is uitgeschakeld, en knippert de diagnose-led. Het aantal geluidssignalen en ledflitsen geeft het soort probleem aan.

Regelaar	Probleem	Mogelijke oplossing
	De batterijniveau-indicator licht op en de bedieningsmodule geeft zeven geluidssignalen	1. De joystick staat niet in de middenstand. 2. Controleer eerst of de joystick is aangesloten. 3. Koppel de voeding los van de bedieningsmodule. Sluit deze opnieuw aan en controleer of de bedieningsmodule normaal werkt. 1. Neem contact op met de servicedienst van de verkoper als het probleem niet is opgelost.
	De batterijniveau-indicator licht op en de bedieningsmodule geeft twee geluidssignalen	1. De kabel van de linkermotor is niet aangesloten. 2. Controleer of de kabel van de linkermotor in goede staat verkeert en niet loszit of is losgekoppeld. 1. Verwissel de kabels van de linker- en rechtermotor. Na het verwisselen klinken 4 alarmsignalen bij een storing van de linkermotor of 2 alarmsignalen bij een storing van de regelaar. Neem contact op met de servicedienst van de verkoper.

	De batterijniveau-indicator licht op en de bedieningsmodule geeft drie geluidssignalen	1. De linkerrem is niet aangesloten. 2. Controleer of de hendel van de linkerrem in de elektrische stand staat. 3. Controleer of de rem in goede staat verkeert en niet loszit of is losgekoppeld. 4. Verwissel de kabels van de linker- en rechtermotor. Na het verwisselen klinken 5 alarmsignalen bij een storing van de linkerrem of 3 alarmsignalen bij een storing van de regelaar. Neem contact op met de servicedienst van de verkoper.
	De indicatoren voor batterijniveau en snelheid lichten op en de bedieningsmodule geeft drie geluidssignalen	1. Fout in de remconfiguratie 2. Controleer of de hendels van de linker- en rechterrem in de elektrische stand staan. 3. Neem contact op met de servicedienst van de verkoper.
	De batterijniveau-indicator licht op en de bedieningsmodule geeft vier geluidssignalen	1. De kabel van de rechtermotor is niet aangesloten. 2. Controleer of de kabel van de rechtermotor in goede staat verkeert en niet loszit of is losgekoppeld. 3. Verwissel de kabels van de linker- en rechtermotor. Na het verwisselen 1. klinken 4 alarmsignalen bij een storing van de linkermotor of 2 alarmsignalen bij een storing van de regelaar. Neem contact op met de servicedienst van de verkoper.
	De batterijniveau-indicator licht op en de bedieningsmodule geeft vijf geluidssignalen	1. De rechterrem is niet aangesloten. 2. Controleer of de hendel van de rechterrem in de elektrische stand staat. 3. Controleer of de rem in goede staat verkeert en niet loszit of is losgekoppeld. 4. Verwissel de kabels van de linker- en rechtermotor. Na het verwisselen klinken 5 alarmsignalen bij een storing van de linkerrem of 3 alarmsignalen bij een storing van de regelaar. Neem contact op met de servicedienst van de verkoper.
	De batterijniveau-indicator licht op en de bedieningsmodule	Neem contact op met de servicedienst van de verkoper.

	geeft zeven geluidssignalen	
	De batterijniveau-indicator brandt continu rood	1. Probleem met de batterijspanning 2. De batterij moet onmiddellijk worden opgeladen. 3. Storing van de regelaar. Neem contact op met de servicedienst van de verkoper.

5. Garantie-informatie

- Alle door ons bedrijf gedistribueerde producten vallen onder een garantie waarvan de voorwaarden zijn beschreven op de garantiekaart die op onze website beschikbaar is. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht. Bewaar voor garantiedoeleinden het aankoopbewijs (kassabon of factuur). Als klantvriendelijk bedrijf leveren wij uitsluitend producten die zijn getest op materiaal, kwaliteit en functionaliteit. Neem bij vragen over serviceprocedures contact met ons op.
- **De garantie dekt niet:**
 1. **slijtageonderdelen:** bekleding, banden, armleuningen, batterij
 2. **schade als gevolg van** zelf uitgevoerde reparaties, wijzigingen aan de constructie van het product, vallen, transport, onjuist gebruik, het niet opvolgen van de instructies of natuurrampen (brand, aardbeving, overstrooming).



Zhejiang Feilechi Medical Equipment Co., Ltd.

Building 3&4, No. 4 Xinyuan Road, Xinbi Street, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, China



SUNGO Cert GmbH

Harffstr. 47, 40591, Düsseldorf, Germany



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

TIMAGO.COM

+48 33 499 50 00
info@timago.com



06/2026 (I)