

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Douche- en toiletstoel

Productcode: Movano



1. Kenmerken

De douche- en toiletstoel is gemaakt van duurzaam PP (polypropyleen). Hij heeft in hoogte verstelbare aluminium poten met antislip rubberen dopjes. Door de verstelbaarheid kan de stoel worden aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt. De rugleuning en zitting zijn voorzien van een zacht, afneembaar kussen. Zijarmleuningen zorgen voor extra stabiliteit en gebruiksveiligheid. De stoel is uitgerust met een eenvoudig uitschuifbare kunststof opvangbak met deksel.

Set bestaat uit: zitframe, rugleuning, armleuningen (2 stuks), poten met dopjes (4 stuks), zitkussen, rugkussen, toiletemmer met deksel.

Onderdelen van de toiletstoel:

- A. rugleuning
- B. rugleuningkussen
- C. armleuning
- D. zitkussen
- E. zitframe
- F. poot
- G. antislipvoet
- H. afvalbak



2. Toepassing

De douche- en toiletstoel is een hulpmiddel dat de gebruiker helpt bij het uitvoeren van hygiënische activiteiten. Het wordt aanbevolen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig bewegen, met functiestoornissen en bewegingsbeperkingen, waardoor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse

activiteiten wordt verhinderd of bemoeilijkt. De stoel heeft een toiletfunctie dankzij de aanwezigheid van een sanitaire opvangbak onder de zitting. Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de dagelijkse fysiologische en verzorgingsactiviteiten van de gebruiker. De stoel wordt ook aanbevolen voor gebruik in douches en baden, zowel thuis als in ziekenhuizen.

3. Montage, afstelling en gebruik

UITKLAPPEN

Stap 1: Draai het frame van de stoel ondersteboven en steek de poten in de bevestigingsgaten. De poten zijn voorzien van vergrendelingspennen - druk de pen in voordat u de poot erin steekt en vergrendel vervolgens de poot.

Stap 2. Stel de hoogte van de poten af met de verstelpennen.

Stap 3: Draai de stoel rechtop en zet hem op de grond.

Opmerking: Alle vier de poten moeten op dezelfde hoogte worden afgesteld en stevig op de grond rusten voor stabiliteit.

Stap 4: Steek de rugleuning in de bevestigingsgaten in het zitframe (bevestigingspal).

Stap 5: Plaats beide armleuningen in de bevestigingsgaten in het zitframe (bevestigingslip).

Stap 6: Plaats de hygiënische opvangbak met deksel in de opening in het zitframe.

Stap 7: Plaats het rugkussen in de bevestigingsgaten in de rugleuning (3 bevestigingsclips).

Stap 8: Plaats het zitkussen op de zitting van de stoel – dankzij de vorm van het kussen past het gemakkelijk.

HOOGTEVERSTELLING

Om de hoogte van de stoel aan te passen, drukt u op de verstelpennen van de poten, selecteert u de gewenste hoogte en vergrendelt u vervolgens de ingestelde hoogte met de pen. De poten zijn verstelbaar in stappen van 2,5 cm.

Opmerking: alle poten moeten op hetzelfde niveau worden ingesteld en stevig op de grond staan.

GEBRUIK

Til het zitkussen op en verwijder vervolgens het deksel van de opvangbak. Sluit de opvangbak na gebruik met het deksel en plaats het zitkussen op de zitting.

Let op! Vergeet niet de sanitaire container van het toilet na elk gebruik te legen.

4. Technische gegevens

Totale breedte	56 cm
Totale diepte	48 cm
Hoogte rugleuning	35 cm
Zithoogte vanaf de grond	41-53 cm
Totale hoogte vanaf de grond	76-88 cm
Afmetingen zitting	46 cm x 43 cm
Gewicht	5,1 kg
Maximaal draagvermogen	150 kg
Kleur	grijs

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

Zorg ervoor dat de stoel technisch in goede staat blijft:

- Reinig de toiletstoel regelmatig met alleen water en milde reinigingsmiddelen. Droog de stoel grondig af.
- **Gebruik** voor het schoonmaken **geen**: sterke poetsmiddelen en reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Leeg en desinfecteer de opvangbak en de toiletbril na elk gebruik.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)