

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Rolstoel met verstelbare rugleuning

Productcode: NEURO-TIM



### 1. Kenmerken

De verstelbare rolstoel heeft een aluminium frame, versterkt met een dubbele dwarsbalk en voorzien van handringen op de achterwielen. Hij is uitgerust met: een extra horizontale handgreep voor meer veiligheid, een verlengde rugleuning, opklapbare armleuningen, een hoofdsteen met kussen, kantelbeveiligingswielen, een verstelbare (ELR) voetsteun, parkeer- en begeleidersremmen. De hoek van de rugleuning kan worden ingesteld binnen een bereik van 15-70° , terwijl de voetsteun binnen een bereik van 25-90° kan worden verstueld. De rolstoel wordt geleverd met stevige 22-inch achterwielen met snelkoppeling en 8-inch voorwielen met verstelbaar zwaartepunt.

**De set omvat:** frame met zitting, verstelbare voetsteunen, hoofdsteen met kussen, bekleding, kantelbeveiligde wielen met vergrendelingsclips (2 stuks), montagesleutels.

### Onderdelen van de rolstoel:

- A. Hoofdsteen met kussen
- B. Rugleuning
- C. Functie voor het verstellen van de rugleuning
- D. Handgreep met stabiliserende duwstang
- E. Begeleidersrem
- F. Vergrendelingspen voor armleuningen
- G. Handrem
- H. Achterwielen van 22 inch met snelontgrendeling en handringen
- I. Voorwielen van 8 inch met zwaartepuntverstelling en schokdempers
- J. Voetsteunplaat
- K. Voetsteunhendel
- L. Kuitkussen
- M. Zitting\*
- N. Armleuning
- O. Anti-kantelwiel



\* verkrijgbaar in 46 of 48 cm

## 2. Toepassing

De rolstoel is ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig verplaatsen en voor patiënten met functiebeperkingen en verminderde mobiliteit. Deze zelfrijdende rolstoel kan ook door een begeleider worden voortgeduwd. De rolstoel is geschikt voor gebruik binnen en buiten. Hij wordt met name aanbevolen voor mensen die mobiliteitsproblemen hebben als gevolg van: verlamming, hersenverlamming, ledemaatletsel of amputaties, degeneratie of misvorming van ledematen, hart- en vaatziekten, circulatiestoornissen, overgewicht of abnormaal ondergewicht.

## 3. Montage

### UITKLAPPEN EN MONTAGE

#### Stap 1. De rolstoel uitklappen

Plaats de rolstoel op de grond. Pak de rolstoel bij de armleuningen vast en klap hem uit. Druk vervolgens op het midden van de zitting zodat alle onderdelen in elkaar vallen. Druk de stabilisatiestang achter de rugleuning (afbeelding 1) naar beneden totdat u een klikgeluid hoort.



Afbeelding 1

#### Stap 2. Montage van de voetsteunen

Bevestig de voetsteun aan de buitenkant van het frame. Draai de voetsteun vervolgens naar binnen totdat deze vastklikt.

#### Stap 3. Afstelling van de voetsteunen

- Stel de hellingshoek van de voetsteun met de hand af. Om de voetsteunen lager te zetten, drukt u op de hendel op het frame (K).
- Stel de voetsteunplaten af met behulp van de schroef op de buis. Er moet voldoende ruimte overblijven tussen de voetsteunplaten en de grond, aangezien te laag ingestelde voetsteunplaten problemen kunnen

veroorzaken bij het beklimmen van hellingen en stoepranden. Stel de voetsteunplaten zo af dat de hoek tussen de romp en de dijen<sup>90°</sup> is (optimale zitpositie voor de gebruiker).

#### **Stap 4. Afstelling van de kantelbeveiligingswielen**

Om de kantelbeveiligingswielen te installeren, duwt u ze in de openingen aan de achterzijde van de rolstoel en zet u ze vast met de vergrendelingsclips. Om ze af te stellen, verwijdert u de vergrendelingsclip, kiest u de juiste lengte en zet u ze daarna vast.

#### **Stap 5. Montage van de hoofdsteun**

Bevestig de hoofdsteun aan de rugleuning door deze in de bevestigingsopeningen te steken. Druk vervolgens op de vergrendelingspennen aan de binnenkant van het frame en duw de hoofdsteun naar beneden tot u een klikgeluid hoort.

#### **Stap 7. Montage van de bekleding**

Plaats de bekleding op de zitting en zet deze vast met klittenband.

**De rolstoel is klaar voor gebruik.**

### **OPVOUWEN**

De rolstoel kan worden ingeklapt voor gemakkelijker transport en opslag.

- Zwaai de voetsteunen weg en zet ze in een verticale positie, of verwijder ze volledig.
- Maak de bekleding en de hoofdsteun los.
- Druk de rode schakelaar op de duwstang achter de rugleuning in (zie afbeelding 1) om de stang in te klappen.
- Trek de zitting vanaf de voor- en achterkant omhoog om de rolstoel in te klappen.

### **PARKEERREM**

- Om de wielen te vergrendelen, duwt u de parkeerhendel naar voren totdat het wiel volledig is geblokkeerd (afzonderlijk voor het linker- en rechterwiel). Houd er rekening mee dat de parkeerrem alleen dient om de wielen te vergrendelen wanneer de rolstoel volledig stilstaat.
- De begeleidersremmen zijn uitgerust met parkeerremmen. Om deze te gebruiken, trekt u aan de parkeerremhendels (E). Om de rem te ontgrendelen, drukt u op de rode schakelaar onder de hendels.

### **AFSTELLING VAN DE PARKEERREM**

De goede werking van de parkeerrem hangt af van de afstelling en de positie ervan. De rem moet op voldoende afstand van het achterwiel worden

gemonteerd, zodat deze stevig wordt geblokkeerd en de hendel geen overmatige weerstand ondervindt.

- Bij te veel weerstand moet u de parkeerrem met behulp van de stelschroeven naar voren verplaatsen. Stel de parkeerrem zo af dat deze de wielen gemakkelijk en zonder overmatige weerstand blokkeert.
- Wanneer de parkeerrem het wiel niet goed raakt of blokkeert, volg dan de bovenstaande instructie door de hendel in de tegenovergestelde richting te bewegen.

## **BIJREMMEN**

De remhendels bevinden zich achter de rugleuning, onder beide handgrepen. Om de rolstoel tot stilstand te brengen, trekt u aan de remhendel. Om de rem los te laten, laat u de hendel los. Voer deze handeling soepel en met de juiste kracht uit.

## **INSTELLING VAN DE HOEK VAN DE RUGLEUNING EN DE VOETSTEUN**

- De rugleuning kan worden versteld van 15 tot  $70^{\circ}$  door de hendels (C) boven de handgrepen in te drukken.
- De voetsteunen kunnen worden versteld van 25 tot  $90^{\circ}$ . Trek de voetsteun omhoog of laat deze zakken door op hendel (K) naast het kuitkussen te drukken.

## **INSTELLING VOOR PATIËNTEN NA AMPUTATIE VAN DE ONDERSTE LEDEMATEN**

**Let op!** Vraag voor een professionele afstelling uw verkoper of iemand anders met de juiste kennis en kwalificaties. Pas de hellingshoek van de zitting niet zelf aan.

- Om het zwaartepunt (voor) aan te passen, draait u de bevestigingsschroef op het rechter- en linkerwiel los. Stel vervolgens de zittinghelling in door de bevestigingsas van het wiel omhoog of omlaag te bewegen, op dezelfde manier bij beide wielen.
- De zithoek moet zo worden ingesteld dat de gebruiker niet uit de rolstoel glijdt en de handringen vrij kan gebruiken.

## **4. Technische gegevens**

Totale breedte	67 cm
Afmetingen zitting	46/48 x 42 cm
Hoogte armleuning vanaf de zitting	24 cm

Totale diepte	113 cm
Zithoogte vanaf de grond	50 cm
Totale hoogte	130 cm
Gewicht	17,50 kg
Max. draagvermogen	120 kg
Afmetingen in opgevouwen toestand	88 x 33 x 94 cm
Kleur frame	zwart

## 5. Opmerkingen

**Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.**

## 6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De bekleding en het kussen kunnen worden gereinigd met een vochtige (niet natte) doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een spons. Maak de bekleding niet te nat. Laat drogen uit de buurt van warmtebronnen.
- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek, eventueel met behulp van geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof. Volg in dat geval de instructies van de fabrikant en de veiligheidsmaatregelen.

## 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










## 8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

## 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

## 10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!





**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



05/2026(I)