



# NEXO

DOUCHE- EN TOILETSTOEL

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

### 1. Kenmerken

De douche- en toiletstoel is gemaakt van duurzaam, waterbestendig materiaal. Hij heeft in hoogte verstelbare aluminium poten met antislip rubberen dopjes. De rugleuning en zitting kunnen extra worden voorzien van zachte, gewatteerde kussens. Opklapbare armleuningen zorgen voor veel meer stabiliteit en helpen de patiënt bij het opstaan uit de stoel. De stoel wordt geleverd met een afneembare kunststof opvangbak met deksel.

**Set bestaat uit:** stoelframe, zit- en rugkussens, toiletemmer met deksel.

#### Onderdelen van de toiletstoel:

- A. Gewatteerde rugleuning
- B. Opklapbare armleuning
- C. Zitting met gewatteerd kussen en wig
- D. Afvalbak
- E. Voorframe
- F. Hoogteverstelling
- G. Antislip rubberen dop
- H. Scharnier



### 2. Toepassing

De douche- en toiletstoel is een hulpmiddel dat de gebruiker ondersteunt bij het uitvoeren van hygiënische activiteiten. Het wordt aanbevolen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig bewegen, met functiebepervingen en bewegingsbepervingen, waardoor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten wordt verhinderd of bemoeilijkt. De stoel heeft een toiletfunctie dankzij de aanwezigheid van een opvangbak onder de zitting. Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de dagelijkse fysiologische en verzorgingsactiviteiten van de gebruiker. De stoel wordt ook aanbevolen voor gebruik in douches en baden, zowel thuis als in ziekenhuizen.

### 3. Montage, afstelling en gebruik

## UITKLAPPEN

**Stap 1:** Haal de stoel uit de doos.

**Stap 2:** Pak de stoel vast bij de achterkant van de zitting (C) en de rugleuning (A) en klap hem langzaam uit totdat de scharnieren (H) volledig zijn uitgeklapt.

**Stap 3:** Stel de hoogte van de poten af met de vergrendelingspennen.

**Stap 4:** Haal de rugleuning- en zitkussens uit de doos. Verwijder de beschermfolie van de achterkant en plak ze op de rugleuning en de zitting.

**Let op!** De kussens zijn optionele accessoires die bij de stoel worden geleverd en zijn niet noodzakelijk voor het gebruik.

**De stoel is klaar voor gebruik.**

## INKLAPPEN

Herhaal de handelingen uit het gedeelte "UITKLAPPEN", te beginnen bij de laatste.

## HOOGTEVERSTELLING

Om de hoogte van de stoel aan te passen, drukt u op de vergrendelingspennen aan de poten, selecteert u de gewenste hoogte en vergrendelt u deze vervolgens met een pen. De poten zijn verstelbaar in stappen van 2,5 cm.

**Opmerking:** Alle poten moeten op dezelfde hoogte zijn ingesteld en stevig op de grond staan.

## GEBRUIK

- Til het zitkussen op en verwijder de wig. Schuif de opvangbak onder de zitting. Zorg ervoor dat het deksel van de opvangbak is verwijderd voordat u de stoel gebruikt. Dek de opvangbak na gebruik af met het deksel en plaats de wig terug op de zitting.

**Let op!** Vergeet niet de sanitaire container na elk gebruik te legen.

- Verwijder de hygiënecontainer wanneer u de stoel in de douche gebruikt. De wig kan ook worden verwijderd.
- De stoel kan worden gebruikt als toiletverhoger. Verwijder de hygiënecontainer en de wig en plaats de stoel over het toilet. Veeg na gebruik het zitvlak schoon en laat het drogen.

## 4. Technische gegevens

<b>Totale breedte:</b> 54 cm	<b>Gewicht:</b> 4,83 kg
<b>Totale hoogte:</b> 78-85	<b>Kleur frame:</b> wit
<b>Zithoogte vanaf de grond:</b> 43-51 cm	<b>Afmetingen zitting:</b> 42 x 38 cm
<b>Maximaal draagvermogen:</b> 136 kg	

## 5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

## 6. Onderhoud

Controleer regelmatig de technische staat van de stoel:

- Reinig de toiletstoel regelmatig met alleen water en milde reinigingsmiddelen. Droog de stoel grondig af.
- **Gebruik** voor het reinigen **geen**: sterke polijstmiddelen en reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Leeg en desinfecteer de opvangbak en de zitting na elk gebruik.

## 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.







## 8. Garantie-informatie




Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

## 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

## 10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel

	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.  
Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft  
gekozen!







**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)

