

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Douche- en toiletverplaatsstoel 3-in-1

Productcode: SANI-TIM

### 1. Kenmerken

De douche- en toiletrolstoel is gemaakt van een gepoedercoat aluminium frame. Hij is voorzien van opklapbare armleuningen voor gemakkelijk in- en uitstappen voor mensen met beperkte mobiliteit. Hij is uitgerust met een zitting met wig van PU en afneembare voetsteunen. De stoel heeft ook een handgreep voor de begeleider en een sanitaire opvangbak. Door de constructie van de rolstoel kan deze over de toiletbril worden geschoven.

**De rolstoel is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:**


- op kleine wielen (5"),
- op kleine wielen (5") met een extra set 24" achterwielen met snelkoppelingsmechanisme,

**De set bestaat uit:** linker- en rechterframe van de stoel met wielen, rugleuning met armleuningen, zitting met wig, rechter- en linkervoetsteun, toiletbak met deksel, bovenste en onderste voorste verbindingbuis, achterste verbindingbuis, schroeven met dopjes (6 stuks), vergrendelknoppen (2 stuks), inbusleutel.

**Bovendien voor versie 24":** wielen 24" (2 stuks) en snelontgrendelingsmechanisme (2 stuks), handrem (2 stuks)

### Onderdelen van de stoel:

- A. Handgreep
- B. Rugleuning
- C. Armleuning
- D. Zitting
- E. Sanitairreservoir
- F. Voetensteun
- G. Vergrendeling voor opklapbare armleuningen
- H. Parkeerrem
- I. 5" wiel met rem
- J. Achterwiel van 24 inch  
Met handringen
- K. Snelontgrendelingsmechanisme  
mechanisme

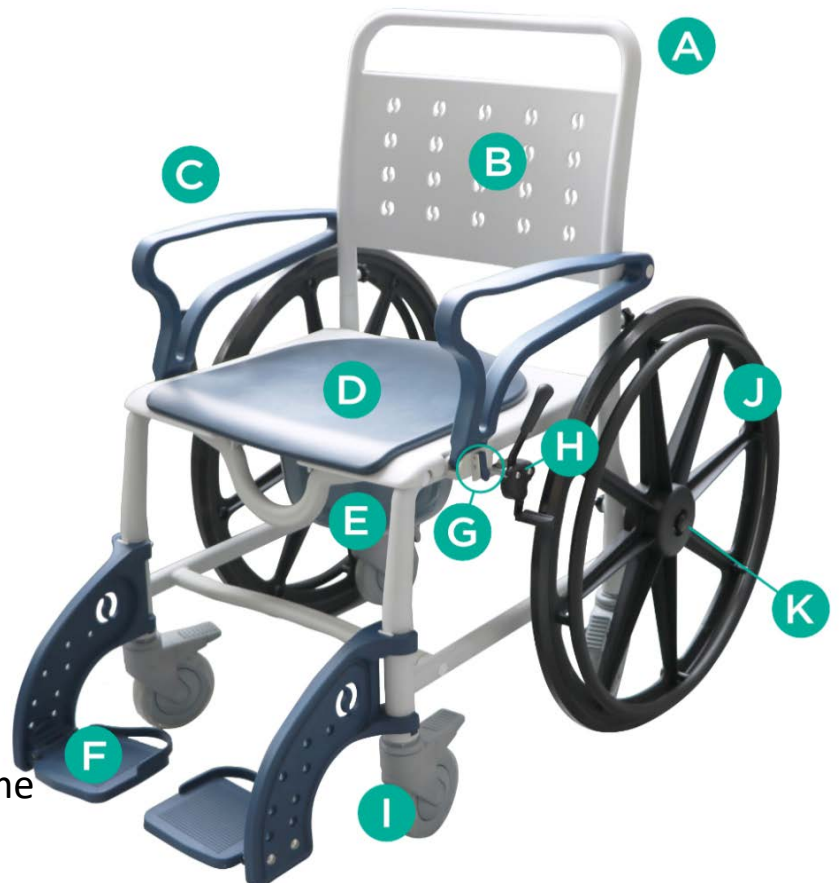


## 2. Toepassing

Douche- en toiletrolstoelen zijn ontworpen voor personen die moeite hebben met zelfstandig bewegen, evenals voor patiënten met functiebeperkingen of verminderde mobiliteit. De rolstoel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Dankzij een vochtbestendig aluminium frame en een sanitaire opvangbak onder de zitting dient hij zowel als douche- als toiletrolstoel. Dit vergemakkelijkt de dagelijkse hygiëneroutines. De rolstoel wordt met name aanbevolen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen als gevolg van aandoeningen zoals verlamming, obesitas of extreem ondergewicht, misvormingen of degeneratieve aandoeningen van ledematen, gewrichtsdegeneratie of -letsel, ledemaatletsel of -amputaties, en hart- en vaat- of circulatiestoornissen.


## 3. Montage

1. Om te voorkomen dat het frame van de rolstoel tijdens de montage verschuift, moet u de remmen vergrendelen door de remhendels naar beneden te drukken.
2. Verbind het rechter- en linkerframe met buizen met behulp van schroeven en een inbussleutel (afbeelding 1). Plaats daarna de doppen op de bevestigingsopeningen (afbeelding 2).

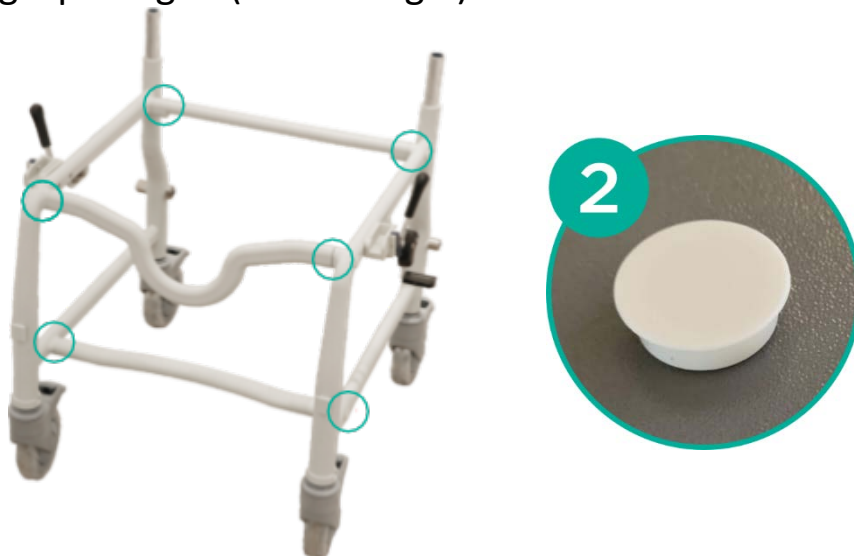

3. Installeer de zitting bovenop het frame. Schuif de hygiënische opvangbak vanaf de achterkant onder de zitting.
4. **Montage van de achterwielen 24"**: Steek het snelspanningsmechanisme (K) in de opening voor het achterwiel. Zorg ervoor dat de middelste ring in de opening zich in de middenstand bevindt en de opening niet blokkeert (afbeelding 3 en 4). Plaats het mechanisme in de opening en druk tegelijkertijd op de zwarte dop (afbeelding 5). Nadat het mechanisme op het wiel zit, plaatst u het in de opening aan de achterkant van het frame van

de stoel en drukt u opnieuw op de zwarte dop. Een correct gemonteerd mechanisme moet door de opening aan de andere kant van de framebuis steken (afbeelding 6). Herhaal dit aan de andere kant.

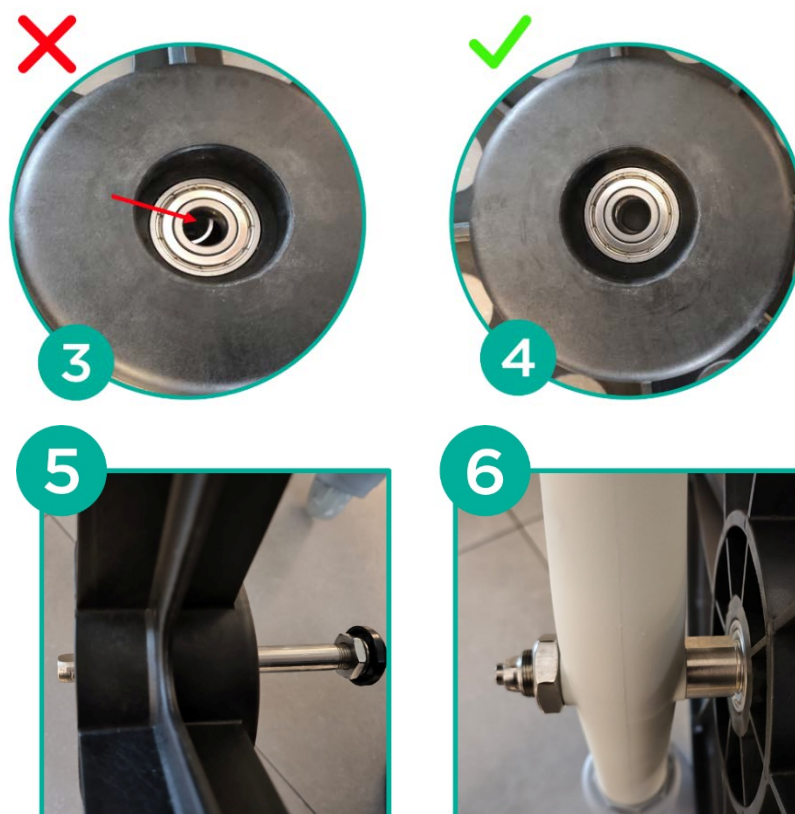

5. Plaats de rugleuningbuizen op het stoelframe en zet ze vast met de vergrendelknoppen. Druk op de vergrendeling van de arMLEUNINGEN en laat de arMLEUNINGEN zakken totdat ze op hun plaats vastzitten.
6. Bevestig de voetsteun aan de voorste frame-elementen (afbeelding 2).



## OMGAAN MET DE ROLSTOEL

- Controleer de staat van de parkeerremmen, de constructie en de zwenkwielen. Controleer of de onderdelen correct zijn gemonteerd en afgesteld.
- Zorg er vóór gebruik voor dat de breedte van de rolstoel bij de gebruiker past, aangezien de rolstoel niet is uitgerust met een breedteverstelling.

- De rolstoel is ontworpen voor gebruik over korte afstanden en uitsluitend binnenshuis. De rolstoel heeft geen schokdempers, dus langdurig gebruik wordt afgeraden.

**LET OP!** Gebruik de rolstoel niet als u defecten of gebreken constateert.

### **OPKLAPFUNCTIE VAN DE ARMLEUNINGEN**

- Druk op de vergrendeling (G) onder de armleuning en til de armleuning met een zachte beweging omhoog.
- Gebruik de armleuning **niet** als steun bij het opstaan. Vraag om hulp als u die nodig heeft.

### **SNELVERGREDELING VAN DE ACHTERWIELEN VAN 24 INCH**

- De 24-inch achterwielen kunnen eenvoudig worden verwijderd dankzij de snelontgrendelingsfunctie, waardoor de stoel kan worden gebruikt als douche- of toiletstoel. Om de achterwielen te verwijderen, drukt u op de zwarte kap van het snelontgrendelingsmechanisme (K) op het wiel en haalt u het eruit.
- Om het wiel weer te monteren, drukt u op de zwarte kap van het mechanisme en plaatst u het terug in de opening op het achterframe.

### **REMMEN**

- Om de voorste zwenkwielen te vergrendelen, drukt u met uw voet op de pedalen. Om het wiel te ontgrendelen, tilt u het pedaal op.
- Om het achterwiel te vergrendelen, trekt u de parkeerremhendel naar voren. Om het wiel te ontgrendelen, trekt u de remhendel in de tegenovergestelde richting.

### **IN DE ROLSTOEL STAPPEN**

- Het is essentieel om de remmen te vergrendelen tijdens het in- of uitstappen, het veranderen van de positie van de gebruiker of het uitstappen.
- Tijdens het wisselen van plaats moet de rolstoel zo dicht mogelijk bij de plaats van de transfer staan. De rolstoel moet het bed of de andere stoel raken die wordt gebruikt. Als de gebruiker niet zelfstandig van stoel kan wisselen, breng de gebruiker dan naar de rolstoel.
- De gebruiker moet zo diep mogelijk in het midden van de zitting zitten om instabiliteit van de stoel te voorkomen.
- **Ga niet** op de voetsteun **staan** bij het in- of uitstappen. Dit kan schade veroorzaken.

#### 4. Technische gegevens

MODEL	SANI-TIM 5"	SANI-TIM 24"
Totale breedte	58 cm	68,5 cm
Binnenbreedte	50 cm	
Totale diepte	76 cm	104 cm
Zithoogte vanaf de grond	50 cm	52 cm
Totale hoogte	98 cm	100 cm
Afmetingen zitting	50 x 45 cm	
Gewicht	14,50 kg	22 kg
Voorwielen	5" zwenkwielen	
Achterwielen	5" zwenkwielen	5" zwenkwielen + 24" met snelontgrendelingsmechanisme en handringen
Max. draagvermogen	120	

#### 5. Opmerkingen

**Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product en het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.**

#### 6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De zitting kan worden gereinigd met een vochtige doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen met een spons worden verwijderd.
- Kunststof onderdelen moeten worden schoongemaakt met een vochtige doek en geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof. Volg daarbij de instructies van de fabrikant en neem de veiligheidsmaatregelen in acht.
- Maak de toiletemmer en de toiletbril na elk gebruik leeg en desinfecteer ze. Gebruik reinigingsmiddelen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

## 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










## 8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

## 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

## 10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!





**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)

