

GEBRUIKERSHANDLEIDING


Verstelbare aluminium wandelstok met zitje

Productcode: SeatTim



1. Kenmerken

De wandelstok met zitje bestaat uit een ergonomische handgreep, een hoogwaardige aluminium schacht en een antislip rubberen punt. Uitgerust met een zitje dat wordt ondersteund door drie poten, waardoor de gebruiker veilig en comfortabel kan uitrusten. Dankzij de hoogteverstelling is hij zeer geschikt voor dagelijks gebruik.

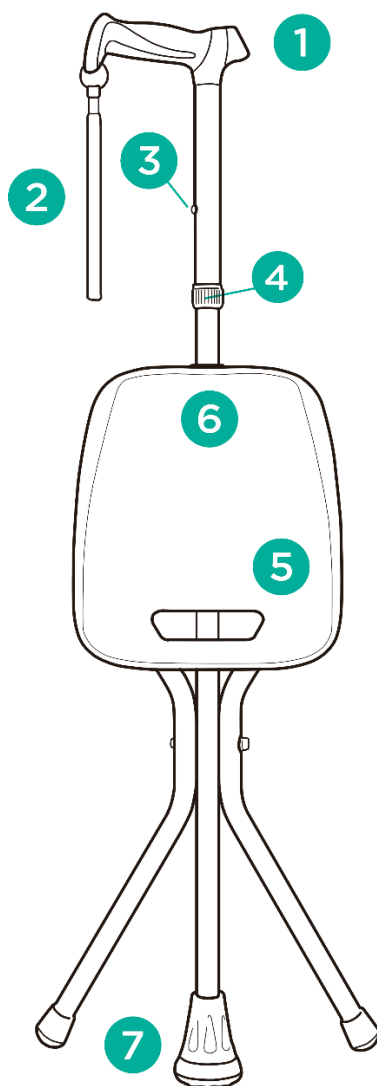

- 1. handgreep
- 2. polsband
- 3. hoogteverstelling
- 4. vergrendeling
- 5. handgreep
- 6. drukpunt
- 7. antislip rubberen dop

2. Toepassing

De wandelstok is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het steunvlak te vergroten bij patiënten met verminderde mobiliteit. Het wordt ook aanbevolen aan patiënten die hulp en ondersteuning nodig hebben tijdens het lopen en het

kan ook worden gebruikt als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren na letsel aan de onderste ledematen of de romp.

Contra-indicaties: coördinatie- en evenwichtsstoornissen, vergevorderde reumatische veranderingen, letsels en functiestoornissen van de bovenste ledematen die de gebruiker kunnen beletten zich op de wandelstok te steunen.

3. Instellen

- Om de wandelstok in te stellen, draait u de verstelvergrendeling los en drukt u op de vergrendelingspen. Kies de juiste lengte en vergrendel de pen, waarna u de verstelvergrendeling weer vastdraait. De wandelstok is in stappen van 2,5 cm verstelbaar.
- Om de zitting uit te klappen, pakt u de handgreep van de zitting vast en trekt u deze omhoog. Druk op de zitting aan de andere kant (drukgebied) om ervoor te zorgen dat deze volledig is uitgeklappt.
- Om de stoel in te klappen, herhaalt u de handelingen in omgekeerde volgorde.
- Om de juiste lengte van de wandelstok in te stellen, gaat u rechtop staan en buigt u de bovenarm in het ellebooggewricht in een hoek van 20°.
- De wandelstok moet individueel op de gebruiker worden afgesteld, zodat de handgreep zich ter hoogte van het heupgewricht bevindt.
- Controleer voor gebruik of de wandelstok stabiel staat en of de vergrendelingspen volledig door het verstelgat van de wandelstok steekt.

LET OP! Raadpleeg bij twijfel over de techniek van het lopen met de wandelstok iemand met de juiste kennis of kwalificaties.

4. Technische gegevens

Type wandelstok	verstelbaar, met zitting
Hoogteverstelling	86-96 cm
Max. draagvermogen	159 kg
Gewicht	1 kg
Kleur	zwart

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Reiniging en onderhoud

- Reinig de wandelstok uitsluitend met water en milde reinigingsmiddelen, droog hem grondig af.
- **Gebruik geen:** sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Het wordt aanbevolen om de rubberen dop regelmatig te controleren. Vervang een versleten dop onmiddellijk.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)