

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Badkameropstapje

Productcode: StepTim




1. Kenmerken

De badkameropstap is gemaakt van duurzaam aluminium en vochtbestendig PE-materiaal. Hij heeft in hoogte verstelbare poten en speciale rubberen dopjes die voor meer stabiliteit zorgen.

De set bevat: framedelen (2 stuks), bevestigingsbuizen (2 stuks), poten met antislipdoppen (4 stuks), opstapje (basis), bevestigingsschroeven (2 stuks).

Onderdelen van de opstap:

- A. Opstapje (basis)
- B. Poten met hoogteverstelling
- C. Antislipdoppen
- D. Bevestigingsschroef
- E. Frame

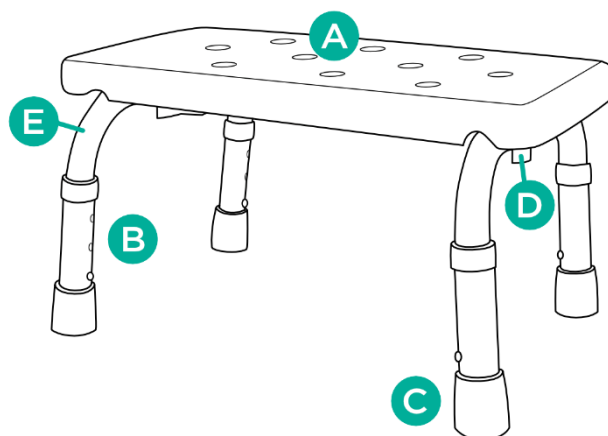

2. Toepassing

De badkameropstap is een hulpmiddel dat de gebruiker helpt bij het uitvoeren van hygiënische handelingen. De opstap wordt aanbevolen voor mensen met beperkte mobiliteit, waardoor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zonder hulp bemoeilijkt wordt. Het wordt aanbevolen voor gebruik in de badkamer en andere vochtige ruimtes, zowel thuis als in het ziekenhuis.

3. Montage

Stap 1. Verbind de bevestigingsbuizen met de frameonderdelen met behulp van borgpennen.

Stap 2. Bevestig de framedelen met montageschroeven aan de onderkant van de opstap.

Stap 3. Bevestig de poten aan het frame en zet ze vast met borgpennen op de gewenste hoogte. Zorg ervoor dat alle poten op dezelfde hoogte staan.

HOOGTEVERSTELLING

Om de hoogte aan te passen, drukt u op de borgpen, kiest u de gewenste hoogte en vergrendelt u deze opnieuw met de pen. Alle poten moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

4. Technische gegevens

Hoogteverstelling	23-28 cm
Totale breedte	27 cm
Totale lengte	41 cm
Max. draagvermogen	150 kg

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

Reinig de opstap regelmatig met alleen water, een spons en milde reinigingsmiddelen voor kunststof, zoals zeep. Droog de opstap grondig af.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)