

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aluminium rolstoel

Productcode: T101



1. Kenmerken

De rolstoel is gemaakt van een lichtgewicht aluminium frame, verstevigd met een dwarsbalk. Hij is voorzien van een zitvlak van nylon en katoen met een extra kussen en een veiligheidsgordel voor de gebruiker. De rolstoel is uitgerust met een snelontgrendelingsstelsel, kantelbeveiligde wielen, een neerklapbare rugleuning, voorgevormde opklapbare armleuningen, begeleidersremmen en wegklapbare voetsteunen. De rolstoel wordt geleverd met lucht- of massieve 24-inch achterwielen met handringen, evenals 8-inch massieve rubberen voorwielen. Voor patiënten na amputaties is het mogelijk om het zwaartepunt op zowel de voor- als achterwielen aan te passen. De rolstoel is ook uitgerust met begeleidersremmen voor de verzorger.

De set bestaat uit: frame met zitting, voetsteunen met voetplaten, veiligheidsriemen, veiligheidsgordel, montagesleutels.

Onderdelen van de rolstoel:

- A. Handgreep
- B. Begeleidersrem
- C. Armleuning
- D. Opklapbare handgreep op de armleuning
- E. Handrem
- F. Handgreep
- G. Handgreep
- H. Voetsteun
- I. Voetsteunhendel
- J. Verstelling van het zwaartepunt
- K. Wielen met kantelbeveiliging
- L. Mechanisme voor het neerklappen van de rugleuning



2. Toepassing

De rolstoel is ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig verplaatsen en voor patiënten met functiebeperkingen en verminderde mobiliteit. Deze zelfrijdende rolstoel kan ook door een begeleider worden voortgeduwd. De rolstoel is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

3. Montage

Stap 1. De rolstoel uitklappen

Zet de rolstoel op de grond. Klap de rolstoel uit met behulp van de handgrepen aan de rugleuning. Druk vervolgens op de rand van de zitting zodat alle onderdelen goed in elkaar klikken.

Stap 2. Montage van de voetsteunen

Monteer de rechter en de linkervoetsteun. Plaats het montage-element in de opening aan de voorkant van het frame en draai de voetsteun naar binnen totdat de voetsteunhendel vergrendeld is. De voetsteunplaten zijn voorzien van riemen om te voorkomen dat de voeten van de voetsteunen glijden.

Stap 3. Afstelling van de voetplaten

Stel de rechter en de linkervoetplaat af door de schroef in het juiste bevestigingsgat vast te draaien. Er moet voldoende ruimte worden gelaten tussen de voetplaten en de grond, aangezien te laag geplaatste voetplaten problemen kunnen veroorzaken bij het nemen van obstakels zoals stoepranden. Stel de voetplaten zo af dat de hoek tussen de romp en de dijen^{90°} is (de gebruiker zit dan in de optimale zitpositie).

Stap 4. Afstelling van de kantelbeveiligingswielen

Om de kantelbeveiligingswielen aan de achterzijde van de rolstoel af te stellen, trekt u de vergrendeling, beweegt u de wielen omhoog of omlaag en kiest u de juiste hoogte.

Stap 5. Controle van de montage van de wielen

Til de rolstoel iets op en draai het rechterwiel en vervolgens het linkerwiel door aan de handringen te trekken en controleer of de wielen goed draaien.

De rolstoel is klaar voor gebruik.

OPVOUWEN

De rolstoel kan opnieuw worden ingeklapt om hem gemakkelijker te vervoeren en op te bergen. Zwaai de voetsteunen weg en zet ze in verticale positie of verwijder ze. Maak de bekleding van de zitting en rugleuning los met de tas. Til de zitting omhoog door deze aan de achter- en voorkant vast te pakken totdat het frame van de rolstoel is ingeklapt.

OPKLAPFUNCTIE VAN DE ARMLEUNINGEN

- Om de armleuning omhoog te klappen, drukt u de hendel aan de voorkant van de armleuning in en klapt u deze weg.
- Om de armleuning te sluiten, drukt u deze naar beneden en trekt u vervolgens de vergrendeling omhoog.

DE BANDEN OP POMPEN

- Als de rolstoel is uitgerust met luchtbanden of massieve achterwielen met een diameter van 24 inch en zwenkwielen, en PU-voorwielen met een diameter van 8 inch (tubeless banden). Vergeet niet de bandenspanning in beide wielen te controleren (versie met luchtbanden) en de staat van de banden te controleren op slijtage, sneden of beschadigingen aan het oppervlak.
- Om de luchtdruk in de wielen gelijk te maken, draait u de dop van het ventiel los, steekt u de pomp in het ventiel (meegeleverd in de set) en pompt u de lucht erin.

OPVOUWBARE RUGLEUNING

- Om de rugleuning in te klappen, trekt u tegelijkertijd de inklapmechanismen onder de handgrepen aan de achterzijde naar beneden.

PARKEERREM

Om de wielen te vergrendelen, duwt u de hendel naar voren totdat het wiel volledig is geblokkeerd (afzonderlijk voor het linker- en rechterwiel). Houd er rekening mee dat de parkeerrem alleen dient om de wielen te vergrendelen wanneer de rolstoel volledig tot stilstand is gekomen.

AFSTELLING VAN DE PARKEERREM

De juiste vergrendeling van de parkeerrem hangt af van de afstelling en de positie ervan. De hendel van de wielvergrendeling moet zo worden geplaatst dat de remschoen het wiel stevig blokkeert en de hendel geen overmatige weerstand ondervindt.

- In geval van overmatige weerstand trekt u de hendel iets naar voren door de borgschroeven op de parkeerrem los te draaien. Stel de remschoen zo af dat deze het wiel gemakkelijk blokkeert zonder overmatige weerstand.
- Wanneer de parkeerremschoen het wiel niet voldoende raakt of blokkeert, volg dan de bovenstaande instructie door de hendel in de tegenovergestelde richting te bewegen.

VEILIGHEIDSGORDEL

De riem, die bij de standaarduitrusting is inbegrepen, beschermt de romp in gevallen waarin de gebruiker uit de rolstoel glijdt of niet in staat is om zelfstandig de juiste houding aan te nemen.

BEGELEIDERSREMMEN

De hendels van de remmen bevinden zich achter de rugleuning, onder beide handgrepen.

- Om de rolstoel tot stilstand te brengen, knijpt u in de hendel van de remgreep. Om de rem los te laten, laat u de hendels los. Voer deze handeling soepel en met de juiste kracht uit.
- De remmen zijn voorzien van parkeerremmen. Om deze te gebruiken, drukt u de bovenste hendel van de remhendel in tot u een klikgeluid hoort. Om de parkeerremmen los te maken, drukt u de onderste hendel van de remhendel in.

AANPASSING VOOR PATIËNTEN NA AMPUTATIES IN HET GEBIED VAN DE ONDERSTE LEDEMATEN

Let op! Vraag voor een professionele afstelling uw verkoper of iemand anders met de juiste kennis en kwalificaties. Pas de hellingshoek van de zitting niet zelf aan.

- Om het zwaartepunt aan te passen, draait u de bevestigingsschroef in het rechter- en linkerwiel los. Stel vervolgens de zittinghelling in door de bevestigingsas van het wiel omhoog of omlaag te verplaatsen, op dezelfde manier bij beide wielen.
- De zithoek moet zo worden ingesteld dat de gebruiker niet uit de rolstoel glijdt en de handringen vrij kan gebruiken.

4. Technische gegevens

Parameter	Uitvoering met luchtbanden	Uitvoering met massieve wielen
Totale breedte	61/63/65/67/69 cm*	61/63/65/67/69/76 cm*
Binnenbreedte	41/43/46/48/51 cm*	41/43/46/48/51/56 cm*
Totale diepte	107 cm	107 cm
Zithoogte vanaf de grond	50 cm	50 cm
Totale hoogte	95 cm	95 cm
Afmetingen zitting	41/43/46/48/51 x 42 cm*	41/43/46/48/51/56 x 42 cm*

Gewicht	15,5/16/16,5/17/17,5 kg*	15,5/16/16,5/17/17,5/18,5 kg*
Type dwarsbalk	enkele dwarsbalk	dubbele dwarsbalk
Max. draagvermogen	125 kg	136 kg
Breedte ingeklapt	30 cm	30 cm
Kleur frame	zwart	zwart

* afhankelijk van de zitbreedte

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en verkeerd gebruik.

6. Onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De bekleding en het kussen kunnen worden gereinigd met een vochtige (niet natte) doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een spons. Maak de bekleding niet te nat. Laat drogen uit de buurt van warmtebronnen.
- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek, eventueel met behulp van geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof onderdelen. Volg in dat geval de instructies van de fabrikant en de veiligheidsmaatregelen.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)