

GEBRUIKSAANWIJZING

Kniebrace met patellastabilisator

Productcode: TGO-C SR 501



1. Kenmerken

De kniebrace met patellastabilisator is gemaakt van elastisch materiaal dat uitstekende eigenschappen heeft op het gebied van luchtdoorlatendheid en vochtafvoer. In het midden van de brace bevindt zich een opening met een schuimring die de brace op zijn plaats houdt en de patella ontlast. De brace is bovendien voorzien van laterale spiraalvormige steunen die zorgen voor stevige en stabiele bewegingen bij het buigen en strekken van het kniegewricht. De anatomische vorm zorgt ervoor dat de brace goed aansluit.

2. Toepassing

De kniebrace kan worden gebruikt bij preventieve behandeling en bij revalidatie na een blessure om het bewegingsbereik van het kniegewricht te beperken en de functionele activiteiten te verbeteren. De brace ontlast de knieschijf, stabiliseert de knie en begeleidt de flexie- en extensiebewegingen, waarbij zijwaartse bewegingen in het instabiele gewricht worden beperkt.

Indicaties voor gebruik:

- Pathologische veranderingen van de knieschijf
- Reumatoïde ontstekingen van het kniegewricht
- Patella-apexsyndroom
- Luxatie van de patella
- Lichte ligamentletsels
- Preventieve behandeling van overbelasting en blessures
- Reuma

Contra-indicaties:

Niet gebruiken bij:

- Huidschaafwonden
- Eczeem
- Wonden en andere huidletsels
- Na het aanbrengen van een verwarmende gel of zalf
- Individuele contra-indicaties die door de arts zijn vastgesteld tijdens het consult en het lichamelijk onderzoek

3. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

4. Aanwijzingen voor het aanbrengen

- Trek de elastische bandage vanaf de onderkant naar het kniegewricht, zodat de opening met de schuimring op het midden van de knieschijf komt te liggen en de zijdelingse steunen zich in de as van het gewricht bevinden, vanaf de laterale en mediale zijden.
- Maak de bovenste band vast met klittenband.
- Knip met een schaar het uiteinde van het klittenband op de juiste lengte af, zodat het gemakkelijk aan de orthese kan worden bevestigd.

Let op! Alleen de juiste maat garandeert een correcte stabilisatie van het kniegewricht en ontlasting van de knieschijf.

Let op! Langdurig gebruik kan leiden tot vermindering van de spiertonus en disfunctie van de onderste ledematen.

5. Technische gegevens

MAAT	OMTREK VAN DE KNIKAP (cm)
S	34-36
M	36-38

L	38-41
XL	41-44
XXL	44-47

6. Onderhoud

- Met de hand wassen in warm water. Niet in de droger, niet chloorbehandelen, niet strijken, niet bleken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel.
- Zorg ervoor dat het klittenband is vastgemaakt om het materiaal niet te beschadigen.
- Laat drogen bij kamertemperatuur, uit de buurt van een sterke warmtebron.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)