

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Douchestoel – zonder gereedschap

Productcode: TGR-R KP 340L




1. Kenmerken

De douchestoel bestaat uit een aluminium frame en een brede zitting van duurzaam PVC. De stoel heeft in hoogte verstelbare poten, handgrepen voor de douchekop en zijhandgrepen die het gebruik van het product vergemakkelijken. Speciaal ontworpen antislip rubberen dopjes voorkomen dat de stoel wegglijdt op natte oppervlakken. De stoel wordt bovendien geleverd met een Tool-Free (TF)-systeem dat de montage vergemakkelijkt.

De set bevat: zitting, stoelonderstel (2 stuks), in hoogte verstelbare poten (4 stuks), bevestigingsschroeven (5 stuks).

Onderdelen van de stoel:

- A. zitting
- B. onderstelbuizen
- C. hoogteverstelling
- D. antislipdop
- E. douchekopgreep

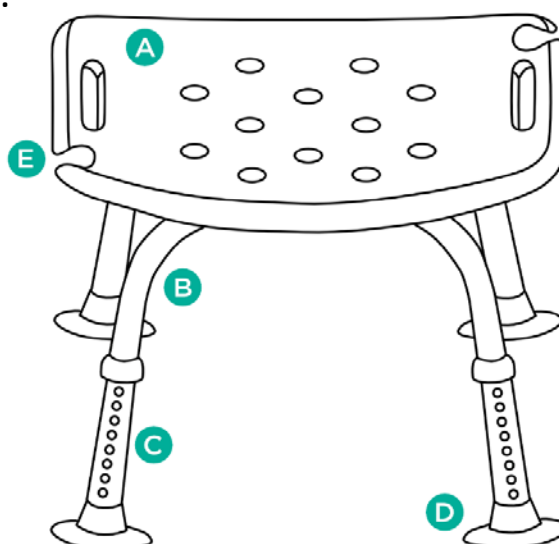

2. Toepassing

De douchestoel is hulpmateriaal dat de gebruiker helpt bij het uitvoeren van hygiënische handelingen. De stoel wordt aanbevolen voor mensen met beperkte mobiliteit, waardoor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten wordt verhinderd of bemoeilijkt. De stoel kan worden gebruikt onder de douche, in bad, in badkamers en andere vochtige ruimtes thuis en in ziekenhuizen.

3. Montage

Stap 1. Plaats de zitting ondersteboven op een vlakke ondergrond.

Stap 2. Plaats de buizen die de basis van de douchestoel vormen op de daarvoor bestemde plaatsen op de zitting.

Let op! Zorg ervoor dat de holtes van de basisbuizen naar elkaar zijn gericht (afbeelding 1).

Stap 3. Bevestig de gekruiste buizen van het onderstel aan de zitting met de bevestigingsschroef in het midden.

Stap 4. Draai de overige bevestigingsschroeven vast in de bevestigingsopeningen. Gebruik speciaal geprofileerde metalen kussentjes om een veilige en stabiele verbinding tussen het onderstel en de zitting te garanderen.

Stap 5. Controleer of alle bevestigingsschroeven correct zijn vastgedraaid.

Let op! Controleer regelmatig of de schroeven nog vastzitten.



HOOGTEVERSTELLING

- Om de hoogte van de douchestoel aan te passen, drukt u op de metalen pin, kiest u de gewenste hoogte van de poot en vergrendelt u de positie van de buizen ten opzichte van elkaar met behulp van de metalen pin. De poten zijn verstelbaar in stappen van 2,5 cm.

Let op! De pennen moeten bij alle poten op hetzelfde niveau worden ingesteld.

4. Technische gegevens

Breedte	48 cm
Diepte	41 cm
Hoogte	38-57 cm
Afmetingen zitting	51 x 31 cm
Gewicht	1,80 kg
Maximaal draagvermogen	136 kg

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de douchestoel, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig de douchestoel regelmatig met alleen water, een spons en milde reinigingsmiddelen voor kunststof, zoals zeep. Droog de stoel grondig af.
- **Gebruik** voor het reinigen **geen**: sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- **Controleer ten minste eens per drie maanden**: de vastzitting van de bevestigingsschroeven, de staat van de borgpennen en de staat van de buizen (op scheuren).
Het wordt aanbevolen om de rubberen dopjes regelmatig te controleren. Vervang de dopjes door nieuwe indien ze versleten zijn.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

REF	Referentienummer		Fabrikant
LOT	LOT-nummer	UDI	UDI code
SN	Serienummer	MD	Medisch hulpmiddel

	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)