

GEBRUIKSAANWIJZING

Douchestoel met rugleuning – zonder gereedschap

Productcode: TGR-R KP 350L



1. Kenmerken

De douchestoel is gemaakt van een aluminium frame met een duurzame PVC-rugleuning en een brede zitting. Hij is uitgerust met in hoogte verstelbare poten en handgrepen die het product gebruiksvriendelijker maken. Speciaal ontworpen rubberen dopjes voorkomen dat de stoel wegglijdt op natte oppervlakken. De stoel is voorzien van een Tool-Free (TF)-systeem dat de montage vereenvoudigt.

De set bevat: rugleuning, buizen voor het onderstel (2 stuks), in hoogte verstelbare poten (4 stuks), buizen voor de rugleuning (2 stuks), lange bevestigingsschroeven met ringen (5 stuks), korte bevestigingsschroeven met ringen (4 stuks).

Onderdelen van de douchestoel:

- A. Rugleuning
- B. Rugleuningbuizen
- C. Zitting
- D. Onderstelbuizen
- E. Hoogteverstelling
- F. Antislipvoet



2. Toepassing

De douchestoel is hulpmateriaal dat de gebruiker helpt bij het uitvoeren van hygiënische handelingen. De stoel wordt aanbevolen voor mensen met beperkte mobiliteit, waardoor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten wordt verhinderd of bemoeilijkt. De stoel kan worden gebruikt onder de douche, in bad, in badkamers en andere vochtige ruimtes thuis en in ziekenhuizen.

3. Montage


Stap 1. Plaats de zitting ondersteboven op een vlakke ondergrond.

Stap 2. Bevestig de basisbuizen kruislings in het midden op de zitting met behulp van korte bevestigingsschroeven met ringen (afbeelding 1).

Stap 3. Plaats de poten op de basisbuizen en vergrendel ze op de gewenste hoogte.

Stap 4. Bevestig de rugleuningbuizen aan de basisbuizen met behulp van lange bevestigingsschroeven met ringen (afbeelding 1).

Stap 5. Plaats de gemonteerde douchestoel op de poten en zet de rugleuning vast met korte bevestigingsschroeven met ringen.

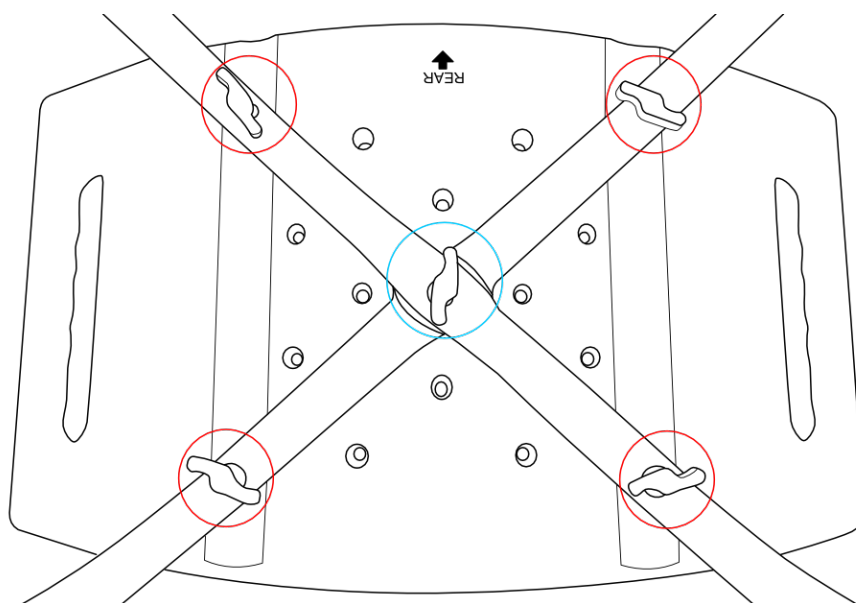

Afbeelding1

HOOGTEVERSTELLING

- Om de hoogte van de stoel aan te passen, drukt u op de vergrendelingspen, stelt u de gewenste hoogte van de poot in en vergrendelt u deze vervolgens weer. Herhaal deze stappen voor de andere poten. De poten zijn in stappen van 2,5 cm verstelbaar.

Let **op!** Alle poten moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

4. Technische gegevens

Breedte	49 cm
Diepte	44 cm
Zithoogte vanaf de grond	36-46 cm
Totale hoogte	64-74 cm
Afmetingen zitting	49 x 29 cm
Gewicht	3,38 kg
Max. draagvermogen	136kg

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig de douchestoel regelmatig met alleen water, een spons en milde reinigingsmiddelen voor kunststof, zoals zeep. Droog de stoel grondig af.
- **Gebruik** voor het reinigen **geen**: sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Controleer minstens eens per drie maanden de staat van de buizen, de borgschroeven en of de schroeven goed vastzitten.
- Het wordt aanbevolen om de rubberen dopjes regelmatig te controleren. Vervang de dopjes door nieuwe als ze versleten zijn.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

REF	Referentienummer		Fabrikant
LOT	LOT-nummer	UDI	UDI code

	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)