

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Douchekruk met rugleuning en armleuningen – zonder gereedschap

Productcode: TGR-R KP 355L



### 1. Kenmerken

De douchestoel bestaat uit een aluminium frame, een rugleuning en een brede zitting die zijn gemaakt van duurzaam PVC. De stoel heeft in hoogte verstelbare poten met antislip rubberen dopjes en schuimrubberen handgrepen aan de zijkanten die het gebruik van de stoel vergemakkelijken. Speciaal ontworpen rubberen dopjes voorkomen effectief dat de stoel wegglijdt op natte oppervlakken. De stoel is bovendien uitgerust met het Tool-Free (TF)-systeem, wat de montage vergemakkelijkt.

**De set bevat:** zitting met onderstel, handgrepen aan de zijkant – 2 stuks, rugleuning, bevestigingsbuizen voor de rugleuning – 2 stuks, bevestigingsschroeven (vleugelschroeven) – 4 stuks.

### Onderdelen van de toiletstoel:

- A. rugleuning
- B. rugleuningbuizen
- C. zitting
- D. onderstelbuizen
- E. zijhandgrepen
- F. pen voor het vergrendelen van de handgreep
- G. hoogteverstelling – TF-systeem
- H. antislipdoppen



### 2. Toepassing

De douchestoel is hulpmateriaal dat de gebruiker helpt bij het uitvoeren van hygiënische handelingen. De stoel wordt aanbevolen voor mensen met beperkte mobiliteit, waardoor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten wordt verhinderd of bemoeilijkt. De stoel kan worden gebruikt onder de douche, in bad, in badkamers en andere vochtige ruimtes thuis en in ziekenhuizen.

### 3. Montage

**Stap 1.** Bevestig de rugleuning aan de rugleuningbuizen met vier bevestigingsschroeven (vleugelschroeven).

**Stap 2.** Plaats de rugleuningbuizen in de bevestigingsopeningen onder de zitting totdat de vergrendelingspennen vastklikken.

**Stap 3.** Plaats de gemonteerde stoel op de poten.

**Stap 4.** Monteer de zijhandgrepen in de bevestigingsopeningen aan de buitenzijde van de zitting.

### HOOGTEVERSTELLING

- Om de hoogte van de stoel aan te passen, drukt u op de metalen pin, kiest u de gewenste hoogte van de poot en vergrendelt u vervolgens de positie van de poten ten opzichte van elkaar met de vergrendelingspin. De poten zijn in stappen van 2,5 cm verstelbaar.

**Let op!** De pinnen moeten in elke poot op hetzelfde niveau worden ingesteld.

### 4. Technische gegevens

Breedte	48 cm
Diepte	40 cm
Zithoogte	37-49 cm
Totale hoogte	66-79 cm
Afmetingen zitting	40 x 33 cm
Gewicht stoel	3,1 kg
Maximaal draagvermogen	136 kg

### 5. Opmerkingen

**Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de douchestoel, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.**

### 6. Onderhoud

- Reinig de douchestoel regelmatig met alleen water, een spons en milde reinigingsmiddelen voor kunststof, zoals zeep. Droog de stoel grondig af.
- **Gebruik** voor het schoonmaken **geen**: sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het

frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).

- Controleer systematisch:
  - de vastzitting van de vleugelschroeven
  - de staat van de borgpennen
  - de staat van de buizen (op scheuren)

Het wordt aanbevolen om de rubberen uiteinden regelmatig te controleren. Vervang de uiteinden door nieuwe als ze versleten zijn.

## 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










## 8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

## 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

## 10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

---

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.  
Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft  
gekozen!



**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



05/2026(I)