



TGR-R KP 540

DOUCHESTOEL INKLAPBAAR - ZONDER
GEREEDSCHAP
DOUCHESTOEL ZONDER RUGLEUNING, INKLAPBAAR

GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRUIKSAANWIJZING

ELEMENTEN VAN DE STOEL

1. Zitting
2. Zijhandgreep
3. Bevestigingsklem
4. Hoogteverstelling
5. Poot met antislipdop



1. Kenmerken

De douchestoel is gemaakt van een aluminium frame en een brede zitting van duurzaam PVC. De stoel heeft in hoogte verstelbare poten, zijhandgrepen en rubberen antislipdoppen die voorkomen dat de stoel op natte oppervlakken wegglijdt. De speciaal ontworpen stoelbasis maakt eenvoudig inklappen en snel opbergen mogelijk. De stoel is bovendien uitgerust met een Tool-Free (TF) montagesysteem.

De set bevat: zitting met inklapbare stoelbasis, in hoogte verstelbare poten (4 st.).

2. Toepassing

De douchestoel is een hulpmiddel ontworpen om de gebruiker te helpen bij het uitvoeren van hygiënische handelingen. De stoel wordt aanbevolen voor personen met beperkte mobiliteit die het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten verhindert of bemoeilijkt. De stoel kan worden gebruikt onder de douche, in bad, in badkamers en andere vochtige ruimtes thuis en in ziekenhuizen.

3. Montage

Stap 1. Haal de stoel en de poten uit de doos.

Stap 2. Monteer de 4 poten op de basis. Zet ze met borgpennen vast op de gewenste hoogte. Zorg ervoor dat alle poten op dezelfde hoogte staan!

Stap 3. Pak het basisframe vast en monteer de resterende buis in de zilveren sleuf aan de onderkant van de zitting (afbeelding 1).

HOOGTEVERSTELLING



Druk voor hoogteverstelling op de borgpen op de poten, kies de juiste hoogte en vergrendel de positie. De poten zijn verstelbaar per 2,5 cm.

Let op! De pennen moeten bij alle poten op hetzelfde niveau zijn ingesteld.

INKLAPPEN

Om de stoel in te klappen, plaats hem op de vloer met de zitting omlaag en zet de voet op de zitting. Pak het basisframe tegenover het frame in de zilveren sleuf (afbeelding 2) vast en trek omhoog.

Let op! Gebruik geen overmatige kracht bij het drukken op de zitting.

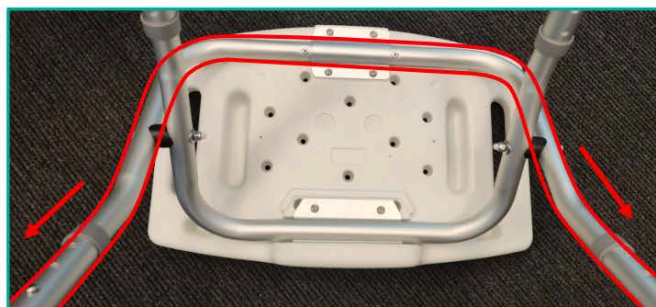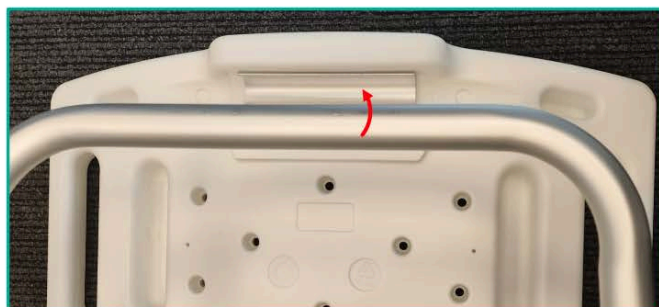

Afbeelding 1 | Afbeelding 2

4. Technische gegevens

Totale breedte: 54-56 cm	Afmetingen zitting: 50 x 25 cm
Totale lengte: 44-50 cm	Zithoogte vanaf de grond: 36,5-41 cm
Hoogteverstelling: 40-44,5 cm	Gewicht: 2,80 kg
Maximale belasting: 136 kg	Afmetingen ingeklapt: 50 x 11 x 67 cm <i>afmetingen gemeten zonder de poten</i>

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en verkeerd gebruik.

6. Onderhoud

- Reinig de douchestoel regelmatig alleen met water, een spons en milde middelen voor kunststof, zoals zeep. Droog goed af.
- **Gebruik niet** voor reiniging: sterke reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen.
- **Controleer minstens eens per drie maanden:** de staat van de borgpennen en buizen (scheuren). Controleer de rubberen doppen regelmatig. Vervang versleten doppen door nieuwe.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle door ons bedrijf gedistribueerde producten vallen onder garantie; de voorwaarden staan op de garantiekaart op onze website. Neem contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. Bewaar voor garantie het aankoopbewijs (kassabon of factuur).

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI-code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Let op		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke EU-vereisten voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745)		

Ons volledige productassortiment is verkrijgbaar bij onze distributeurs. Lees meer op: **www.timago.com**. Bedankt dat u voor Timago koos!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

E.: info@timago.com



07/2026(I)