

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Nachtkastje

Productcode: TableTIM



1. Kenmerken

Het nachtkastje heeft een C-vormig metalen frame en een houten tafelblad. Het is voorzien van een verstelbaar blad en zwenkwielen met remmen, waardoor het gemakkelijk te verplaatsen en boven het bed te plaatsen is.

Onderdelen van het nachtkastje:


- A. Frame
- B. Onderstel met wielen
- C. Frame van het tafelblad
- D. Bevestigingsschroef
- E. Tafelblad
- F. Hoogteverstelling



2. Toepassing

Het nachtkastje is ontworpen voor gebruik direct naast het bed van een patiënt, om een oppervlak te bieden voor eten, lezen of schrijven terwijl men in bed ligt. Het product is ontworpen voor gebruik zowel tijdens de zorg in medische instellingen als thuis.

3. Montage en afstelling

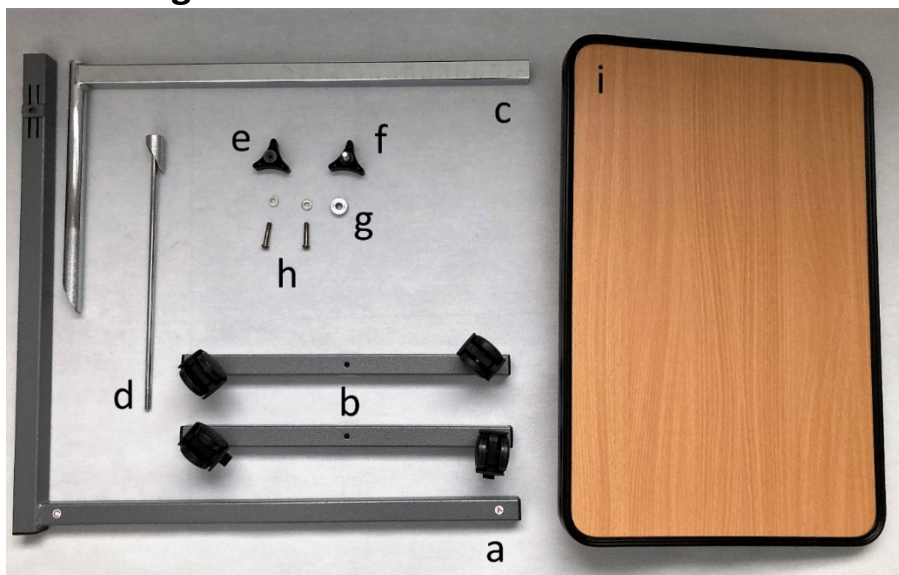

1. Bevestig beide onderstellen met wielen (**b**) aan het hoofdframe (**a**) door de bijbehorende lettermarkeringen op elkaar af te stemmen — lijn bijvoorbeeld de letter “**A**” op het frame uit met de “**A**” op het onderstel, en doe hetzelfde voor “**B**”, “**C**” en “**D**”.
2. Zodra het onderstel is bevestigd, zet u de tafel rechtop op de vier wielen en zet u de wielremmen vast om de tafel te stabiliseren voor de verdere montage.
3. Steek het tafelbladframe (**c**) in de vierkante opening van het hoofdframe (**a**).
4. Steek de tafelbladpen (**d**) in het schuine, afgeschuinde gat van het tafelbladframe (**c**), zodat de twee afgeschuinde oppervlakken op één lijn liggen.
5. Steek de huls (**g**) in het ronde gat van het tafelbladframe (**c**) over de uitstekende schroefdraadpen, waarbij u ervoor zorgt dat de eerder geplaatste pen (**d**) op zijn plaats blijft.
6. Schroef de bevestigingsvlindermoer (**e**) op de uitstekende schroefdraad van de tafelbladpen (**d**). Draai deze niet te vast; hij moet stevig genoeg zitten om op zijn plaats te blijven zonder eraf te vallen.
7. Plaats het tafelblad (**i**) op het voorbereide tafelbladframe. Om dit gemakkelijker te maken, houdt u de buis onder het tafelblad met één hand vast. Draai na het plaatsen van het tafelblad de vlindermoer (**e**) vast.
8. Zet ten slotte de bevestigingsvlindermoer met de schroef (**f**) vast in het daarvoor bestemde gat in het hoofdframe (**a**) en draai deze vast.

DE KANTELING VAN HET TAFELBLAD AANPASSEN

- Om de hoek van het tafelblad aan te passen, draait u de bevestigingsvlindermoer (**e**) aan de zijkant van het tafelblad los.
- Nadat u de juiste hoek hebt ingesteld, draait u de bevestigingsvleugelmoer (**e**) vast

DE HOOGTE VAN HET TAFELBLAD INSTELLEN

- Om de hoogte van het tafelblad aan te passen, draait u de bevestigingsvleugelmoer los met schroef (**f**) op het basisframe (**a**).
- Draai de bevestigingsvleugelmoer met schroef (**f**) vast nadat u de juiste hoogte hebt ingesteld

REMMEN

- Zet de wielremmen vast tijdens het gebruik van de tafel

4. Technische gegevens

Afmetingen	60,5 x 40,2 cm
Afmetingen tafelblad	60 x 40 cm
Hoekverstelling van het tafelblad	0° - 90°
Hoogteverstelling	72-112 cm
Gewicht	6,7 kg
Max. draagvermogen	10 kg
Diameter wielen	1,50"

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

Het product moet worden gereinigd met een vochtige doek en vervolgens grondig worden gedroogd. Er mogen geen schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt, aangezien deze de beschermende coatings kunnen beschadigen. Verontreinigingen moeten regelmatig worden verwijderd van de bewegende onderdelen van het product (zoals scharnieren, klemschroeven en vergrendelingsmechanismen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)