

GEBRUIKSAANWIJZING

Aluminium rollator met 4 wielen

Productcode: YOLA AIR



1. Kenmerken

De 4-wielige rollator is gemaakt van aluminium met een matte laklaag. Hij heeft grote luchtbanden met een diameter van 12 inch voor en achter, in hoogte verstelbare handgrepen met anatomische handvatten, remmen met parkeerrem, een zitje met in hoogte verstelbare rugleuning en een tas. De constructie is gebaseerd op een kruisframe en buizen met een ovale doorsnede, waardoor de weerstand tegen axiale druk aanzienlijk wordt verhoogd. De rollator is uitgerust met een wandelstok- en flessenhouder voor comfortabel dagelijks gebruik.

De set bevat: frame met zitje, voor- en achterwielen met luchtbanden, rugleuning, tas, wandelstokhouder, flessenhouder, pomp, bevestigingsschroeven (2 stuks).

Onderdelen van de rollator:

- A. Handgrepen
- B. Handrem
- C. Hoogteverstelling rugleuning
- D. Zitting met handgreep
- E. Tassen
- F. Hoogteverstelling
- G. Bottel- en wandelstokhouder*
- H. Vouwmechanisme voor achterwielen
- I. Bevestigingsschroeven voor voorwielen
- J. Achter- en voorwielen van 12 inch luchtbanden



* De flessenhouder en de wandelstokhouder kunnen aan beide zijden van de rollator worden gemonteerd; de afbeelding dient alleen ter illustratie.

2. Toepassing

De rollator is ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben tijdens het lopen. Hij wordt ook aanbevolen voor ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te

verbeteren en de veiligheid te waarborgen tegen vallen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit van mensen met problemen bij het lopen en het rechtop staan. Het garandeert betere stabilisatie, ondersteuning en veiligheid tijdens het lopen.

3. Montage

MONTAGE

Stap 1. Haal de rollator en de onderdelen uit de doos.

Stap 2. Plaats de voorwielen in de juiste positie (zoals weergegeven op de referentieafbeelding) en zet ze vast met de montageschroeven. Trek het rode inklapmechanisme (H) naar u toe en laat de achterwielen zakken tot u een kenmerkende "klik" hoort.

Stap 3. Steek de handgrepen in de openingen op het frame en zet ze vast met de borgpennen.

Stap 4. Om de rollator volledig uit te klappen, pakt u deze bij de zitting vast en trekt u deze naar buiten. Druk de zitting aan beide kanten in totdat deze vastklikt.

Stap 5. Bevestig de rugleuning door deze in de speciale houder onder de handgrepen te schuiven. Bevestig de tas aan de voorkant van de rollator met behulp van de riemen.

Stap 6. Bevestig de wandelstokhouder en de flessenhouder aan het frame.

Stap 7. Controleer of de rollator correct is gemonteerd, volledig is uitgeklappt en of er geen onderdelen of schroeven ontbreken. Neem contact op met de verkoper als u schade of ontbrekende onderdelen opmerkt.

De rollator is klaar voor gebruik.

OPVOUWEN

Om de rollator in te klappen, herhaalt u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

HOOGTE VAN DE RUGLEUNING VERSTELLEN

Om de hoogte van de rugleuning aan te passen, draait u de dop onder de parkeerrem los en verstelt u de rugleuning naar de gewenste hoogte. Draai de dop daarna weer vast.

Let op! Zorg ervoor dat beide zijden van de rugleuning op dezelfde hoogte staan.

HOOGTE VAN DE HANDGREPEN VERSTELLEN

Om de hoogte van de handgrepen aan te passen:

- Druk de remhendel naar beneden om de parkeerrem te activeren en de rollator stil te zetten.
- Druk op de vergrendelingspen op het frame en stel de hoogte van de

handgreep af. Doe hetzelfde aan de andere kant.

- Ontgrendel daarna de parkeerrem.

LET OP! Beide handgrepen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

REMMING

- Om de rollator tot stilstand te brengen, trekt u de remhendel omhoog en houdt u deze vast.
- Wanneer u niet in beweging bent of wanneer u de zitting gebruikt, vergrendelt u de parkeerrem met de parkeerklem door de remhendel naar beneden te trekken.
- Om de parkeerrem te ontgrendelen, trekt u de hendel omhoog.

4. Technische gegevens

Totale breedte	68 cm
Totale lengte	82 cm
Zitbreedte	46 x 25 cm
Zithoogte vanaf de grond	58 cm
Hoogteverstelling handgrepen	85-100 cm
Gewicht rollator	11,50 kg
Max. draagvermogen	136 kg
Max. draagvermogen van de tas	5 kg
Kleur frame	donkerblauw

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig het frame met een vochtige doek en droog het grondig af.
- Gebruik geen agressieve poetsmiddelen, omdat deze de beschermende coatings kunnen beschadigen.
- Verwijder regelmatig vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klemschroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)