

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aluminium rollator met 4 wielen

Productcode: YOLA



1. Kenmerken

De 4-wielige rollator is gemaakt van geverfd aluminium. Hij heeft stevige voor- en achterwielen met een diameter van 20 cm, in hoogte verstelbare handgrepen met anatomische handvatten, remmen met parkeerrem, een zitje met in hoogte verstelbare rugleuning en een tas. De constructie is gebaseerd op een kruisframe en buizen met een ovale doorsnede, waardoor de weerstand tegen axiale druk aanzienlijk is verhoogd. De rollator is uitgerust met een wandelstokhouder voor dagelijks gebruiksgemak.

De set bestaat uit: frame met zitje, massieve voor- en achterwielen, rugleuning, tas, wandelstokhouder.

Onderdelen van de rollator:

- A. Handgrepen
- B. Parkeerrem
- C. In hoogte verstelbare rugleuning
- D. Zitting met handgreep
- E. Tas
- F. Hoogteverstelling
- G. Stoelverhoger
- H. Vouwmechanisme voor achterwielen
- I. Vouwschakelaar voor voorwielen
- J. Achter- en voorwielen 8" massieve wielen



2. Toepassing

De rollator is ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben tijdens het lopen. Hij wordt ook aanbevolen aan ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te verbeteren en de veiligheid tegen vallen te waarborgen. Het gebruik van de

- **Druk op de vergrendelingspen op het frame en stel de hoogte van de handgreep af. Doe hetzelfde aan de andere kant.**
- **Ontgrendel daarna de parkeerrem.**
LET OP! Beide handgrepen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

REMMEN

- Om de rollator tot stilstand te brengen, trekt u de remhendel omhoog en houdt u deze vast.
- Wanneer u niet in beweging bent of wanneer u de zitting gebruikt, vergrendelt u de parkeerrem met de parkeerklamp door de remhendel naar beneden te trekken.
- Om de parkeerrem te ontgrendelen, trekt u de hendel omhoog.

4. Technische gegevens

Totale breedte	65 cm
Totale lengte	69 cm
Zitbreedte	46 x 25 cm
Zithoogte vanaf de grond	55 cm
Hoogteverstelling handgrepen	81-97 cm
Gewicht rollator	8,20 kg
Maximaal draagvermogen	136 kg
Maximale draagcapaciteit van de tas	5 kg
Kleur frame	matzwart, turkoois, grijs

5. Opmerkingen

Timago International Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en verkeerd gebruik.

6. Onderhoud

- Reinig het frame met een vochtige doek en droog het grondig af.

- Gebruik geen agressieve poetsmiddelen, omdat deze de beschermende coatings kunnen beschadigen.
- Verwijder regelmatig vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klemschroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)