

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Badhandgrepen 30/40/45/60/80 cm

Productcode: JMC-C 54012/16/18/24/32



1. Kenmerken

Badhandgrepen zijn vervaardigd uit een gepoedercoat stalen frame. Dankzij de toepassing van meerdere beschermlagen zijn ze bestand tegen vocht.

De handgrepen kunnen zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd.

De set bevat: handgreep, schroeven (6 stuks), pluggen (6 stuks), rubberen ringen



2. Toepassing

De badhandgreep is een hulpmiddel dat het opstaan en het bewaren van het evenwicht vergemakkelijkt. De handgrepen worden aanbevolen voor mensen met beperkte mobiliteit, waardoor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten wordt verhinderd of bemoeilijkt. De badhandgrepen kunnen worden gebruikt in de douche, in het bad, in badkamers en andere vochtige ruimtes thuis en in ziekenhuizen.

3. Montage

Opmerking: Volg de instructies in deze handleiding tijdens de montage. Gebruikers met beperkte mobiliteit hebben mogelijk hulp nodig van een derde persoon met de juiste vaardigheden.

Waarschuwing: Gebruik de handgrepen niet als er zichtbare of merkbare schade (bijv. scheuren) wordt geconstateerd, aangezien dit tot een ongeval kan leiden.

Stap 1: Bepaal en markeer de plek op de muur waar de handgreep gemonteerd zal worden.

Stap 2: Boor bevestigingsgaten in de muur op de juiste hoogte en met de juiste tussenafstand.

Stap 3: Bevestig de beugel met schroeven en pluggen.

4. Technische gegevens

Productcode	Breedte	Gewicht	Max. draagvermogen
-------------	---------	---------	--------------------

JMC- C 54012	0,45 kg	0,45 kg	100 kg
JMC-C 54016	40 cm	0,53 kg	
JMC-C 54018	45 cm	0,60 kg	
JMC-C 54024	60 cm	0,69 kg	
JMC-C 54032	80 cm	0,80 kg	

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig de douchestoel regelmatig met alleen water, een spons en milde reinigingsmiddelen zoals zeep. Droog de stoel grondig af.
- **Gebruik** voor het reinigen **geen**: sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Controleer ten minste eens per drie maanden:
 - of de schroeven goed vastzitten
 - de staat van de buizen (op scheuren)

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)