

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Elektrische rolstoel

Productcode: iFold



### 1. Veiligheidsinformatie

- Lees de handleiding voor het eerste gebruik.
- Gebruik de rolstoel pas als deze volledig is gemonteerd.
- Het gebruik van de rolstoel door personen die deze niet zelfstandig kunnen bedienen, wordt afgeraden.
- Het maximale draagvermogen mag niet hoger zijn dan 150 kg.
- De rolstoel mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Het wordt aanbevolen om tijdens het rijden uw voeten op de voetsteun en uw onderarmen op de armleuningen te houden.
- Controleer altijd het batterijniveau op het bedieningspaneel voor gebruik.
- Deze elektrische rolstoel mag alleen worden gebruikt op een vlakke ondergrond of op lichte hellingen. Er mag niet op worden gereden op een ondergrond met een hellingshoek van meer dan 6 graden.
- Rijd niet op maximale snelheid wanneer u een helling op of af gaat.
- Gebruik de rolstoel niet op zachte en gladde oppervlakken zoals modder, zand enz.
- Rijd niet zijwaarts met de rolstoel op sterk verhoogde terreinen.
- Plaats geen extra lading, zoals een aanhanger enz., op de rolstoel.
- Repareer of wijzig de constructie van de rolstoel niet zelf. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen die door de fabrikant worden geleverd.
- Sta niet op en ga niet zitten op de rolstoel wanneer de bedieningsmodule is ingeschakeld.
- Gebruik de rolstoel niet zonder kantelbeveiligingswielen.
- Wanneer de vrijloopmodus (handmatig) is ingeschakeld, mag u niet zonder hulp in of uit de rolstoel stappen.
- Leun niet voorover om voorwerpen te pakken die voor, naast of achter de rolstoel liggen. Ga niet op de voetsteun staan. Dit kan ertoe leiden dat de rolstoel omvalt.
- Vermijd snelle richtingsveranderingen tijdens het rijden op hellingen.
- Vertraag altijd bij het bergafwaarts rijden of het maken van bochten.
- Controleer voor gebruik of de wielen correct zijn gemonteerd.
- Maak geen plotselinge bewegingen tijdens het gebruik van de joystick.

- Bescherm de rolstoel bij opslag tegen regen en slechte weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de hendels in de elektrische stand staan voordat u de rolstoel inschakelt.
- Vermijd gebieden met horizontale spleten.
- Als de rolstoel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de accu.
- Gebruik de rolstoel niet op de weg. Dit kan leiden tot een auto-ongeluk.
- Bewaar de rolstoel niet op plaatsen met hoge temperaturen en vochtigheid.

## 2. Productbeschrijving en toepassing

De elektrische rolstoel is ontworpen voor mensen met mobiliteitsproblemen en helpt gehandicapte patiënten bij hun dagelijkse taken. Hij kan een standaardrolstoel vervangen.

### De elektrische rolstoel is geschikt voor patiënten met:

- een handicap, die moeite hebben met zelfstandig bewegen,
- functiestoornissen en verminderde mobiliteit,
- hart- en vaatziekten,
- lichamelijke verzwakking als gevolg van hoge leeftijd.

### Beschrijving van het pictogram

| Symbool                                                                             | Betekenis                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Veiligheidsklasse B                                                            |
|  | Belangrijk! Lees de gebruikershandleiding                                      |
| <b>IP54</b>                                                                         | Bescherming tegen beperkte stofindringing en waterspatten uit alle richtingen. |
|  | Breekbaar                                                                      |
|  | Deze kant naar boven                                                           |
|  | Bescherm tegen vocht en vochtigheid                                            |

## A. ONDERDELEN VAN DE ROL

1. Hoofdsteun
2. Rugleuning met handgreep
3. Zitgordel
4. Gaaszak
5. Armleuning
6. Knop voor het inklappen van
7. Bedieningsmodule met joys
8. Zaklamp/oplaadpoort
9. Zadel (kussen)
10. Spatbord
11. Achterwiel 12" luchtband
12. Achter 8" massief wiel
13. Voetsteun



14. Opvouwmecanisme
15. Achterste schokdempers
16. Motoren en bedieningshendels
17. Stabilisatorwiel
18. Voor- en klapmechanisme schokdempers
19. Lithium-batterij
20. Draadloze afstandsbediening

**Rolstoel na het opvouwen:**



## **B. PRODUCTKENMERKEN**

- Aluminium frame met elektrische inklapfunctie
- Hoofdsteun inbegrepen
- Pneumatische achterwielen van 12 inch en massieve voorwielen van 8 inch
- Bedieningsmodule met LCD-display en draadloze afstandsbediening
- Veilige en betrouwbare elektromagnetische remmen
- Volledig gesloten, onderhoudsvrije accu
- Veiligheidsgordel en kantelbeveiligingswielen
- Opklapbare armleuningen en voetsteun
- Schokdempers voor, achter en in het klapmechanisme
- Gaasvakken voor kleine spullen aan de zijkanten
- Zak aan de achterzijde
- Inclusief reflecterende stickers
- Twee bedieningsmodi: elektrisch en handmatig

## **C. TECHNISCHE SPECIFICATIES**

1. Producttype: voor gebruik binnen en buiten
2. Maximale snelheid:  $\leq 6$  [km/h]
3. Max. draagvermogen: 150 [kg]
4. Remweg op horizontaal oppervlak:  $\leq 1,5$  [m]
5. Max. actieradius: 20 [km]
6. Batterij: lithium, 24 [V] x 20 [Ah]
7. Max. hellingshoek:  $\leq 6^\circ$
8. Min. draaicirkel: 1,2 [m]
9. Gewicht rolstoel: 31,50 kg (zonder accu)
10. Gewicht accu: 3,50 kg
11. Oplaadtijd accu: 6-8 uur

**Let op!** Sommige parameters kunnen variëren afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, de wegomstandigheden en het batterijgebruik.

- Veiligheidsklasse: type B
- Beschermingsgraad voor de motor: IP54
- Vermogen motor: 2x250[W]
- De rolstoel mag niet worden gebruikt in ruimtes waar brandbaar gas is vermengd met lucht, zuurstof of lachgas.

## **3. Montage en afstelling**

- **Lees vóór het uitklappen de handleiding, paragraaf 5A – Bediening: FUNCTIES VAN DE BEDIENINGSMODULE.**

- **De rolstoel kan niet handmatig worden uitgeklappt/ingeklapt. Probeer de rolstoel niet handmatig uit te klappen/in te klappen, aangezien dit schade aan de onderdelen kan veroorzaken. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het met geweld handmatig openen of uitklappen/inklappen van de rolstoel.**
- **Uitklappen:** Haal de rolstoel uit de doos. Zet hem op de grond en bevestig de bedieningsmodule onder de armleuning met de schroef (de schroef bevindt zich onder een van de armleuningen). Sluit de kabel van de bedieningsmodule aan op de kabel van de rolstoel en schakel de module in. Schakel vervolgens de rolstoel in. Druk tweemaal op de rolstoelfunctie (7D) op de module. Wanneer de rolstoel op het display in de P-2-modus komt, drukt u op de snelheidsknop “-” (7E) om hem uit te klappen.
- **Inklappen:** Om de rolstoel in te klappen, selecteert u de P-2-modus op de bedieningsmodule en drukt u op de snelheidsknop “+” (7H).  
**Let op!** Druk niet op de knop om de rolstoel in te klappen als deze nog aan het uitklappen is. Druk niet op de knop om de rolstoel uit te klappen terwijl deze aan het inklappen is.
- **Afstelling van de bedieningsmodule:** Afstellingen moeten zittend worden uitgevoerd. Draai de bevestigingsschroef onder de armleuning los, stel de positie of lengte van de module af en draai de schroef daarna weer vast.  
**Let op!** Zorg ervoor dat de kabel die op de module is aangesloten, is losgekoppeld voordat u de module afstelt
- **Kantelen van de armleuning:** Druk op de rode knop aan de buitenkant van de rolstoel om de armleuning omhoog te brengen. Om de armleuning te laten zakken, beweegt u deze naar beneden tot u een klikgeluid hoort.
- **Montage van de kantelbeveiligingswielen:** Plaats de wielen in de bevestigingsopeningen aan de achterkant van de rolstoel. Trek de borgschroef aan en duw de wielen erin totdat u een klikgeluid hoort.
- **De accu verwijderen:** Om de accu te verwijderen, koppelt u de aangesloten kabel los en drukt u op de schakelaar onder de accu. Verwijder vervolgens de accu. Herhaal deze stappen om de accu weer te plaatsen.
- **Montage van de hoofdsteun:** Om de hoofdsteun te monteren, verwijdert u de schroeven boven de begeleidershandgreep op de speciale metalen plaat. Plaats de hoofdsteun zo dat de gaten in de plaat uitgelijnd zijn met de gaten in het frame van de hoofdsteun. Zet de hoofdsteun vast met de schroeven en de montagesleutel die bij de set zijn geleverd.  
**Let op!** De hoogte van de hoofdsteun kan worden aangepast door op de knop aan de achterkant te drukken.



## 4. Bediening

### A. FUNCTIES VAN DE BEDIENINGSMODULE



1. Batterijstatus
2. Indicator rolstoelfuncties
3. Functiemenu/weergave huidige snelheid
4. Rijafstand
5. Snelheidsindicator
6. Joystick
7. Bedieningsknoppen:
  - A. Volume – (Dempen)
  - B. Volume + (Dempen opheffen)
  - C. In-/uitschakelen
  - D. Rolstoelfuncties
  - E. Snelheid verhogen (uitklappen)
  - F. Licht aan/uit
  - G. Claxon
  - H. Snelheid verlagen (opvouwen)



8. Licht aan/uit
9. Joystick
10. Aan/uit-knop
11. Uitklappen (rugleuning achterover)
12. Bedieningsknoppen
  - A. Snelheidsregeling
  - B. Inklappen (rugleuning kantelen)

| Functie                                               | Weergegeven pictogram                                                                                                                                                    | Batterijniveau (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterijniveau (1)                                    |                                                                                         | Geeft het huidige batterijniveau weer. Groen – hoog batterijniveau, rood – laag batterijniveau (onmiddellijk opladen). Wanneer de batterij-indicator knippert, betekent dit dat de rolstoel moet worden opgeladen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Functie-indicator rolstoel (2), knop (7D) en menu (3) | <br> | <p>Geeft de huidige functie van de rolstoel weer. Het groen gemarkeerde deel van het pictogram geeft aan op welk deel van de rolstoel de functie van invloed is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wanneer de rugleuning is gemarkeerd</b> – de rugleuningverstelfunctie (P1).</li> <li>• <b>Wanneer de zitting is gemarkeerd</b> – de inklapfunctie van de rolstoel (P2).</li> </ul> <p>Druk op de rolstoelfunctieknop (7D) om het functiemenu op het display (3) te openen.</p> <p>Door nogmaals op de knop te drukken, kunt u de volgende optie in het menu selecteren (standaard is P-1 de eerste optie). Om het functiemenu uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop.</p> |
| Snelheidsdisplay (3)                                  |                                                                                       | Weergave van de huidige snelheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rijafstand (4)                                        |                                                                                       | Geeft de afgelegde afstand weer. De afstand wordt gereset nadat de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                     | rolstoelbesturingsmodule is uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Snelheidsniveau-indicator (5)</b>                     |    | Geeft het huidige snelheidsniveau aan. Het laagste snelheidsniveau is 1, het hoogste is 5.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Joystick (6 en 9)</b>                                 | -                                                                                   | Wordt gebruikt om de snelheid en de rijrichting te regelen.<br><br>Hoe verder de joystick van het midden wordt geduwd, hoe sneller de -rolstoel zal rijden. De snelheid neemt automatisch af zodra de joystick wordt losgelaten.                                                 |
| <b>In-/uitschakelen (7C)</b>                             | -                                                                                   | Druk hierop om de besturingsmodule van de rolstoel in of uit te schakelen                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Snelheidsregeling [in- en uitklappen] (7E en 12A)</b> | -                                                                                   | Druk op de +/- knop (7E/7H) om de snelheid van de rolstoel te verhogen/verlagen.<br><br><b>Terwijl de P-2-functie actief is:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op – om de rolstoel in te klappen,</li> <li>• Druk op + om de rolstoel uit te klappen.</li> </ul> |
| <b>Lichten aan/uit (7F)</b>                              |  | Druk op de knop om de zaklamp onder het bedieningspaneel in of uit te schakelen.<br><br><b>Let op!</b> Het pictogram op het LCD-scherm geeft aan dat de zaklamp aan staat.                                                                                                       |
| <b>Claxon (7G)</b>                                       | -                                                                                   | Druk hierop om de claxon (waarschuwingssignaal) te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Knoppen voor de rugleuning (11 en 12B)</b>                   | -                                                                                   | De knoppen voor de rugleuninghoek (11 en 12B) worden gebruikt om de hoek van de rugleuning met de afstandsbediening te regelen. Om de rugleuning te verstellen, houdt u de knop voor het inklappen (12B) ingedrukt. Om de hoek van de rugleuning om te keren, houdt u de knop voor het uitklappen (11) ingedrukt. De maximale hoek van de rugleuning is 55°.                                                                                                 |
| <b>Geluidsvolume en optie dempen/dempen opheffen (7A en 7B)</b> | -                                                                                   | <p>De rolstoel is standaard gedempt.</p> <p><b>Om de rolstoel te dempen:</b> druk één keer op de knop voor het verhogen van het geluidsvolume (7B).</p> <p><b>Om de rolstoel te dempen:</b> druk twee keer op de knop voor het verlagen van het geluidsvolume (7A)</p> <p>De rolstoel heeft twee geluidsvolumestanden. Om het geluidsvolume te verhogen, drukt u op de volumeknop (7B). Om het geluidsvolume te verlagen, drukt u op de volumeknop (7A).</p> |
| <b>Storingsindicator rolstoel</b>                               |  | Dit pictogram verschijnt wanneer de rolstoel niet goed functioneert. Raadpleeg hoofdstuk 11 van de handleiding (Problemen oplossen) voor mogelijke oorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bluetooth Verbinding</b>                                     |  | Geeft de verbinding met de afstandsbediening aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## B. FUNCTIEMENU ROLSTOEL

De rolstoel heeft een functiemenu waarmee u een van de twee beschikbare functies kunt selecteren: het verstellen van de rugleuning of het inklappen van de


rolstoel. Om de tweede functie te openen, drukt u nogmaals op de knop. Om het menu te verlaten, drukt u op de knop wanneer het display de P-2-functie weergeeft.

### Functies:

| Functie-index | Betekenis van de functie               | Gebruiksaanwijzing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-1           | Verstelling rugleuning rolstoel        | Wanneer de functie-indicator P-1 op het display verschijnt, duwt u de joystick naar voren of naar achteren om de positie van de rugleuning aan te passen (verstelhoek: $0-55^{\circ}$ ).                                                                                                                                                                                                                         |
| P-2           | Rolstoel automatisch in- en uitklappen | Wanneer de P-2-functie-indicator op het display verschijnt, drukt u op de snelheidsknop (7H; -) in om de rolstoel in te klappen. Om de rolstoel uit te klappen, drukt u op de snelheidsknop (7E; +) terwijl de P-2-functie is ingeschakeld.<br><br><b>Waarschuwing!</b> Probeer de rolstoel niet uit te klappen terwijl deze nog aan het inklappen is!<br><b>De rolstoel kan niet handmatig worden uitgekapt</b> |

### C. OMSchakelen TUSSEN HANDMATIGE EN ELEKTRISCHE MODUS

Om de rolstoel in de elektrische modus te gebruiken, zet u de linker- en rechter motorhendels aan de achterzijde omhoog. Om hem in de handmatige modus te gebruiken, zet u de hendels omlaag.

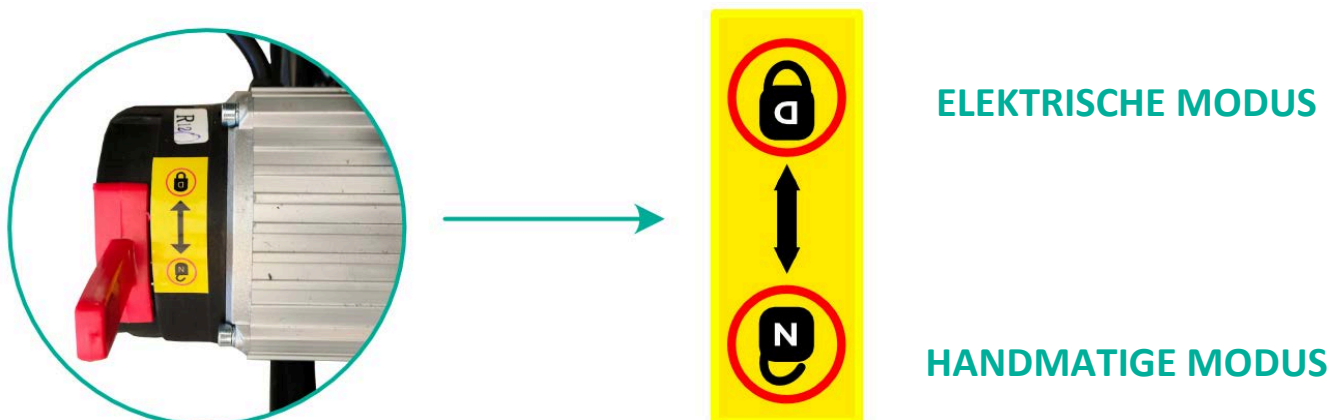

#### D. OPLADER

- De set bevat een speciale lader voor de accu.
- De oplaadtijd van de batterij bedraagt ongeveer 6-8 uur.
- Sluit de lader aan op de oplaadpoort in de bedieningsmodule (verwijder de zaklampmodule vóór het opladen) of op de accu.

**OPMERKING:** Schakel het bedieningspaneel uit voordat u de lader aansluit. Als u de lader rechtstreeks op de accu aansluit, moet u de accukabels loskoppelen voordat u gaat opladen.

- Een rood lampje geeft aan dat de accu wordt opgeladen, terwijl een groen lampje aangeeft dat deze volledig is opgeladen. Nadat het opladen is voltooid, schakelt de lader uit om overladen te voorkomen.
- Sluit de lader aan op de stroomvoorziening.
- Controleer de aansluiting.
- Om brandgevaar te voorkomen, mag u het laadcircuit niet wijzigen of loskoppelen terwijl de accu wordt opgeladen.
- Om het huidige batterijniveau op de bedieningsmodule te controleren, koppelt u de lader los.

#### E. GEBRUIKSAANWIJZING

- Selecteer de gewenste rijmodus.

**Let op!** Schakel niet van modus terwijl u op een helling rijdt.

- Druk op de aan/uit-knop om te controleren of de remmen goed werken. De remmen werken correct (elektrische modus) als u de rolstoel niet kunt voortduwen. Neem anders contact op met de verkoper.
- Kantel de voetsteun en ga comfortabel op de zitting zitten. Breng de voetsteun weer terug naar de horizontale stand.

**Let op!** Gebruik de voetsteun niet als steun bij het gaan zitten of opstaan uit de rolstoel. Dit kan ervoor zorgen dat de rolstoel kantelt en omvalt.

- Ga in de rolstoel zitten en schakel het bedieningspaneel in. Het LCD-scherm licht op. De joystick moet in de neutrale stand staan.
- Wees voorzichtig bij het eerste gebruik. Controleer de snelheid en de rijrichting zorgvuldig. De elektromagnetische rem wordt pas vrijgegeven nadat u de joystick hebt ingedrukt (elektrische modus). Om te versnellen, duwt u de joystick verder weg van de neutrale stand. Om te vertragen, doet u het tegenovergestelde.
- Om de rolstoel te stoppen, laat u de joystick los. Door op de aan/uit-knop te drukken, stopt de rolstoel ook.
- Gebruik de speciale knoppen op het bedieningspaneel om de snelheid van de rolstoel aan te passen aan de fysieke conditie van de gebruiker en de wegomstandigheden.
- De rolstoel mag alleen op vlakke oppervlakken worden gebruikt. Rijden op modderige of oneffen oppervlakken kan schade aan het besturingssysteem veroorzaken.

## 5. Technische gegevens

| Productcode                        | iFold                        |
|------------------------------------|------------------------------|
| Totale hoogte                      | 125 cm                       |
| Totale breedte                     | 65 cm                        |
| Totale lengte                      | 110 cm                       |
| Zithoogte vanaf de grond           | 53 cm                        |
| Hoogte rugleuning                  | 58 cm                        |
| Afmetingen zitkussen               | 47 x 47 x 6 cm               |
| Hoogte hoofdsteun vanaf de zitting | 70-73 cm                     |
| Gewicht accu                       | 3,50 kg                      |
| Maximaal draagvermogen             | 150 kg                       |
| Gewicht rolstoel                   | 31,50 kg                     |
| Wielen                             | voor: massief, zwenkbaar 8'' |

## 6. Reiniging en onderhoud van de rolstoel

- Het wordt aanbevolen om de constructie en de onderdelen (wielen, frame, kabels, bedieningsmodule, remmen enz.) regelmatig te inspecteren.
- Versleten of beschadigde onderdelen van de rolstoel moeten worden vervangen (neem in dat geval contact op met de verkoper).

## 7. Onderhoud van de accu:

- 1) Controleer regelmatig het weergegeven accuniveau. Als het niveau erg laag is, laad de accu dan onmiddellijk op om een spanningsdaling te voorkomen (wat de levensduur van de accu kan beïnvloeden).
- 2) Als de rolstoel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad de accu dan minstens één keer per maand op.
- 3) De accu heeft een bepaalde levensduur. Vervang de accu als deze versleten is.
- 4) Houd de accu schoon en buiten het bereik van kinderen. Voorkom schokken of beschadigingen aan de accu.
- 5) Laad de accu regelmatig op om de levensduur te verlengen.
- 6) Gebruikte accu's moeten worden afgevoerd volgens de lokale milieuregels.

## 8. Onderhoud van de banden:

Het wordt aanbevolen om de banden op te pompen tot maximaal 2,5 bar (35 PSI). De bandenspanning moet worden aangepast aan het gewicht van de gebruiker en veranderingen in de luchttemperatuur. Banden kunnen lucht verliezen bij langdurige opslag of wanneer ze niet worden gebruikt. Controleer regelmatig de bandenspanning en de slijtage. Vervang de banden door nieuwe wanneer de profieldiepte is afgenomen tot 1 mm. Volg deze instructies om de banden op te pompen:

### a. Lichte onderdruk

- Druk de band gelijkmatig met uw handen aan, zodat de band en de velg gelijkmatig aansluiten.
- Pomp het wiel op tot de gewenste bandenspanning.

### b. Geen lucht

- Pomp het wiel op tot 30% van het totale volume en druk de band gelijkmatig met uw handen aan, zodat de band en de velg gelijkmatig aansluiten.
- Pomp het wiel op tot de gewenste druk.

## 9. Opslag- en transportvoorwaarden

### A. TRANSPORT

- Wees voorzichtig tijdens het transport. Gooi het product en de verpakking niet, draai ze niet om en oefen er geen druk op uit.
- Raadpleeg voor het inklappen van de rolstoel het hoofdstuk „Montage en afstelling”.

### B. OPSLAG

De rolstoel moet in een droge en goed geventileerde ruimte worden bewaard. Vermijd: hoge temperaturen en snelle temperatuurschommelingen, zuren, basen en bijtende chemicaliën.

### C. OPSLAAGVOORWAARDEN

Temperatuur: -40 [°C] ~ +55 [°C]

Luchtvochtigheid: ≤80%

Luchtdruk: 86 ~ 106 kPa

## 10. Problemen oplossen

- In geval van een storing geeft de besturingsmodule dit aan met een geluidssignaal en een waarschuwing op het scherm. Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven, helpt bij het identificeren van het probleem.

| Probleemindicator                                                                                              | Oorzaak                                                       | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geluidssignaal, het display toont een getal tussen 0 en 5 en er verschijnt een probleemindicator op het scherm | De motor staat in de handmatige modus / storing rechter motor | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schakel de besturingsmodule uit, schakel de motoren over van handmatige modus naar elektrische modus en schakel de controller weer uit.</li><li>2. Koppel de aansluitkabel van de rechterrem los en sluit deze aan op de connector van de linkerrem. Doe hetzelfde voor de connector van de linkerrem. Als het probleem zich nog steeds voordoet, heeft dit te maken met de controller. Neem contact op met de klantenservice van de verkoper.</li><li>3. Controleer de aansluiting van de kabels.</li></ol> |



|                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De controller/rolstoel reageert niet wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt                                      | A. Probleem met de accu<br>B. Loszittende kabel of schade aan de knop<br>C. Storing in het circuit van de controller | Controleer de aansluiting van de kabel van de besturingsmodule. Als de kabel correct is aangesloten en niet beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice van de verkoper voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Na het inschakelen van de rolstoel brandt het batterijlampje op het display rood en klinkt er een alarm.          | Zeër laag batterijniveau                                                                                             | Laad de accu minimaal 30 minuten op. Schakel de rolstoel daarna in om te zien of het probleem zich nog steeds voordoet. Neem contact op met de klantenservice van de verkoper als het probleem niet is opgelost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Er klinkt een geluidssignaal, het display toont de cijfers 0-3 en er verschijnt een storingssymbool op het scherm | Storing in de linkermotor                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of de linkermotor in de elektrische modus staat. Zo niet, schakel dan de besturingsmodule uit, zet de motor in de elektrische modus en schakel de module weer in.</li> <li>2. Koppel de linker remkabel los en sluit deze aan op de rechter remconnector. Doe hetzelfde voor de rechter remconnector. Als het probleem zich nog steeds voordoet, heeft het te maken met de controller. Neem contact op met de klantenservice van de verkoper.</li> <li>3. Controleer de aansluiting van de kabels.</li> </ol> |
| Na het inschakelen van de rolstoel zijn zeven korte                                                               | Storing in de joystick                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De joystick staat niet in de middelste stand. Schakel de module uit, breng de joystick terug naar de middelste stand</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alarmsignalen te horen                                                                                                                  |                                 | <p>en schakel de module weer in.</p> <p>2. De joystick van de besturingsmodule is beschadigd, de kabel die op de besturingsmodule is aangesloten is beschadigd of niet goed aangesloten. Controleer de aansluitingen van de kabel. Als het alarm opnieuw klinkt, neem dan contact op met de klantenservice van de verkoper.</p> |
| Na het inschakelen van de rolstoel zijn acht korte alarmsignalen te horen                                                               | Interne storing                 | Neem contact op met de klantenservice                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| De rolstoel stopt niet nadat de joystick is losgelaten                                                                                  | Storing in de joystick          | Neem contact op met de klantenservice                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| De rolstoel beweegt niet, ondanks dat de besturingsmodule en de joystick correct werken en er geen alarmsignalen of foutindicaties zijn | Probleem met het circuit        | Neem contact op met de klantenservice                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wanneer de joystick naar voren wordt geduwd, draait de rolstoel naar links of rechts.                                                   | Problemen met de motorkoppeling | Neem contact op met de klantenservice                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wanneer de joystick naar voren wordt geduwd, rijdt de rolstoel met zeer                                                                 | Omgekeerde bedrading            | Wissel de rechter- en linkerremkabel met elkaar om. Neem contact op met de klantenservice van de verkoper                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hoge snelheid<br>achteruit                                                                     |                                                                                                    | als het probleem zich blijft<br>voordoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Draadloze controller<br>gaat niet aan<br><br>De controller gaat<br>wel aan, maar werkt<br>niet | 1. De batterijen zijn leeg of<br>zitten niet in de controller.<br>2. Probleem met de<br>controller | 1. Plaats de batterijen uit de set<br>in de controller of koop een<br>nieuwe set batterijen en<br>vervang de gebruikte<br>exemplaren.<br>2. Als de controller wel aangaat,<br>maar de joystick of knoppen<br>niet werken en de<br>bedieningsmodule geen<br>Bluetooth-pictogram toont,<br>neem dan contact op met de<br>klantenservice van de<br>verkoper. |

## 11. Garantie-informatie

- Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder een garantie, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht. Houd er rekening mee dat u voor garantiedoeleinden het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet bewaren. Als klantvriendelijk bedrijf leveren wij uitsluitend geteste producten – wat betreft materiaal, kwaliteit en functionaliteit. Als u vragen hebt over serviceprocedures, neem dan contact met ons op.
- De garantie dekt niet:
  - **slijtageonderdelen:** bekleding, banden, armleuningen, accu
  - **schade als gevolg van:** zelfreparaties, wijzigingen in de productconstructie, vallen, transport, oneigenlijk gebruik, het niet opvolgen van instructies, natuurrampen (brand, aardbeving, overstroming).







**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



05/2026(I)