

SIT GO

OPTIMA PLUS | BC-EC8002-HD



GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR ELEKTRISCHE ROLSTOEL

CE | MD

INHOUDSOPGAVE

1. Introductie
2. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik
3. Technische specificaties en structuur
4. Montage, afstelling en opvouwen
5. Gebruik, bediening en fouten
6. Onderhoud
7. Transport en opslag
8. Garantie



1. Introductie

1.1 Productbeschrijving

Zoekt u een beter dagelijks leven met meer mobiliteit? De elektrische rolstoel Sitgo OPTIMA PLUS biedt u precies dit. De stoel combineert geavanceerde technologie met een modern design. U kunt de stoel eenvoudig monteren. U kunt hem ook snel demonteren. Dit maakt de stoel perfect voor transport in de auto. Het chassis bestaat uit versterkte koolstofvezel. Het materiaal maakt de rolstoel erg sterk. Het maakt de stoel ook ultralicht.

1.2 Aanbevolen gebruik

De stoel helpt mensen met beperkte mobiliteit.

- U mag de stoel maximaal belasten met 200 kg.
- U kunt de stoel binnen en buiten gebruiken op vlakke oppervlakken.
- U moet gras, grindwegen en steile hellingen vermijden. U moet ook regen en sneeuw vermijden.

1.3 Extra informatie

Lees de handleiding zorgvuldig voor het eerste gebruik. U bereikt veilig gebruik door de instructies in deze handleiding te volgen. Het bedrijf dekt geen schade als u de stoel verkeerd gebruikt. Heeft u vragen? Neem vandaag nog contact op met uw dealer!

2. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Volg deze eenvoudige regels. Ze beschermen u, en ze beschermen de stoel.

- **Exclusief gebruik:** De stoel is slechts voor één persoon. U mag de stoel niet gebruiken voor sport of zware lading.
- **Armleuningen en voetsteunen:** U mag de armleuning niet gebruiken om uzelf op te trekken. U mag niet met uw volle gewicht op de voetsteun staan. Dit voorkomt letsel.
- **Wijzigingen:** U mag de stoel niet wijzigen. Ongeautoriseerde accessoires vernielen het product.
- **Water:** U mag nooit in de regen rijden. U mag niet op natte vloeren rijden.
- **Hellingen:** U mag niet op steile hellingen rijden. De helling mag maximaal 6 graden zijn. U mag nooit over obstakels rijden die hoger zijn dan 25 mm.
- **Handmatige modus:** U mag de handmatige modus alleen gebruiken met hulp van een begeleider.
- **Elektrische veiligheid:** Houd de oplader schoon en droog. U mag nooit een natte batterij opladen.

3. Technische specificaties en structuur

3.1 Afmetingen en eigenschappen

Eigenschap	Waarde	Eigenschap	Waarde
Totale afmetingen	113 x 71,5 x 105 cm	Batterij	24V/30AH
Opgevouwen afmetingen	41,5 x 70,5 x 86 cm	Batterijgewicht	3 kg
Zithoogte	56 cm	Oplader	Uitgang 5Ah
Zitbreedte	49,5 cm	Max. belasting	200 kg
Hoogte rugleuning	50 cm	Max. snelheid	6 km/u
Remweg	1500 mm	Max. actieradius	25 km (vlakke weg)
Draaicirkel	900 mm	Motoren	24V/250W x 2
Max. aanbevolen helling	6° (nooit boven 10°)	Achterwiel	12" massief magnesium
Totaal gewicht	18,6 kg (zonder batterij)	Voorwiel	8" massief magnesium

3.2 Hoofdcomponenten

1. Rugleuning

2. Zitkussen

3. Batterij

4. Joystick

5. Verstelbare armleuningen

6. Voorwiel en achterwiel
1. Motor

2. Remhendel

3. Antikiep wielen

4. Voetsteun

5. Frame / Chassis

4. Montage, afstelling en opvouwen

4.1 Montage

Wilt u de stoel klaarmaken voor gebruik? Volg deze stappen:

1. Haal de rolstoel uit de doos.

2. Trek de voetsteun naar voren.

3. Houd de rugleuning met één hand vast. Houd de zitting met de andere hand vast. Trek de delen uit elkaar. U hoort een klik als het slot vastzit.

4. Sluit de joystick aan en plaats deze op de gewenste armleuning.
5. Plaats de batterij onder de zitting en zorg ervoor dat deze volledig is opgeladen.
6. Zet de stoel aan en controleer de werking.
7. Leg het kussen op de zitting. Nu bent u klaar om te rijden!

Opmerking: Controleer altijd het slot voordat u gaat zitten.

4.2 Afstellingen

- **Joystick:** Pas de joystick aan uw arm aan. Draai de knop los. Verplaats de joystick. Draai de knop weer vast.
- **Remhendel:** Schuif de hendel naar achteren voor de elektrische modus. Schuif de hendel naar voren voor de handmatige modus.
- **ArMLEUNINGEN:** Druk op de vergrendelingsknop om de armleuning omhoog of omlaag te klappen.
- **Voetsteun:** Pas de diepte van de voetsteun aan om een comfortabele positie te vinden.



Pestillo cierre (Vergrendelingsmechanisme)



Joystick bedieningspaneel

4.3 Opvouwen

1. Trek aan het slot aan de achterkant van de stoel.
2. Klap de zitting omhoog.
3. Klap de voetsteun omhoog. Bevestig de voetsteun met tape tijdens transport.

5. Gebruik, bediening en fouten

5.1 Gebruik van Joystick

De joystick bestuurt uw rolstoel. Het is gemakkelijk te bedienen.

- **Aan/uit:** Druk op de knop om te starten.
- **Indicatoren:** Het scherm toont stroom en snelheid.
- **Snelheid:** Gebruik de knoppen om de snelheid te veranderen.
- **Besturing:** Beweeg de stick in de gewenste richting.
- **Toeter:** Gebruik de toeter om te waarschuwen in het verkeer.

Joystick vergrendelen: Houd de aan-knop 5 seconden ingedrukt.

Weer ontgrendelen: Houd de toeterknop 5 seconden ingedrukt.

5.2 Opladen van de batterij

- **Eerste keer:** Laad de batterij voor de eerste rit 6-8 uur volledig op.
- **Dagelijks opladen:** Zet de stoel uit. Steek de oplader in de joystick. Steek vervolgens de oplader in het stopcontact. Een rood lampje toont opladen. Een groen lampje toont een volle batterij.

Waarschuwing: U mag nooit in de stoel rijden tijdens het opladen.

5.3 Veelvoorkomende fouten

- **Code C4:** De rem staat in de handmatige modus. *Oplossing:* Schuif de remhendel naar achteren.
- **Code LC:** De joystick is vergrendeld. *Oplossing:* Houd de toeterknop 5 seconden ingedrukt.

Neem bij andere fouten contact op met uw servicewerkplaats.

6. Onderhoud

Een goed onderhouden stoel geeft een goede rit. Alle lagers in de wielen en motor zijn afgedicht. U hoeft ze niet te smeren.

- **Dagelijks:** Controleer de batterij en de rem. Test het rijden.
- **Maandelijks:** Controleer kabels en wielen.
- **Halfjaarlijks:** Controleer alle onderdelen op slijtage.
- **Jaarlijks:** Laat een werkplaats de motor en schroeven nakijken.
- **Batterij:** Wij raden aan om indien mogelijk elke dag op te laden.

7. Transport en opslag

7.1 Transport

Zorg goed voor uw stoel op reis! Vervoer de stoel in de originele doos. Verwijder de batterij en pak deze in noppenfolie. Leg nooit zware spullen op een opgevouwen stoel.

7.2 Opslag

Bewaar de stoel op een schone en droge plaats. De temperatuur moet tussen -10°C en 40°C liggen. Verwijder de batterij bij langdurige opslag. Laad de batterij eenmaal per maand op.

8. Garantie

Wij leveren goede kwaliteit. Wij geven u een sterke garantie.

- **Stoelcomponenten:** 3 jaar garantie.
- **Chassis (frame):** 5 jaar garantie.
- **Batterij en oplader:** Minimaal 1 jaar garantie.

De garantie geldt niet in deze gevallen:

- Onbevoegde personen wijzigen het product.
- U gebruikt niet-originele onderdelen.
- U gebruikt de stoel voor de verkeerde doeleinden.
- U overschrijdt de gewichtslimiet.
- De stoel krijgt schokken, valt of wordt nat.
- Slijtageonderdelen zoals wielen en bekleding verslechteren bij normaal gebruik.
- U rijdt in zand, plassen of modder.

- U laat de batterij lange tijd zonder stroom.

Symbol	Betekenis
SN / UDI	Serienummer / Unieke apparaatidentificatie
[i]	Zie gebruiksaanwijzing
CE	CE-markering
MD	Medisch hulpmiddel
EU REP	Vertegenwoordiger in de EU
!	Waarschuwing
kg	Maximaal toegestaan gewicht

FABRIKANT:

NINGBO BAICHEN MEDICAL DEVICES Co.,LTD.

Adres: Room 903, Diqu Building, 666 Taikang Middle Road, Ningbo, Zhejiang, China

EU-Vertegenwoordiger:

SUNGO Europe B.V.

Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Nederland

Importeur:

Guimi Evomedical, S.L.

Av Sant Esteve 157, 08211 Castellar del Valles, Barcelona, Spanje